

Хирургический высокопроизводительный аспиратор

ATMOS® Record 55 DDS

НАДЁЖНОСТЬ

БЕСШУМНОСТЬ

ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ATMOS® Record 55 DDS



Высокомощный универсал!

ATMOS® Record 55 DDS обладает первоклассной мощностью всасывания, имеет высокий показатель максимального вакуума и предназначен для различного применения в операционном зале.

Везде, где необходима бесшумная и высокопроизводительная аспирационная система, ATMOS® Record 55 DDS найдёт своё достойное применение.

Специально разработанная технология делает этот прибор надёжным партнёром во многих областях хирургии:

- Висцеральная хирургия
- Ортопедическая хирургия
- Торакальная хирургия
- Сосудистая хирургия и прочие области

Наиболее оптимально применение ATMOS® Record 55 DDS для эстетическо-пластической хирургии, а именно липосакции.

Преимущества ATMOS® Record 55 DDS:

- Высокая производительность:
поток от 55 литров в минуту непрерывно обеспечивает хорошую видимость в операционном поле.
- Бесшумность:
тихий процесс работы позволяет полностью сконцентрироваться на операционном поле
- Лёгкость и удобство управления
- Гигиеничность:
современная система ёмкостей и фильтров защищает медицинский персонал и пациентов
- Надёжность:
проверенная технология практически исключает риск сбоя
- Отсутствие сбоев из-за засорённого фильтра

ATMOS® Direct-Docking-System (DDS) - Запатентованная система быстрого и бесшлангового соединения ёмкости для секрета с аспиратором

Автоклавируемая ёмкость для секрета для минимальных временных затрат на ручные манипуляции
Инновация ATMOS® DDS (Запатентованная система быстрого и бесшлангового соединения) в деталях:

- Никаких переключений шлангов
- Простое переключение ёмкостей
- Гидрофобный антибактериальный фильтр интегрированный в ёмкость для секрета
- Ёмкость просто снять и вернуть на место
- Минимизация износа отдельных элементов

Ваши преимущества:

- Экономия времени при работе с приборами
- Простота применения
- Неправильное соединение шлангами аспиратора с ёмкостями исключено на 100%
- Простая, быстрая, безопасная подготовка прибора к работе



Хит продаж:

	Артикул
 <p>ATMOS® Record 55 DDS (2 ёмкости x 3 л)</p>	444.0930.0
<p>Ножной выключатель для включения и выключения прибора, устойчив к дезинфицирующим растройствам</p>	443.0755.0
<p>Ножной регулятор вакуума</p>	443.0770.0

Переключатель ёмкостей

для удобства выбора ёмкости при работе с мобильным аспиратором.

Быстросменяемый антибактериальный фильтр с увеличенной поверхностью фильтрации.

Разъём для шланга с изогнутым коннектором для направления потока жидкости, устранения пенообразования и увеличения срока службы фильтра.

ATMOS® Record 55 — с системой стандартных рельс

Базовое оснащение:

	Артикул
 <p>ATMOS® Record 55 с системой стандартных рельс</p>	443.0700.0
<p>Предохранительная ёмкость 250 мл со встроенным антибактериальным DDS-фильтром/защитой от переполнения, включая адаптер для артроскопии (Shaver, Lavagen), челюстно-лицевой хирургии, липосакции и т.д.</p>	444.0646.1
<p>Ножной выключатель для включения и выключения прибора, устойчив к дезинфицирующим растройствам</p>	443.0755.0
<p>Ножной регулятор вакуума</p>	443.0770.0



ATMOS® Record 55 DDS

ATMOS® Record 55 DDS (2 ёмкости x 3 л)	Артикул
<p>Мобильный хирургический аспиратор для высоких требований, бесшумный, плавный регулятор уровня вакуума; демпфированный вакуумметр, переключатель ёмкостей; держатель ёмкости для системы DDS; разъём для педали включения/выключения.</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>1 Базовый прибор, инструкция пользователя, шнур электропитания, 2 шт. DDS ёмкость для секрета 3 л, 2 шт. крышка для DDS ёмкости в комплекте, 10 шт. DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, 1 шт. шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2,10 м, набор адаптеров для шланга (Ø 6 мм / Ø 10 мм)</p>	444.0930.0
ATMOS® Record 55 DDS (2 ёмкости x 5 л)	444.0940.0
Принадлежности для ATMOS® Record 55 DDS	Артикул
2 DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 1,5 л, автоклавируемая. Высота 146 мм, наружный Ø 166 мм	340.0050.0
3 DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 3 л, автоклавируемая. Высота 247 мм, наружный Ø 166 мм	340.0051.0
4 DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 5 л, автоклавируемая. Высота 396 мм, наружный Ø 166 мм	340.0052.0
<p>5 DDS-крышка для ёмкости, комплект, состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DDS-крышка для ёмкости • DDS-рукоятка для ёмкости • DDS-защита от брызг • DDS-набор адаптеров для шланга, Ø 6+ Ø 10 мм • DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения; • DDS-держатель шланга ёмкости 	340.0040.0
6 DDS-крышка для ёмкости с уплотнителем	340.0053.0
7 DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: серый	340.0055.0
8 DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: синий	340.0326.0
9 DDS-защита от брызг, силикон	340.0056.0
10 DDS- набор адаптеров для шланга Ø 6 мм + Ø 10 мм	340.0057.0
11 DDS-держатель шланга на ёмкости	340.0066.0
12 DDS-адаптер для сборника ткани соединяет DDS-ёмкость со сборником ткани, обработка при температуре до 200 °C	340.0062.0



1 Артикул 444.0930.0



2 Артикул 340.0050.0



3 Артикул 340.0051.0



4 Артикул 340.0052.0



5 Артикул 340.0040.0



6 Артикул 340.0053.0



7 Артикул 340.0055.0



8 Артикул 340.0326.0



9 Артикул 340.0056.0



10 Артикул 340.0057.0



11 Артикул 340.0066.0



12 Артикул 340.0062.0

ATMOS® Record 55


ATMOS® Record 55 с системой стандартных рельс	Артикул
<p>Мобильный хирургический аспиратор для высоких требований, очень тихий процесс работы; встроенный указатель вакуума; плавный регулятор уровня вакуума.</p> <p>Технические данные:</p> <p>1 Мощность прибора 55 ± 3 л./мин.; вакуум - 98 кПа/-735 мм рт.ст. на уровне моря; электропит. 230 В/50-60 Гц. Габариты (ВхШхГ): 940x500x390 мм . Комплект поставки: Базовый прибор, инструкция пользователя, антибактериальный гидрофобный заменяемый фильтр (одноразовый), стандартный рельс 30 x 10 мм, шланг отсасывателя L= 2 м, Ø 6 мм и Ø 10 мм., шнур электропитания 5 м.</p>	443.0700.0
Принадлежности для ATMOS® Record 55 с системой стандартных рельс	Артикул
<p>2 Single-Docking-Station (Сингл-Докинг-Стэйшн) адаптер для навешивания на стандартный рельс ATMOS DDS Внимание: Ёмкость с крышкой необходимо заказать дополнительно!</p>	320.0640.0
<p>3 Крышка для емкости с секретом включая стандартный рельсовый держатель</p>	444.0650.0
<p>4 Набор вставных ниппелей, состоит из двойного вставного ниппеля, переходника для шланга и механического предохранителя от перетекания</p>	444.0640.0
<p>5 Градуированная стеклянная емкость для секрета 1,5 л, высота 192 мм, Ø 115 мм</p>	444.0032.0
<p>6 Градуированная стеклянная емкость для секрета 3 л, высота 247 мм, Ø 145 мм</p>	444.0033.0
<p>7 Градуированная стеклянная емкость для секрета 5 л, высота 302 мм, Ø 169 мм</p>	444.0034.0
<p>8 Предохранительная емкость 250 мл с интегрированным DDS антибактериальным фильтром с защитой от переполнения, включая адаптер для артроскопии (Shaver, Lavagen), челюстно-лицевой хирургии, липосакции и т.д.</p>	444.0646.1
<p>9 Станция переключения вакуума для переключения подачи вакуума между двумя ёмкостями для секрета. Возможен монтаж с адаптером артикул 340.0095.0 на стандартный рельс. Материал: алюминий. Не требуется для системы ёмкостей DDS!</p>	340.0096.0



1 Артикул 443.0700.0



2 Артикул 320.0640.0

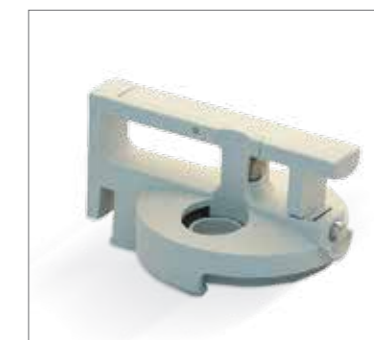

3 Артикул 444.0650.0



4 Артикул 444.0640.0



5 Артикул 444.0032.0



6 Артикул 444.0033.0



7 Артикул 444.0034.0



8 Артикул 444.0646.1



9 Артикул 340.0096.0

Принадлежности

Принадлежности для ATMOS® Record55 и ATMOS® Record55DDS	Артикул
1 Ножной выключатель (включение и выключение прибора)	443.0755.0
2 Ножной регулятор для регулировки уровня вакуума	443.0770.0
3 Держатель шланга для навешивания на стандартный рельс. Материал: высококачественная сталь	320.0611.0
4 Поднос для хранения с держателем для рельсовой направляющей. Материал: высококачественная сталь	443.0790.0



1 Артикул 443.0755.0



2 Артикул 443.0770.0



3 Артикул 320.0611.0



4 Артикул 443.0790.0

Расходные материалы

Расходные материалы	Артикул
1 Шланг аспиратора, силикон, Ø 10 мм, L = 2 м, 1 шт. Обработка при температуре до 200 °С	000.0243.0
2 Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 2 м, 1 шт. Обработка при температуре до 200 °С	000.0361.0
3 DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый. Замена после каждого пациента. При использовании одним пациентом замена в среднем через 2 недели. При сильном загрязнении или при смене пациента заменить немедленно. Упаковка 10 штук.	340.0054.0
4 Сборник для ткани, 300 мл (одноразовый) Ø 6 мм, замена после каждого пациента	340.0061.0
5 Сборник для ткани, 50 мл (одноразовый) Ø 6 мм, замена после каждого пациента	401.0555.0
6 Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, замена после каждого пациента	443.0738.0
7 Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, замена после каждого пациента	444.0628.0



1 Артикул 000.0243.0



3 Артикул 340.0054.0



2 Артикул 000.0361.0



4 Артикул 340.0061.0



5 Артикул 401.0555.0



6 Артикул 443.0738.0



7 Артикул 444.0628.0

Технические характеристики

Технические данные	ATMOS® Record 55 DDS
Производительность	55 л/мин (± 3 л/мин)
Максимальный вакуум	- 98 кПа (-982 мБар / -735 мм рт.ст.) на уровне моря
Потребляемая мощность	100 Вт
Номинальное напряжение	230 В~, 50/60 Гц; Опция: от 100 до 127 В~, 50/60 Гц
Уровень шума	46 дБ (А) @ 1 м (в соответствии с ISO 7779)
Продолжительность работы	Непрерывная эксплуатация
Условия окружающей среды Применение	+ 10.....+32°C; 20...80% влажность воздуха без конденсата при давлении 700...1060 кПа
Габариты (В x Ш x Г)	940 x 500 x 390 мм, без ёмкости
Вес	36 кг, без ёмкости
Классификация	Категория защиты: IPX1; класс защиты: I; тип защиты BF; класс IIa (согласно приложения IX директивы 93/42/EWG)

Указанные технические данные действительны на момент публикации данного каталога, возможны изменения!