



# **BTL-6000**

# **Shortwave 200**

**ВТЛ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ**



<b>1</b>	<b>гинекология и урология</b> .....	<b>4</b>
1.1	аднексит - хронический .....	4
1.2	аменорея.....	5
1.3	везикулит.....	6
1.4	дисменорея.....	7
1.5	мастит.....	8
1.6	миометрит - хронический .....	9
1.7	параметрит.....	10
1.8	простатит.....	11
1.9	яичниковая недостаточность.....	12
<b>2</b>	<b>дерматология</b> .....	<b>13</b>
2.1	гидраденит гнойный (HS).....	13
2.2	обморожение .....	14
2.3	панариций.....	15
2.4	фурункул / карбункул .....	16
<b>3</b>	<b>ЛОР</b> .....	<b>17</b>
3.1	ларингит .....	17
3.2	синусит верхнечелюстной - острый .....	18
3.3	синусит верхнечелюстной - хронический .....	19
3.4	средний отит - хронический .....	20
<b>4</b>	<b>медицина внутренних органов</b> .....	<b>21</b>
4.1	болезнь Рейно .....	21
4.2	бронхит - хронический.....	22
4.3	гепатит (стадия выздоровления).....	23
4.4	запор.....	24
4.5	неявный экссудативный плеврит - хронический .....	25
4.6	перемежающаяся хромота .....	26
4.7	холелитиаз (желчнокаменная болезнь).....	27
<b>5</b>	<b>неврология</b> .....	<b>28</b>
5.1	ишиалгия (ишиодиния).....	28
5.2	люмбаго.....	29
5.3	межрёберная невралгия .....	30
5.4	миалгия .....	31
5.5	мигрень (давящая головная боль) .....	32
5.6	невралгия.....	33
5.7	синдром запястного канала .....	34
<b>6</b>	<b>ортопедия и реабилитация</b> .....	<b>35</b>
6.1	"замороженное плечо" (адгезивный капсулит).....	35
6.2	ахиллодиния .....	36
6.3	Бехтерева болезнь (анкилозирующий спондилоартрит).....	37
6.4	болезнь Рейно .....	38
6.5	бурсит.....	39
6.6	дископатия .....	40
6.7	дистрофия Зудека (РСД) .....	41
6.8	ишиалгия (ишиодиния).....	42
6.9	капсулит .....	43
6.10	контрактура .....	44
6.11	люмбаго.....	45
6.12	менископатия.....	46
6.13	миалгия .....	47
6.14	мигрень (давящая головная боль) .....	48
6.15	остеоартрит - хронический .....	49
6.16	остеохондроз .....	50
6.17	перелом.....	51



<b>6.18</b>	периостит .....	52
<b>6.19</b>	полиартрит - хронический.....	53
<b>6.20</b>	растяжение / вывих / ушиб.....	54
<b>6.21</b>	синдром запястного канала .....	55
<b>6.22</b>	синдром лестничной мышцы (СВ синдром) .....	56
<b>6.23</b>	спондилез (позвоночный артрит) .....	57
<b>6.24</b>	тендовагинит.....	58
<b>6.25</b>	хондромаляция ("колени бегуна") .....	59
<b>6.26</b>	цервикальный синдром.....	60
<b>6.27</b>	эпикондилит ("теннисный локоть") .....	61




# 1 ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ

## 1.1 АДНЕКСИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ


### ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ

<i>Програма</i>	D-1300 Программа: D-1300~ аднексит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 100 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) стороны
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	воспаление придатков матки, яичников
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. (1779)

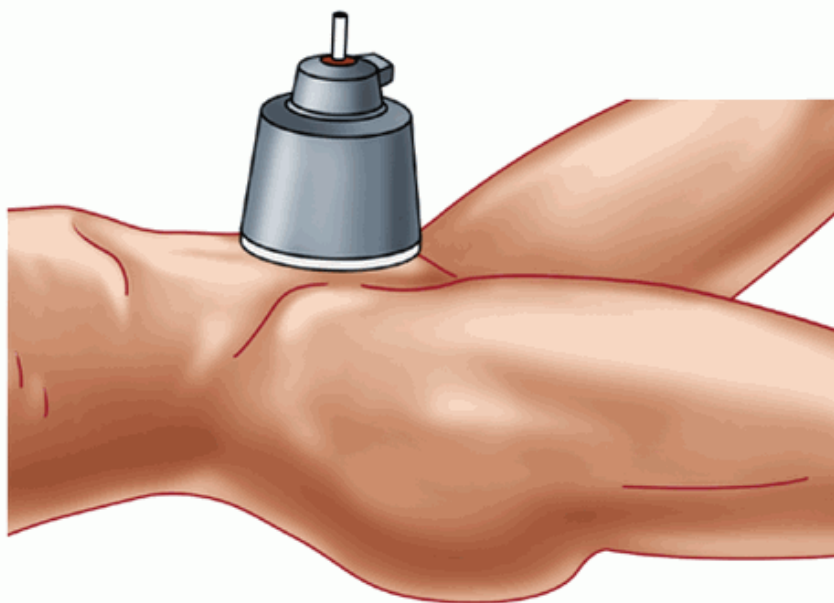


## 1.2 АМЕНОРЕЯ

<i>Программа</i>	D-1301 Программа: D-1301~ аменорея
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) стороны
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	Отсутствие менструаций у женщины репродуктивного возраста
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. (1780)

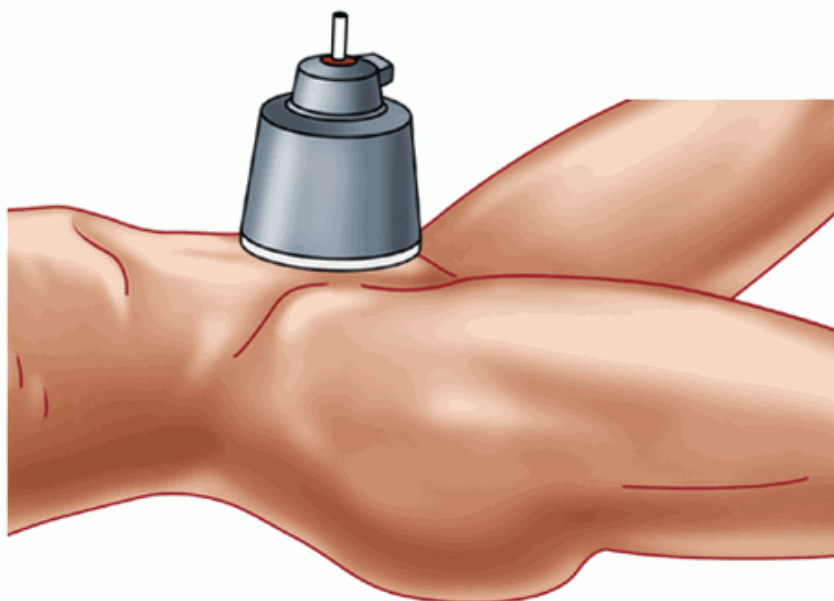


## 1.3 ВЕЗИКУЛИТ

<i>Программа</i>	D-1308 Программа: D-1308~ везикулит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) стороны
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	12
<i>Описание</i>	воспаление и заражение семенных пузырьков в мужских половых путях
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Гениталии должны находиться за пределами диэлектрического поля. (1787)

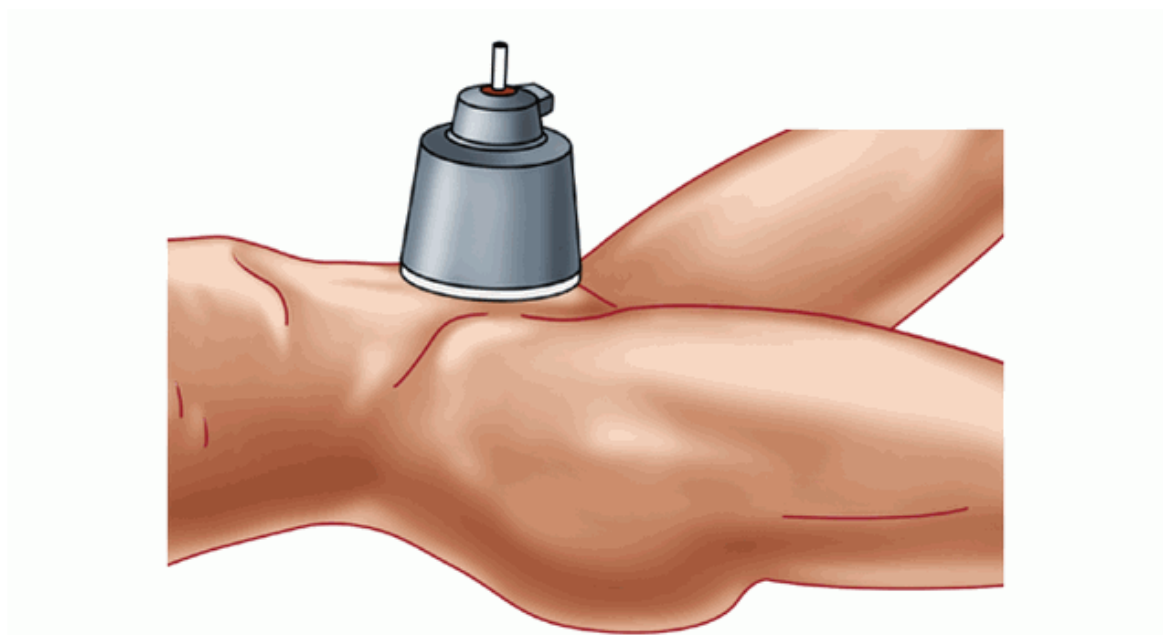


## 1.4 ДИСМЕНОРЕЯ

<i>Програма</i>	D-1302 Программа: D-1302~ дисменорея
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) стороны
<i>Время применения</i>	риблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Колличество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	болезненная менструация
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. Начинать через 6 дней после менструации. (1781)

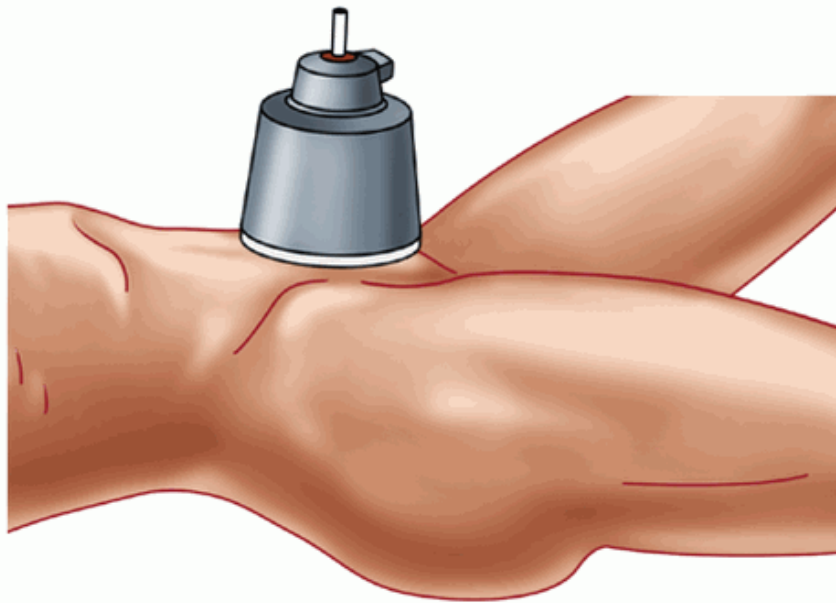

## 1.5 МАСТИТ


<i>Программа</i>	D-1304 Программа: D-1304~ мастит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с вентральной стороны
<i>Время применения</i>	2 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 7
<i>Описание</i>	воспаление молочной железы; результатом является воспаление, покраснение, чувствительность и боль
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Применяйте низкий уровень мощности и более короткую продолжительность терапии, если не точно определена хроническая стадия. (1783)

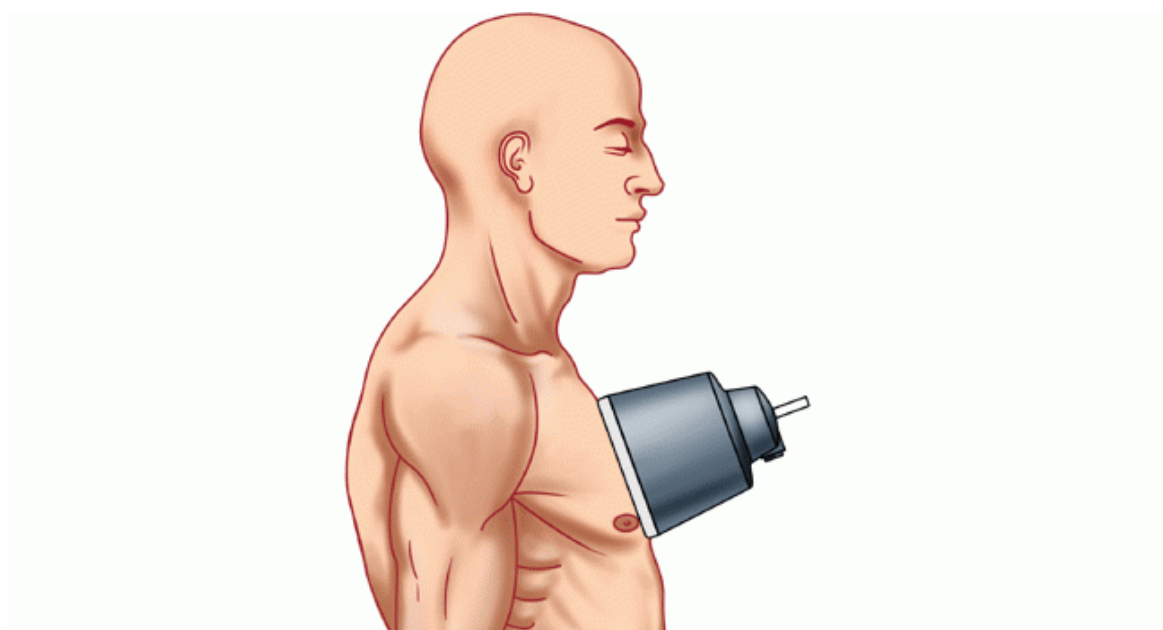




## 1.6 МИОМЕТРИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ

<i>Программа</i>	D-1305 Программа: D-1305~ миометрит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 200 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) стороны
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	воспаление мышечной стенки матки (миометрия)
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. (1784)

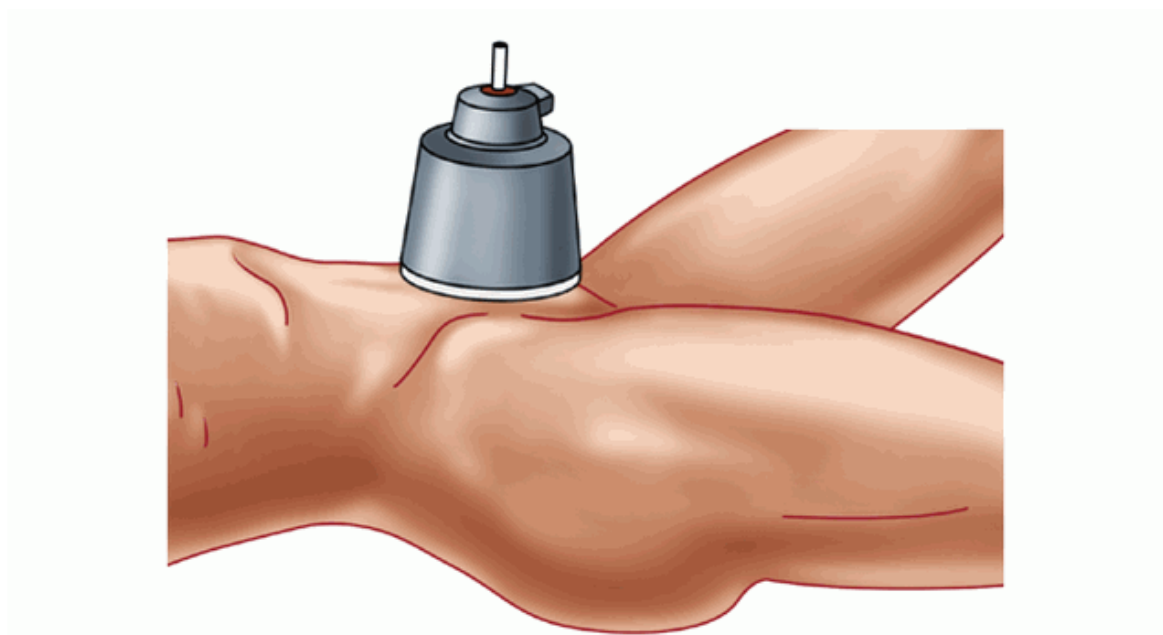


## 1.7 ПАРАМЕТРИТ

<i>Програма</i>	D-1306 Программа: D-1306~ параметрит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) стороны
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	воспаление рыхлой ткани матки (параметрия)
<i>Эффект</i>	расслабляющий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. (1785)

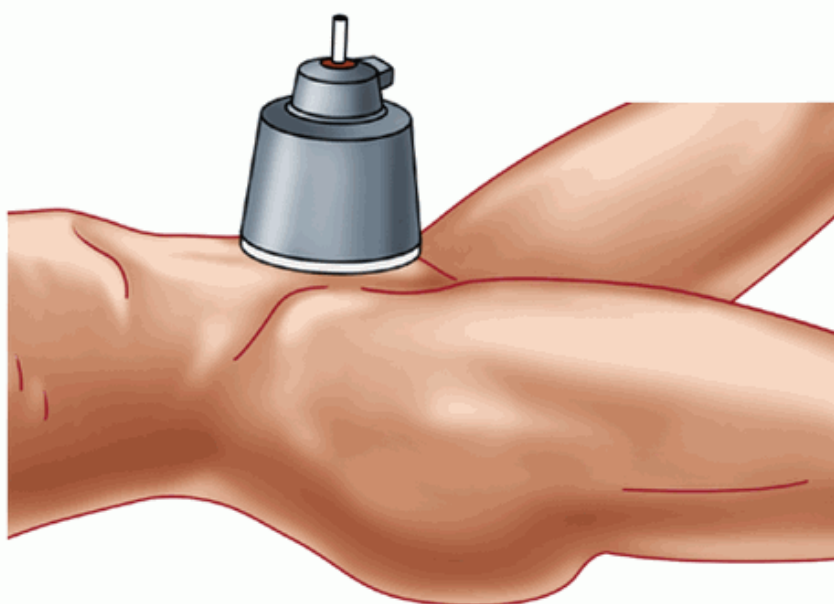


## 1.8 ПРОСТАТИТ

<i>Программа</i>	D-1307 Программа: D-1307~ простатит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 300 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) стороны
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	12
<i>Описание</i>	любая форма воспаления предстательной железы
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Держите гениталии за пределами диэлектрического поля. Со спинной стороны может быть использован резиновый аппликатор. (1786)

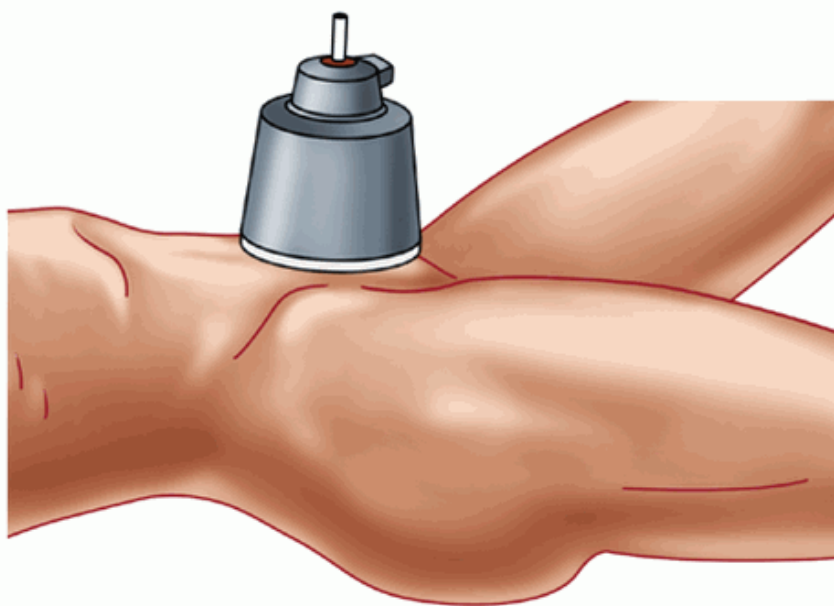

## 1.9 ЯИЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

<i>Программа</i>	D-1303 Программа: D-1303~ яичниковая недостаточность
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 80 частота импульса: 150 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) стороны
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	недостаточная функция яичников, ведущая к аменорее, олигоменорее, или к аномальному дисфункциональному маточному кровотечению; патология беременности
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. Начинать через 6 дней после менструации. (1782)

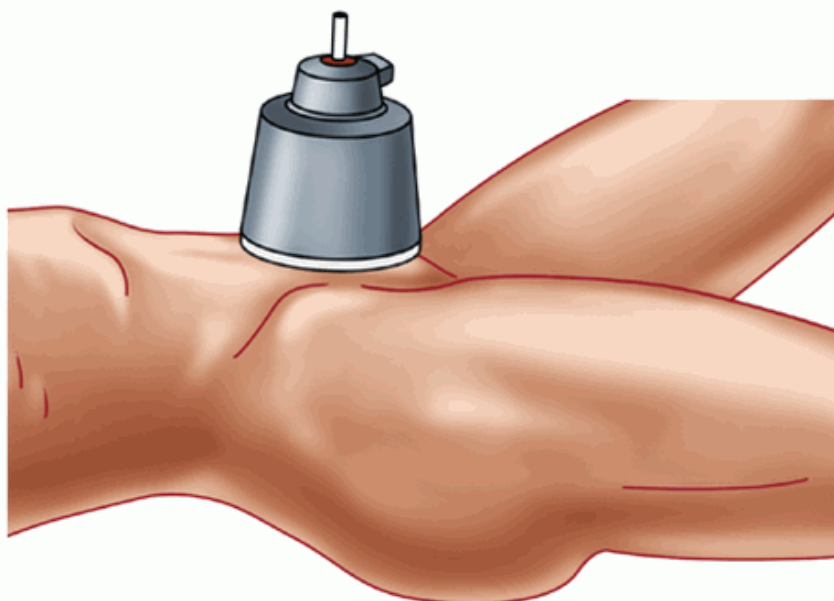


## 2 ДЕРМАТОЛОГИЯ

### 2.1 ГИДРАДЕНИТ ГНОЙНЫЙ (HS)


ДЕРМАТОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-1203 Программа: D-1203~ гидраденит гнойный (HS)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на очаг поражения (подмышка)
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	кожная болезнь, поражающая области потовых желез и волосяных луковиц; проявляется в виде болезненных абсцессов (гнойников)
<i>Эффект</i>	повышение эффекта заживления (1776)

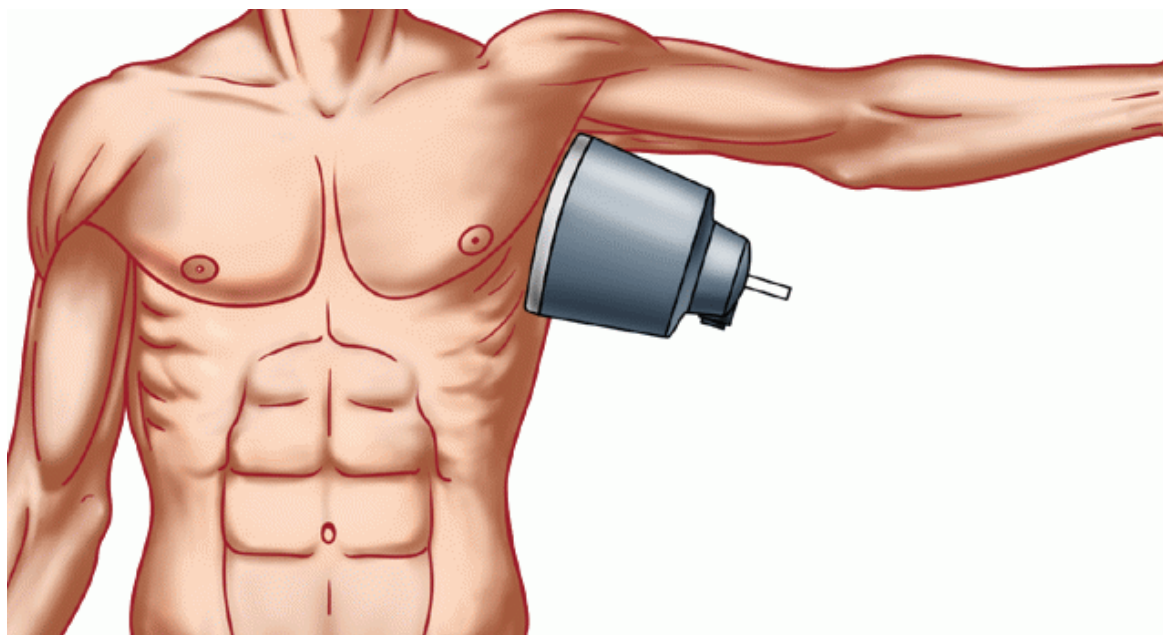


## 2.2 ОБМОРОЖЕНИЕ

<i>Программа</i>	D-1202 Программа: D-1202~ обморожение
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на поражённой области (кисть, стопа...)
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	поражение, нанесённое коже и тканям вследствие крайне сильного охлаждения
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Применяйте короткую продолжительность (5 мин.) при ранней стадии, длительную (10 мин.) - при поздней стадии. (1775)

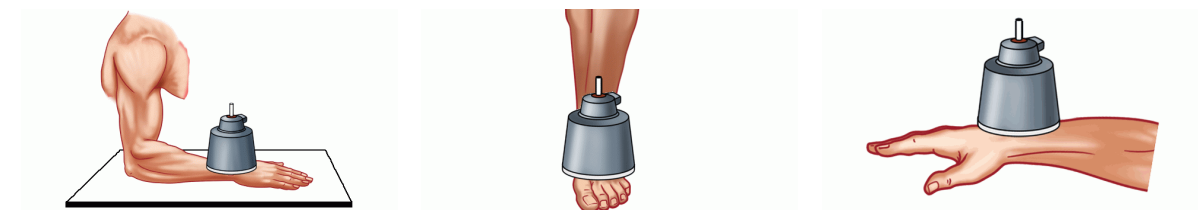

## 2.3 ПАНАРИЦИЙ


<i>Програма</i>	D-1204 Программа: D-1204~ панариций
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на очаг поражения
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	гнойное воспаление на пальцах и кисти
<i>Эффект</i>	противовоспалительный (1777)

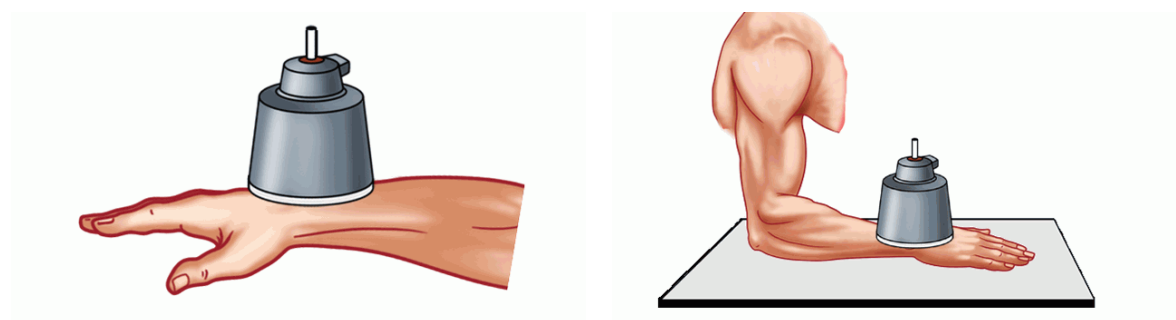

## 2.4 ФУРУНКУЛ / КАРБУНКУЛ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-1200 Программа: D-1200~ фурункул / карбункул
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 80 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на очаге поражения
<i>Время применения</i>	2 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	2
<i>Описание</i>	заражение волосяной луковицы
<i>Эффект</i>	ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Более длительные процедуры или более высокий уровень мощности может спровоцировать распространение. Открытые очаги поражения должны быть подсушены, чтобы избежать их прижигания. (1774)

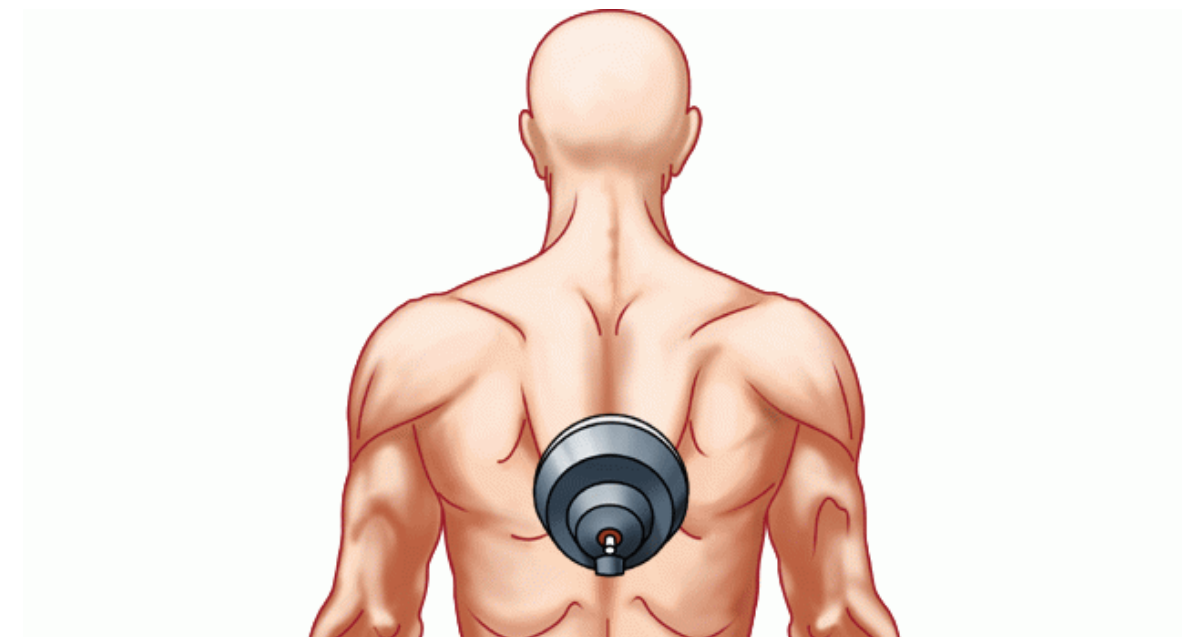




## 3 ЛОР

### 3.1 ЛАРИНГИТ

ЛОР


<i>Програма</i>	D-1400 Программа: D-1400~ ларингит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 300 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области гортани
<i>Время применения</i>	2 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	5
<i>Описание</i>	воспаление и опухание гортани
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови (1789)

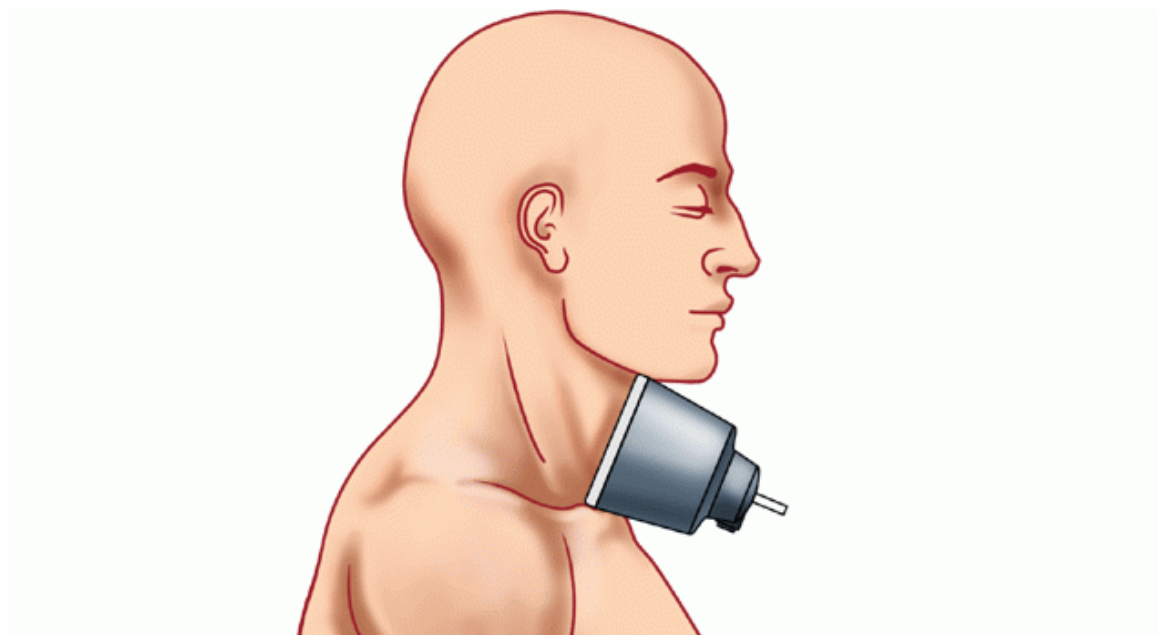

## 3.2 СИНУСИТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ - ОСТРЫЙ

ЛОР


<i>Программа</i>	D-1402 Программа: D-1402~ синусит верхнечелюстной - острый
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 110 частота импульса: 300 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на уровне носовых пазух
<i>Время применения</i>	2 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	5
<i>Описание</i>	воспаление придаточных пазух носа
<i>Эффект</i>	ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Разогревающая терапия на эмпиемах (нарывах) не рекомендована. (1791)

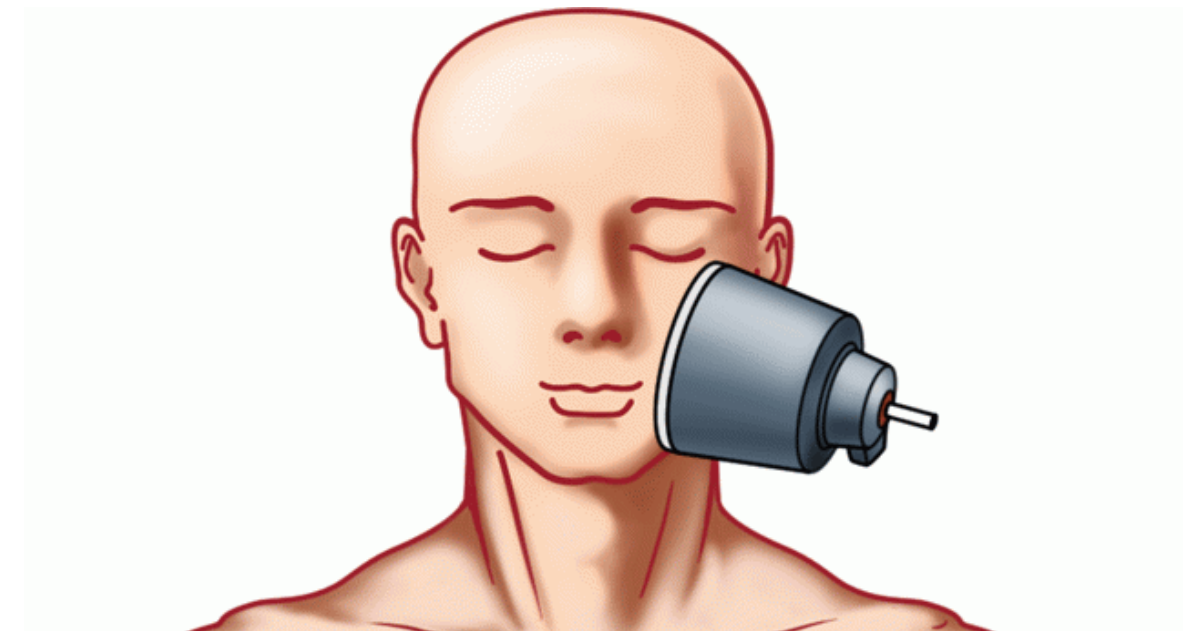

### 3.3 СИНУСИТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ - ХРОНИЧЕСКИЙ

ЛОР


<i>Программа</i>	D-1403 Программа: D-1403~ синусит верхнечелюстной - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 400 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на уровне носовых пазух
<i>Время применения</i>	7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление придаточных пазух носа
<i>Эффект</i>	ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Разогревающая терапия на эмпиемах (нарывах) не рекомендована. (1792)

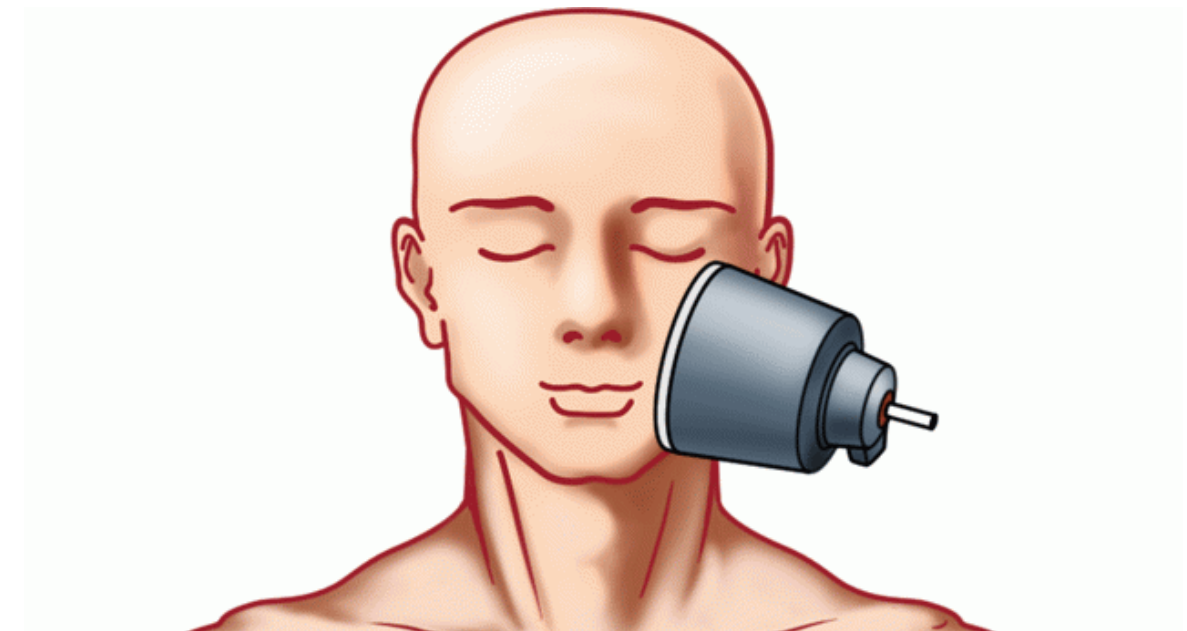

### 3.4 СРЕДНИЙ ОТИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ

ЛОР

<i>Программа</i>	D-1401 Программа: D-1401~ средний отит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 300 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на ушах
<i>Время применения</i>	3 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Количество сеансов</i>	5
<i>Описание</i>	заражение или воспаление среднего уха
<i>Эффект</i>	обезболивающий, ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. (1790)

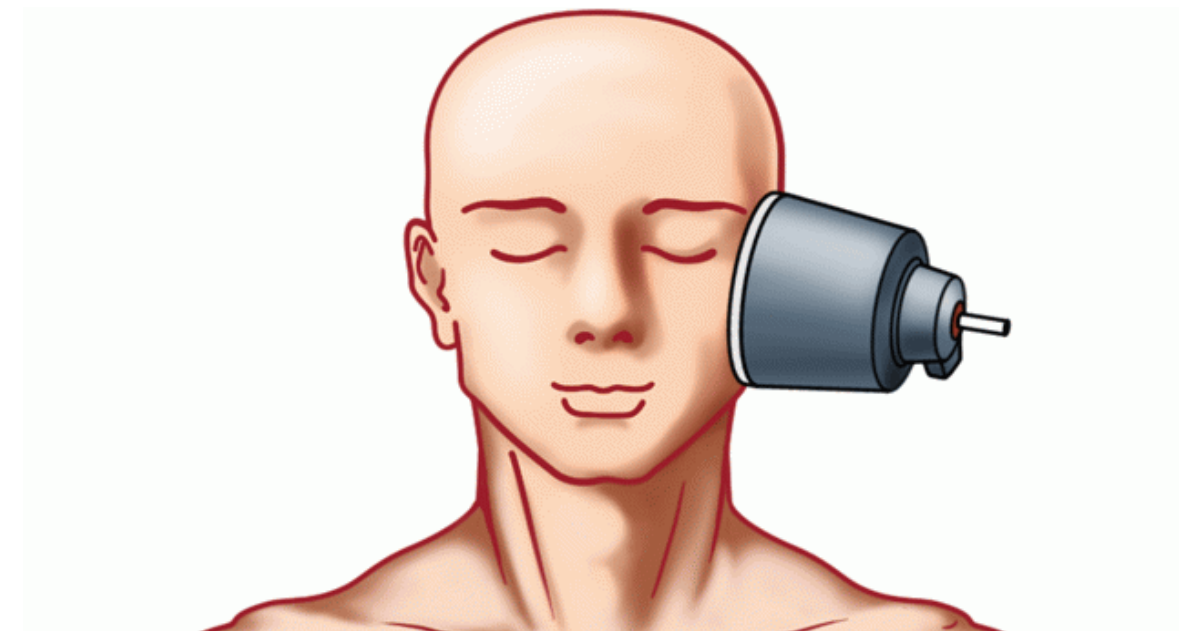


## 4 МЕДИЦИНА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

### 4.1 БОЛЕЗНЬ РЕЙНО


#### МЕДИЦИНА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

<i>Программа</i>	D-1506 Программа: D-1506~ болезнь Рейно
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	рука
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	состояние, при котором поражается кровоток на конечности, пальцы рук, пальцы ног, нос и уши, если они подвержены влиянию изменений температуры или стресса
<i>Эффект</i>	местное улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применять при острой стадии. (1800)

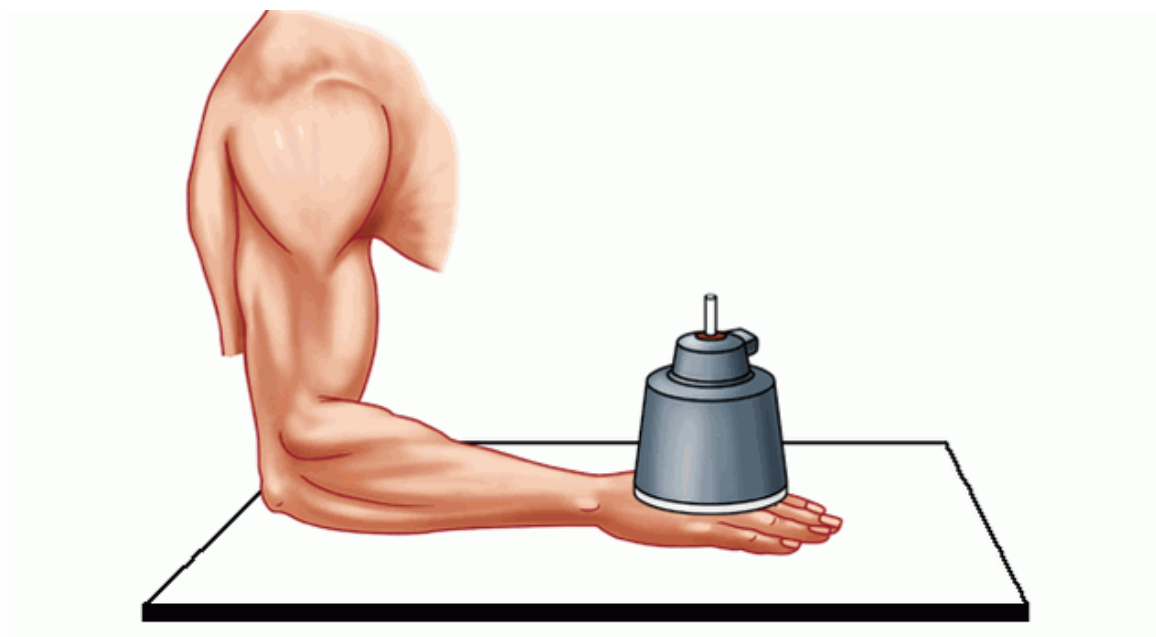


## 4.2 БРОНХИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ

<i>Программа</i>	D-1500 Программа: D-1500~ бронхит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 80 частота импульса: 160 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области грудной клетки: с вентральной стороны
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	8
<i>Описание</i>	воспаление воздушных путей в лёгких
<i>Эффект</i>	отделение мокроты, ослабление бронхоспазма
<i>Примечание</i>	В случае гнойной мокроты применяйте только уровень мощности 1, продолжительность терапии максимум 3 мин, при общем достаточном количестве сеансов - 6. При хроническом обструктивном бронхите может быть применён уровень мощности 2 и более долгая продолжительность процедуры. (1794)

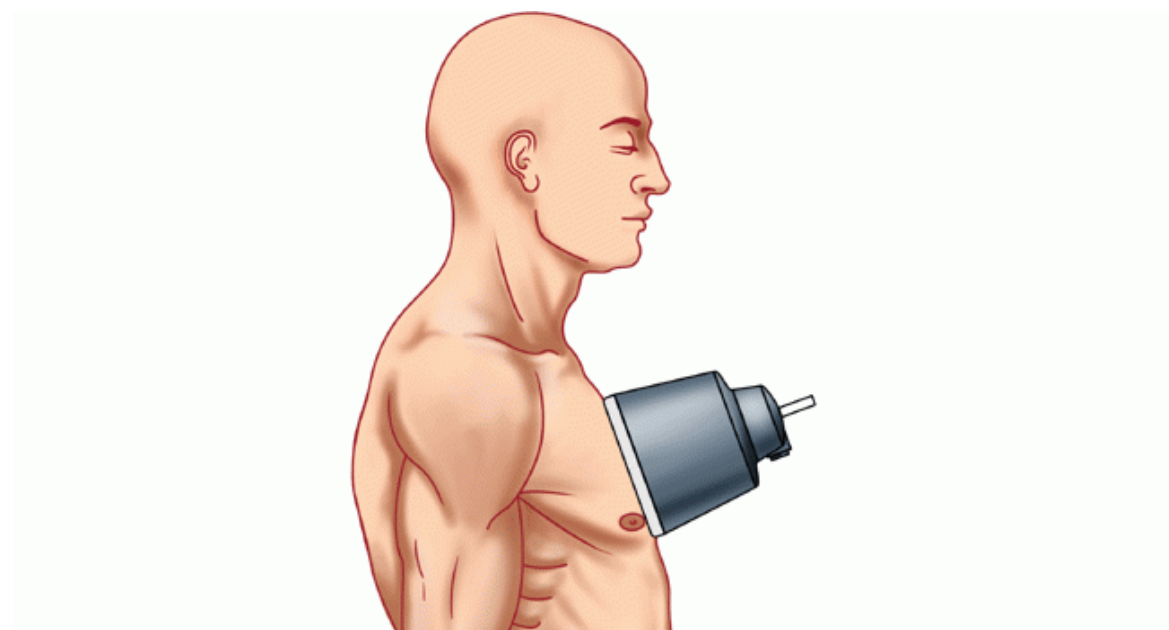


### 4.3 ГЕПАТИТ (СТАДИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ)

<i>Программа</i>	D-1502 Программа: D-1502~ гепатит (стадия выздоровления)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 70 частота импульса: 110 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с вентральной стороны
<i>Время применения</i>	6 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	инфекционная заболевание печени, вызванное вирусом гепатита (вирус гепатита А)
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Применять не ранее стадии выздоровления! Лучше применять в горизонтальном положении. (1796)

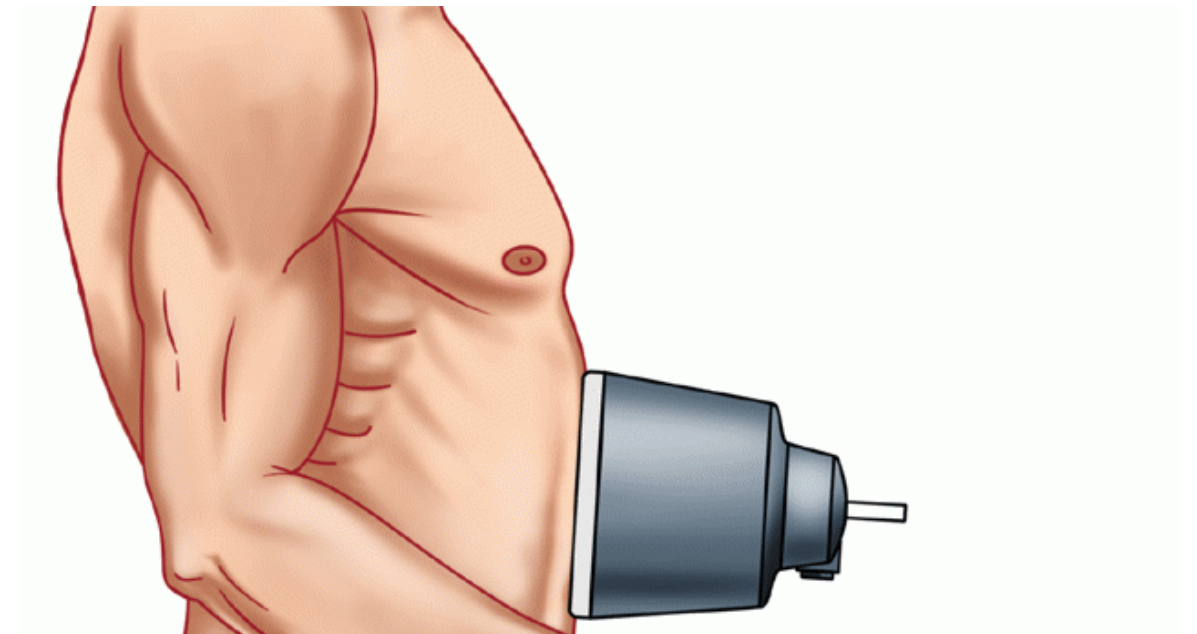

## 4.4 ЗАПОР

<i>Програма</i>	D-1503 Программа: D-1503~ запор
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 110 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в брюшной области: с вентральной стороны
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	5
<i>Описание</i>	состояние пищеварительной системы, при которой у человека случаются затруднения с опорожнением
<i>Эффект</i>	стимуляция мышечного тонуса
<i>Примечание</i>	Будьте уверены в диагнозе перед началом терапии! (1797)

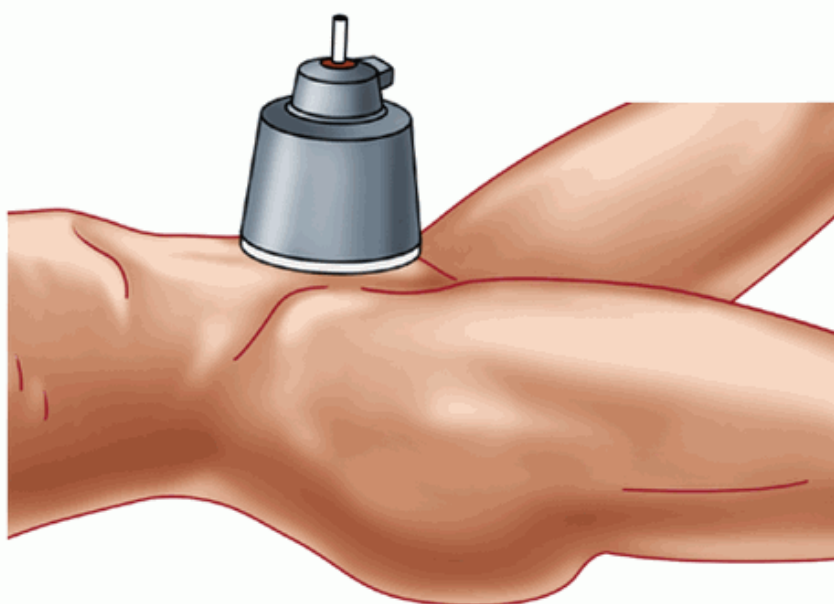




## 4.5 НЕЯВНЫЙ ЭКСУДАТИВНЫЙ ПЛЕВРИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ


### МЕДИЦИНА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

<i>Программа</i>	D-1504 Программа: D-1504~ неявный экссудативный плеврит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 80 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области грудной клетки: с дорсальной стороны
<i>Время применения</i>	приблиз-но 3 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление плевры
<i>Эффект</i>	противовоспалительный, улучшение циркуляции крови и ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Не применяйте при туберкулёзе. (1798)

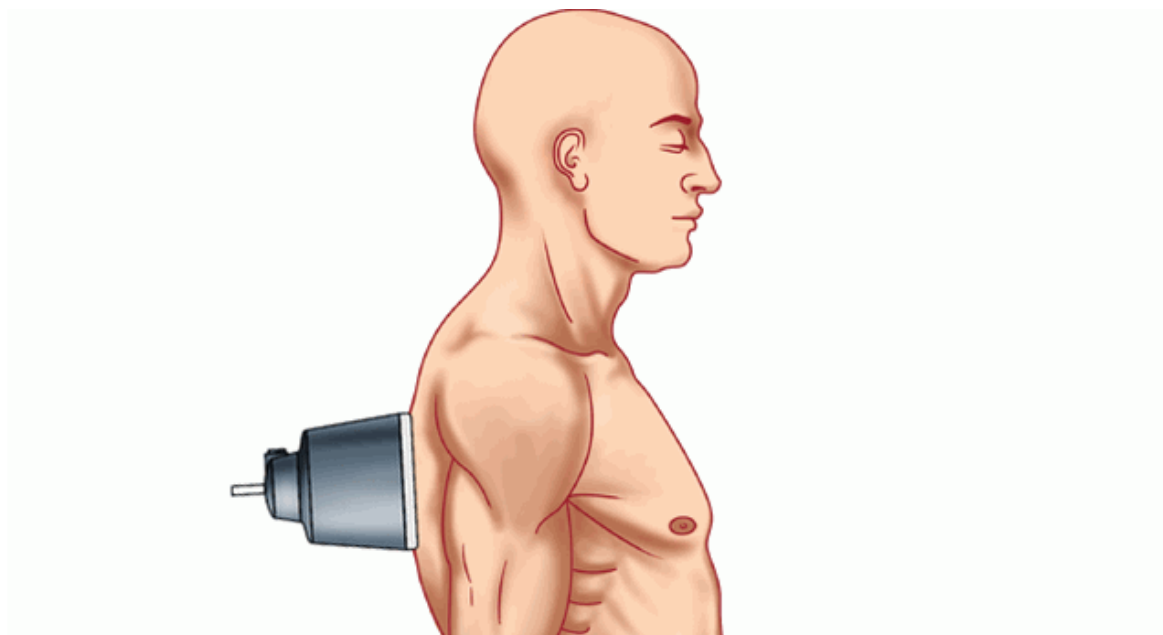

## 4.6 ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ХРОМОТА


<i>Программа</i>	D-1505 Программа: D-1505~ перемежающаяся хромота
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на колене
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	притупление чувствительности в ногах, которое имеет место в течение упражнения или прогулки и проявляется как результат снижения обогащения кислородом
<i>Эффект</i>	противовоспалительный, улучшение циркуляции крови и ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. (1799)

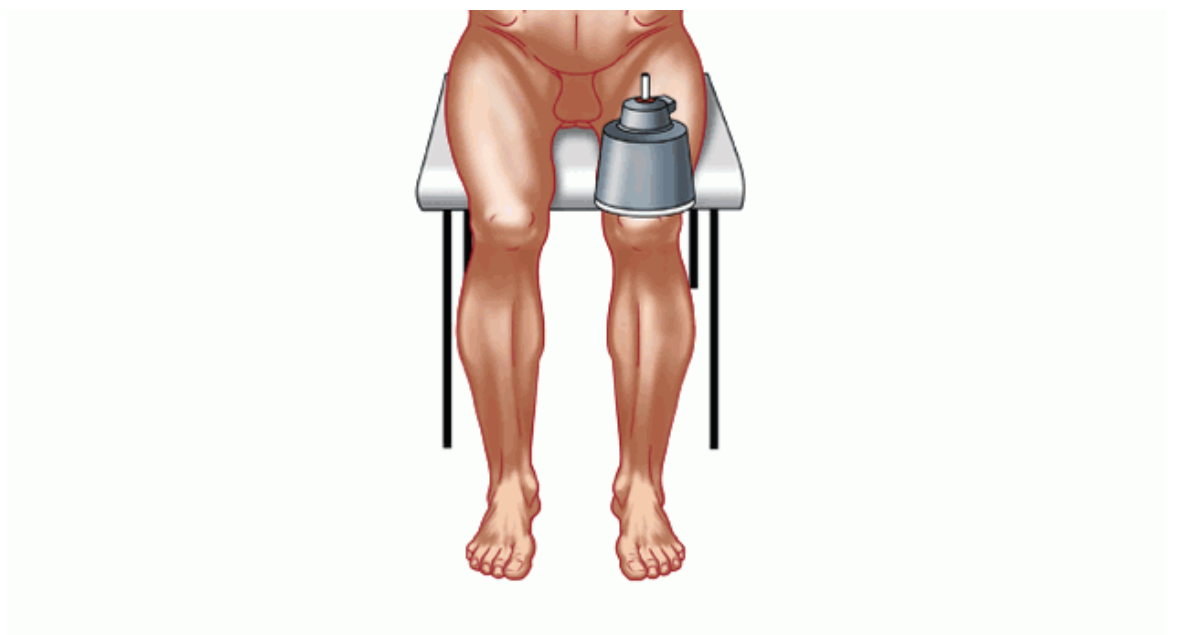

## 4.7 ХОЛЕЛИТИАЗ (ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ)

### МЕДИЦИНА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

<i>Программа</i>	D-1501 Программа: D-1501~ холелитиаз (желчнокаменная болезнь)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 70 частота импульса: 150 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с вентральной стороны
<i>Время применения</i>	3 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	присутствие камней в желчном пузыре
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Это рекомендация для послеоперационной стадии. Не предназначено как лечение от камней в желчном пузыре. (1795)

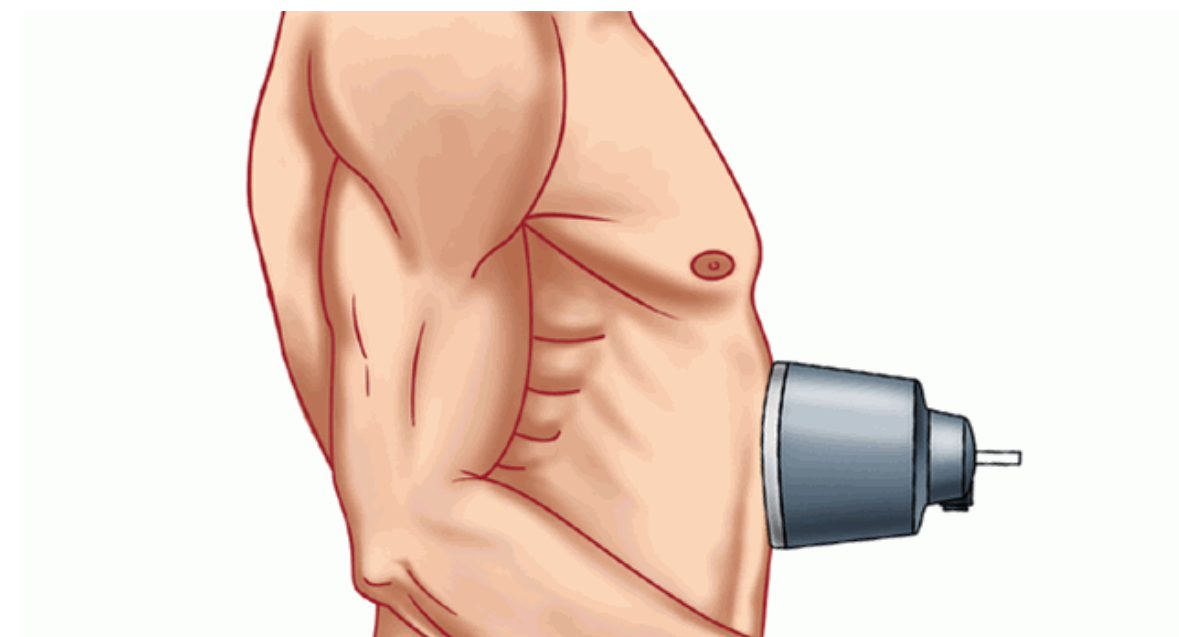


## 5 НЕВРОЛОГИЯ

### 5.1 ИШИАЛГИЯ (ИШИОДИНИЯ)


НЕВРОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-1101 Программа: D-1101~ ишиалгия (ишиодиния)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	аппликатор на болезненных областях
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	12
<i>Описание</i>	боль в седалищной кости (бедре), на окончании седалищного нерва
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий
<i>Примечание</i>	Применяйте разогревающую терапию, только если это приемлемо для пациента. Не применяйте при острой стадии. (1767)

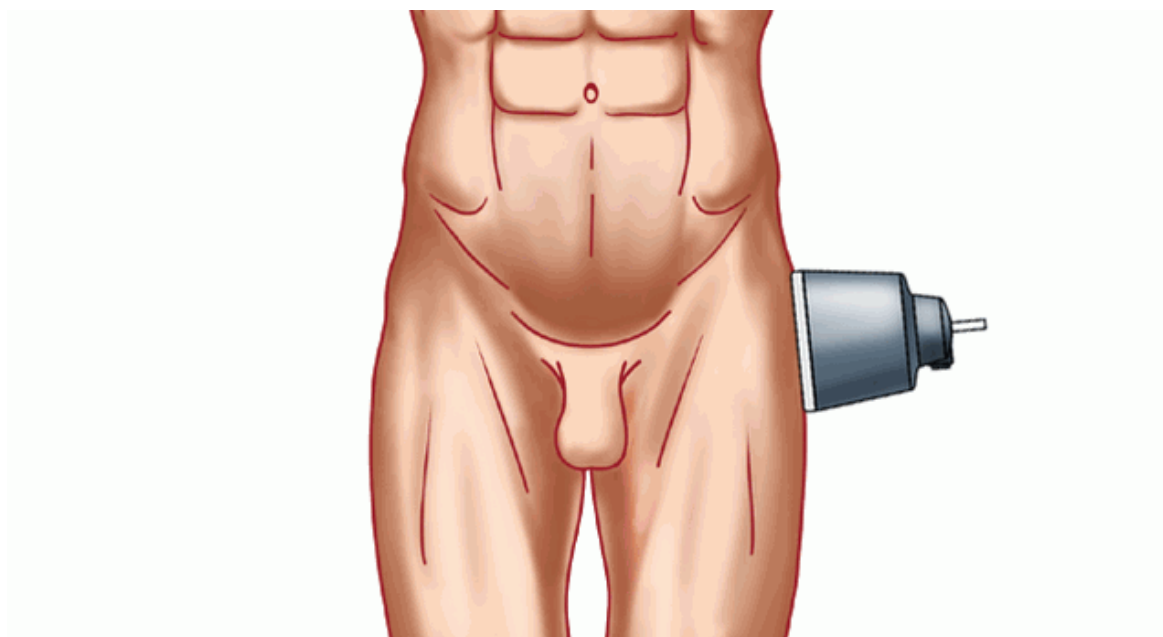


## 5.2 ЛЮМБАГО

<i>Программа</i>	D-1102 Программа: D-1102~ люмбаго
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на нижней части спины (пояснице)
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	7
<i>Описание</i>	Боль в нижней области спины (пояснице). Подобная боль может также отдавать в ягодицах, бедре (-ах), ноге (-ах)
<i>Эффект</i>	расслабляющий
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Используйте только при переносимости для пациента. (1768)

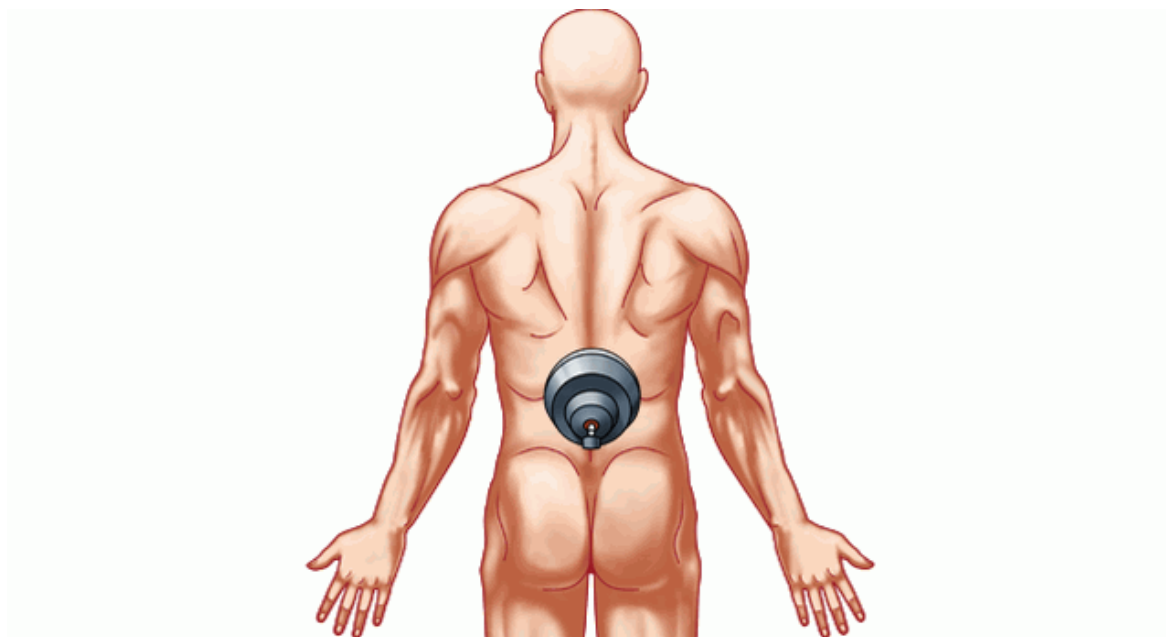


## 5.3 МЕЖРЁБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ

<i>Программа</i>	D-1100 Программа: D-1100~ межрёберная невралгия
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на позвоночнике
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Нервная боль, которая происходит вокруг рёбер, дыхание может быть затруднённым
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий
<i>Примечание</i>	Применяйте разогревающую терапию только если это приемлемо для пациента. (1766)

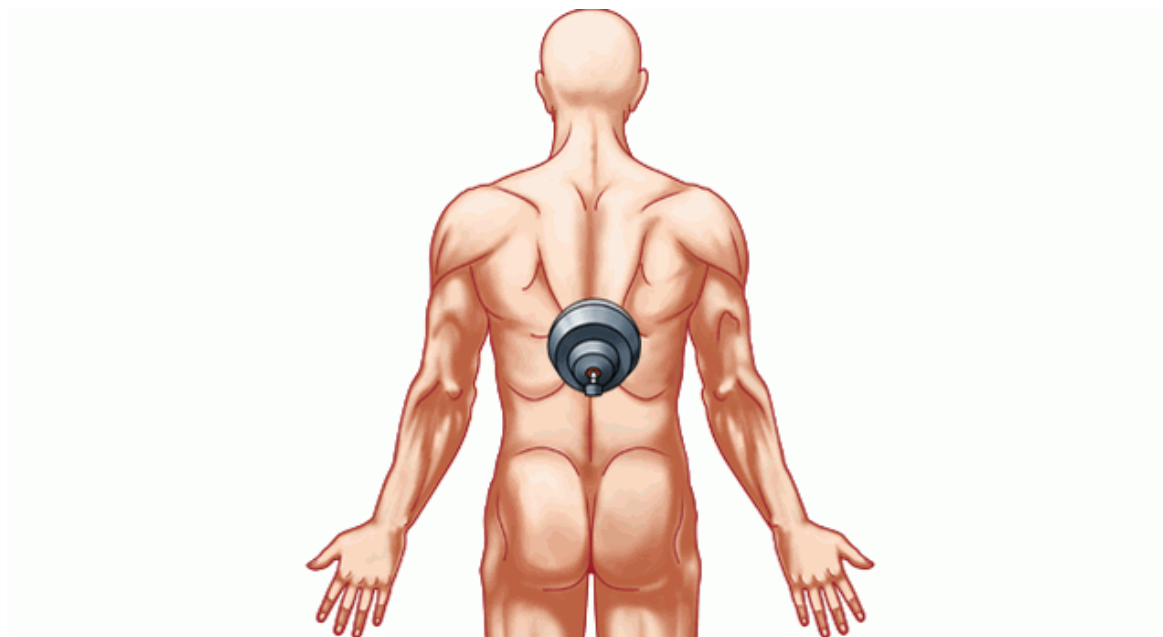

## 5.4 МИАЛГИЯ


<i>Программа</i>	D-1103 Программа: D-1103~ миалгия
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на поражённых мышцах
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Мышечная боль, и симптом множества болезней и расстройств. Самой распространённой причиной миалгии является переутомление мышцы.
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Только при переносимости для пациента. (1769)

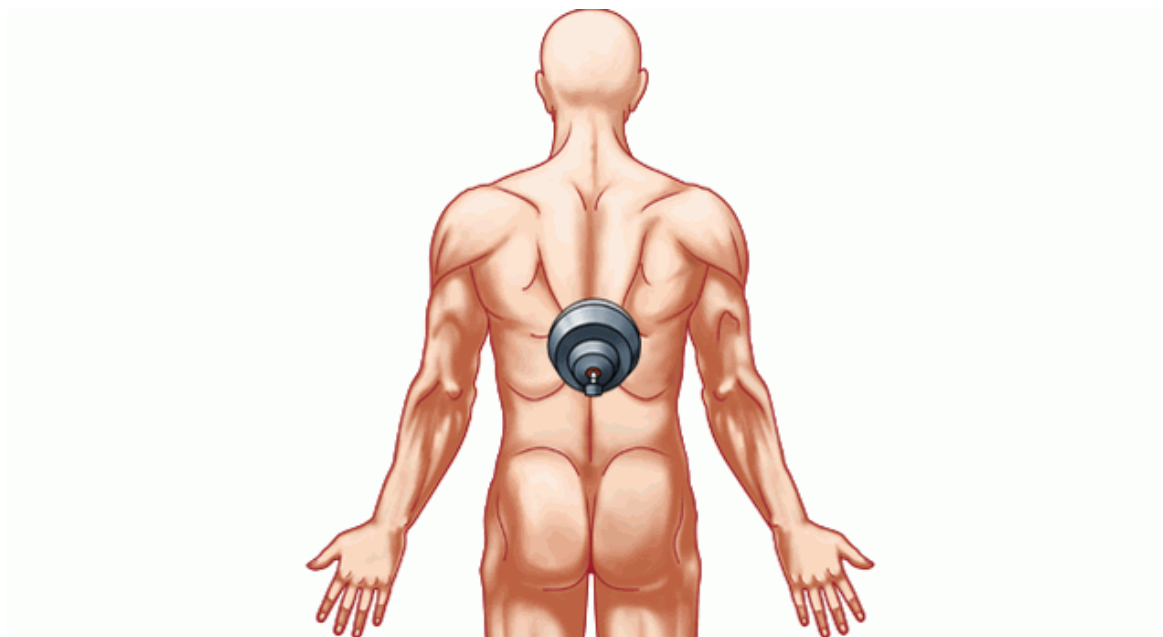

## 5.5 МИГРЕНЬ (ДАВЯЩАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ)

НЕВРОЛОГИЯ


<i>Программа</i>	D-1106 Программа: D-1106~ мигрень (давящая головная боль)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 110 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на 3-ем шейном позвонке
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	напряжение в подзатылочных связках, результатом чего является пульсирующая боль, обычно гомолатеральная
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезоливающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Используйте только при переносимости для пациента. Не при острых, болезненных стадиях. (1772)

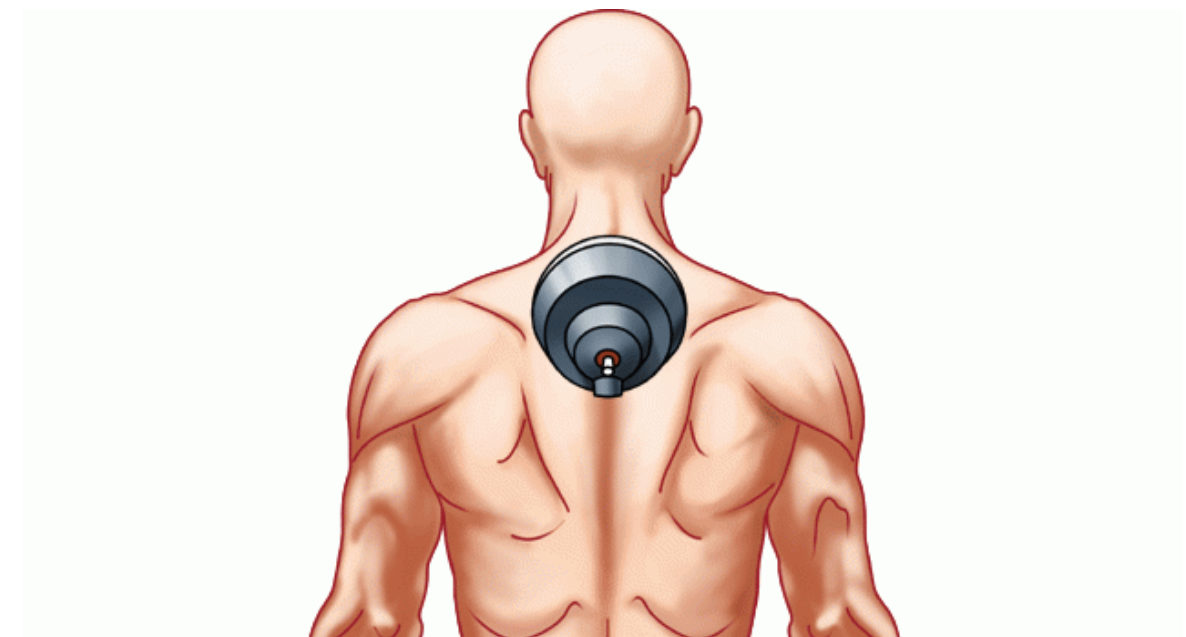



## 5.6 НЕВРАЛГИЯ


<i>Программа</i>	D-1104 Программа: D-1104~ невралгия
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 110 частота импульса: 400 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	расположение вдоль больного нервного окончания
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Болезненное расстройство нервов. Боль можно описать как "резкую", "острую", "как молния", "нестерпимую", и иногда "зудящую"
<i>Эффект</i>	обезболивающий (1770)

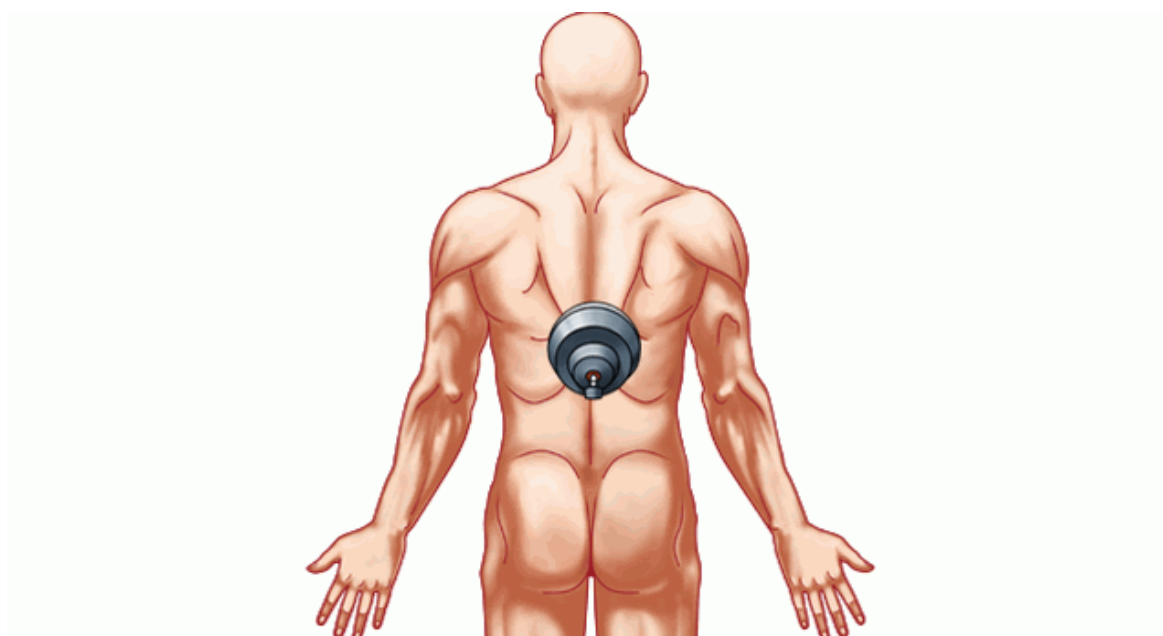

## 5.7 СИНДРОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА

НЕВРОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-1105 Программа: D-1105~ синдром запястного канала
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 110 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	запястье с пальмарной (ладонной) стороны
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Срединный нерв зажат в области запястья и результатом является боль, парестезия и мышечная слабость в руке.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, ускорение заживления, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. Применяйте только при хронической стадии. (1771)

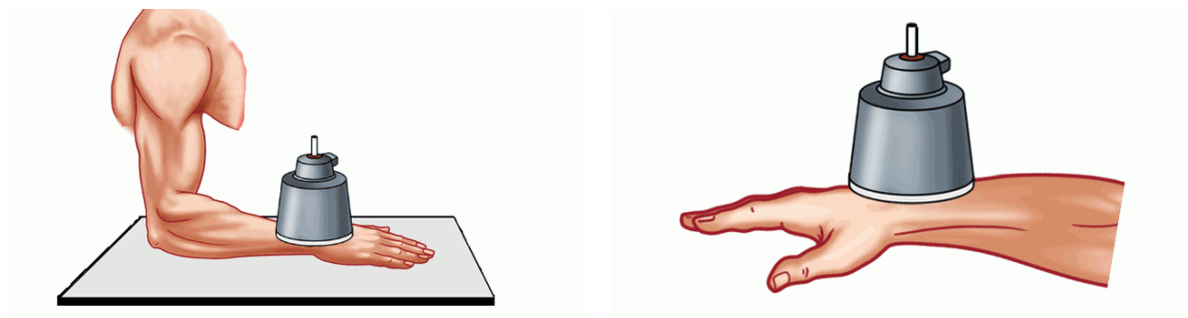


## 6 ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

### 6.1 "ЗАМОРОЖЕННОЕ ПЛЕЧО" (АДГЕЗИВНЫЙ КАПСУЛИТ)

#### ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

<i>Программа</i>	D-1011 Программа: D-1011~ "замороженное плечо" (адгезивный капсулит)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 400 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	по сторонам сустава
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Количество сеансов</i>	15
<i>Описание</i>	Боль и потеря подвижности или оцепенение в плече.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не используйте при острой стадии. (1747)

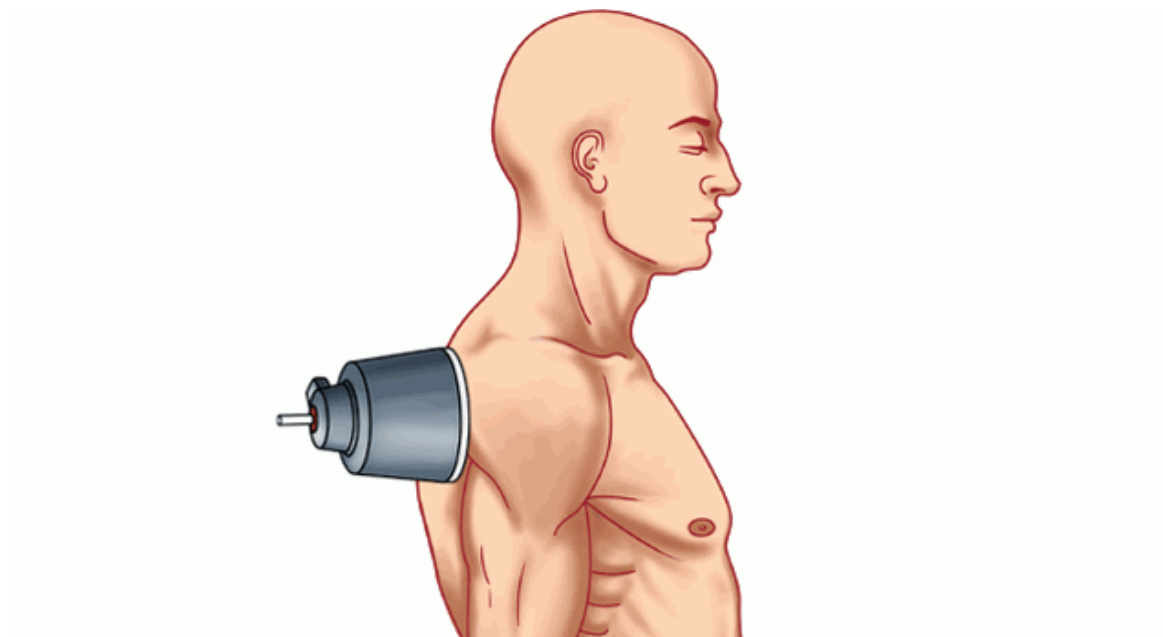

## 6.2 АХИЛЛОДИНИЯ


<i>Програма</i>	D-1002 Программа: D-1002~ ахиллодиния
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 100 частота импульса: 500 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам Ахиллова сухожилия
<i>Время применения</i>	приблиз-но 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Колличество сеансов</i>	приблиз-но 15
<i>Описание</i>	Воспаление Ахиллова сухожилия. Результатом является боль в этой области.
<i>Эффект</i>	Противовоспалительный, обезболивающий, снятие мышечного напряжения
<i>Примечание</i>	Возможно использовать уровень силы 1 в течение 2-х минут, при воспалённом состоянии. (1740)



## 6.3 БЕХТЕРЕВА БОЛЕЗНЬ (АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ))


### ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

<i>Программа</i>	D-1003 Программа: D-1003~ Бехтерева болезнь (анкилозирующий спондилоартрит))
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	Продольное прикладывание на позвоночник
<i>Время применения</i>	15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Потеря подвижности позвоночных сочленений. Результатом следует болезненное и затруднительное движение.
<i>Эффект</i>	Противовоспалительный, обезболивающий, локальное улучшение циркуляции крови, снятие мышечного напряжения (1741)

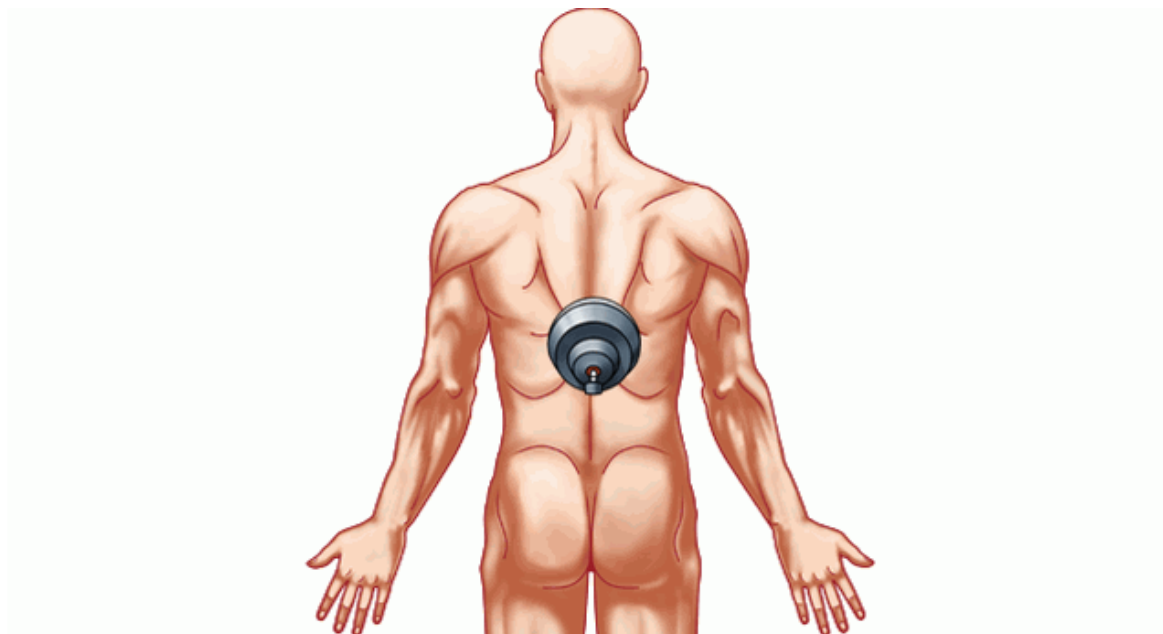


## 6.4 БОЛЕЗНЬ РЕЙНО

<i>Программа</i>	D-1013 Программа: D-1013~ болезнь Рейно
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	рука
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Пораженный кровоток на конечности, пальцы рук, пальцы ног, нос и уши, если они подвержены влиянию изменений температуры или стресса
<i>Эффект</i>	местное улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию в острой стадии. (1749)

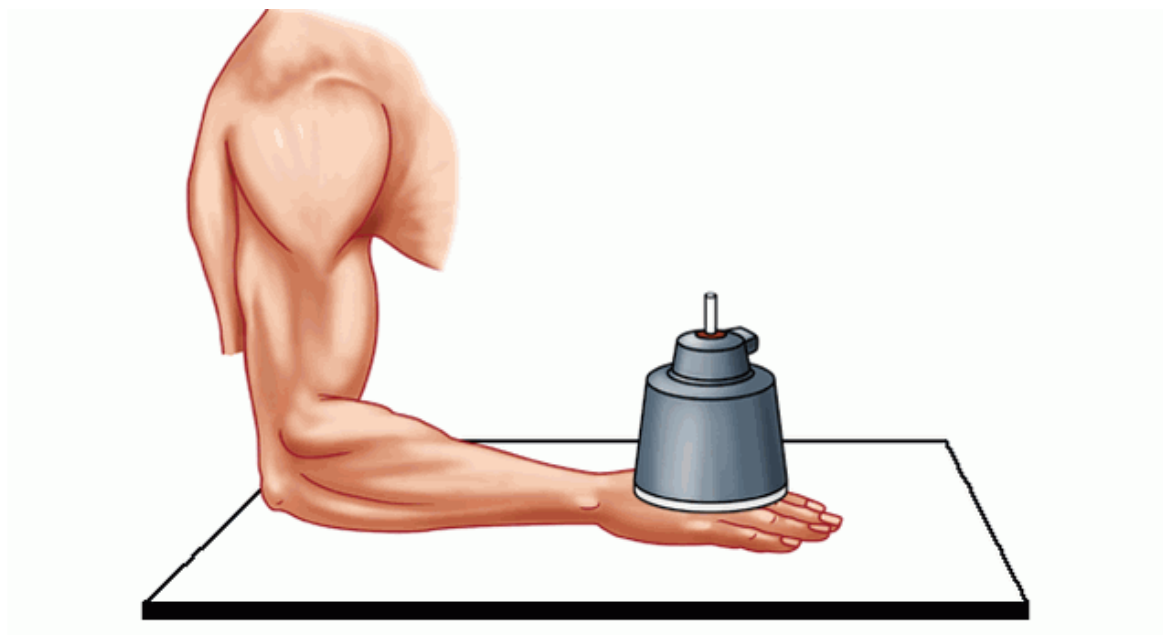


## 6.5 БУРСИТ

<i>Программа</i>	D-1004 Программа: D-1004~ бурсит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 100 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	над суставом
<i>Время применения</i>	12 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление слизистой сумки, или кисты синовиальной жидкости
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Используйте при подострой стадии, не при острой. (1742)

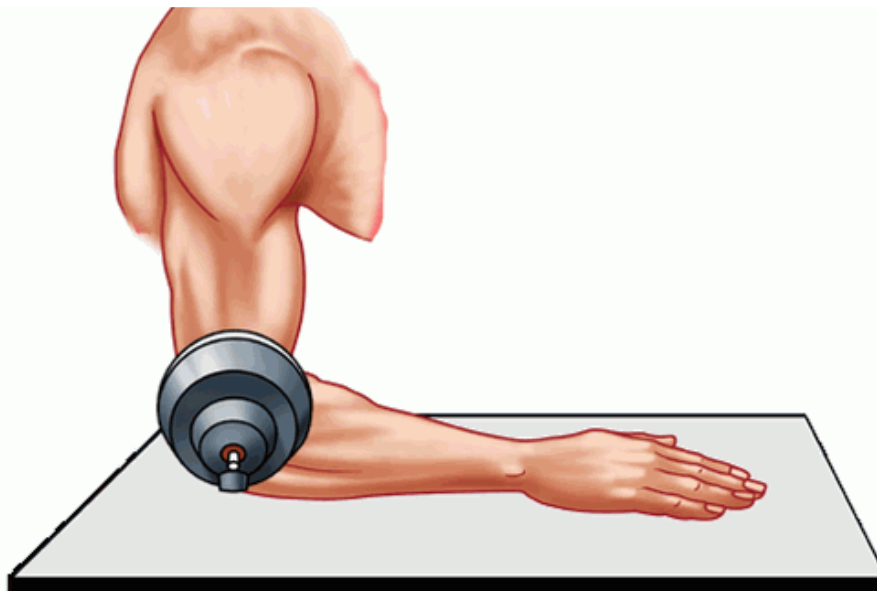

## 6.6 ДИСКПАТИЯ


<i>Програма</i>	D-1022 Программа: D-1022~ дископатия
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольно на позвоночник
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применять при острой болезненной стадии. (1758)

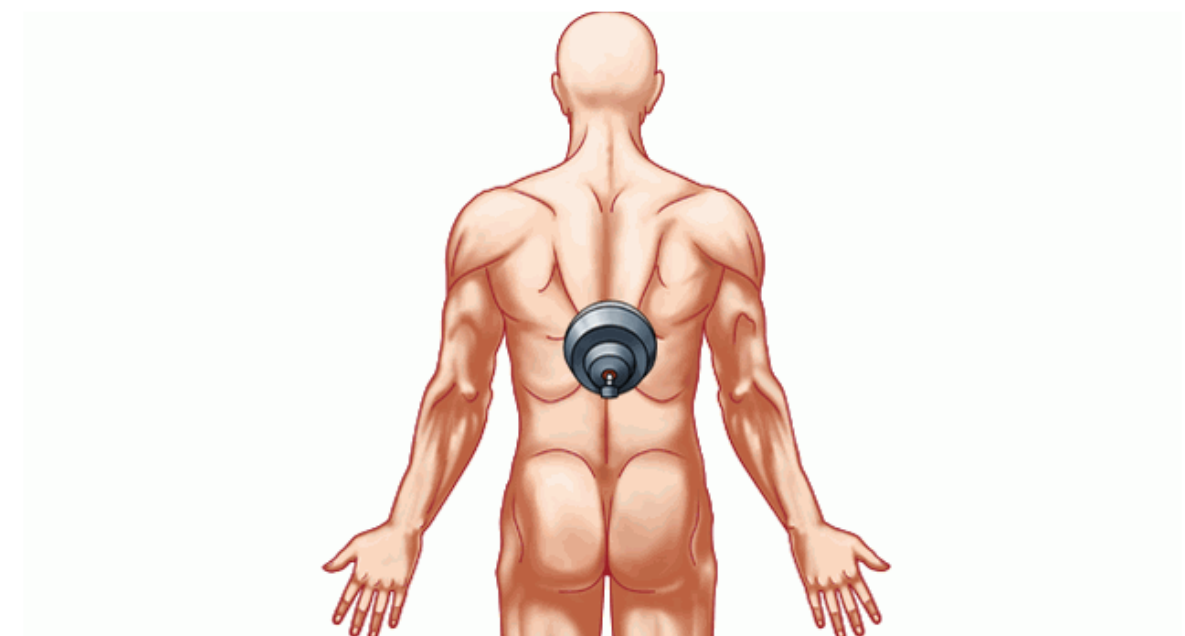




## 6.7 ДИСТРОФИЯ ЗУДЕКА (РСД)

<i>Программа</i>	D-1016 Программа: D-1016~ дистрофия Зудека (РСД)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 65 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	На поражённой площади по ощущениям пациента. Обычно на руке.
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Местный болевой синдром. Это редкое расстройство симпатической нервной системы.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, ускорение заживления, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. Применяйте только при хронической стадии. (1752)

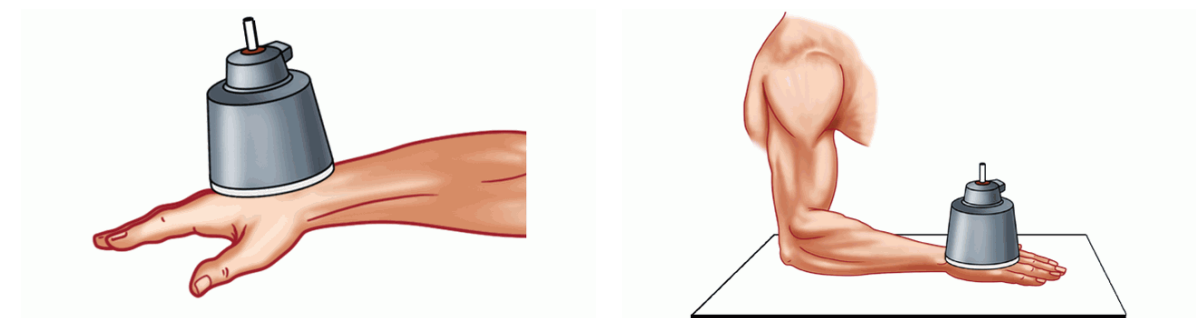

## 6.8 ИШИАЛГИЯ (ИШИОДИНИЯ)

<i>Программа</i>	D-1024 Программа: D-1024~ ишиалгия (ишиодиния)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	Продольное расположение, аппликаторы на болезненных областях.
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	12
<i>Описание</i>	боль в седалищной кости (бедре), на окончании седалищного нерва
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий
<i>Примечание</i>	Применяйте разогревающую терапию, только если это приемлемо для пациента. Не применяйте при острой стадии. (1760)

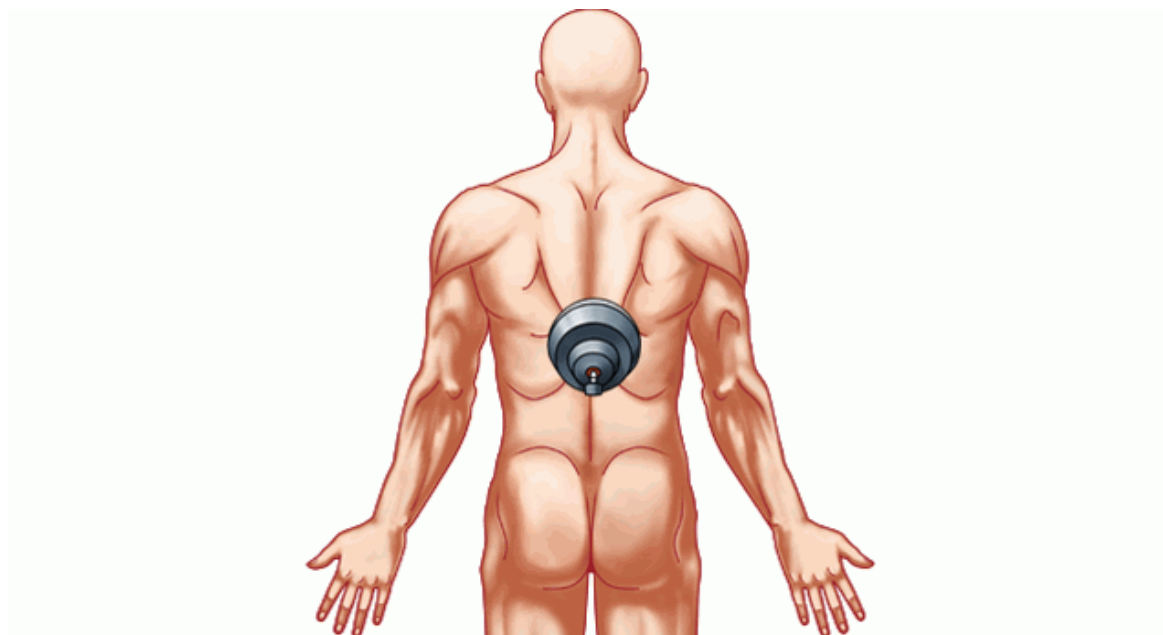


## 6.9 КАПСУЛИТ

<i>Программа</i>	D-1020 Программа: D-1020~ капсулит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 400 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	Суставы стопы с плантарной (подошвенной) стороны
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Боль и потеря подвижности или оцепенение сустава. Обычно поражает стопу, но может проявиться в любом суставе тела.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте в острой болезненной стадии. (1756)




## 6.10 КОНТРАКТУРА

<i>Программа</i>	D-1010 Программа: D-1010~ контрактура
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 110 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	На суставе. Ладонь и пальцы в случае контрактуры Дюпюйтрена
<i>Время применения</i>	15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Аномальное уплотнение вязкой ткани, которое проявляется потерей подвижности суставов. Самая известная контрактура Дюпюйтрена, при которой поражаются ладонь и пальцы
<i>Эффект</i>	тканезаживляющий, расслабляющий мышцы, локальное улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не используйте согревающую терапию в случае болезненной стадии. (1746)

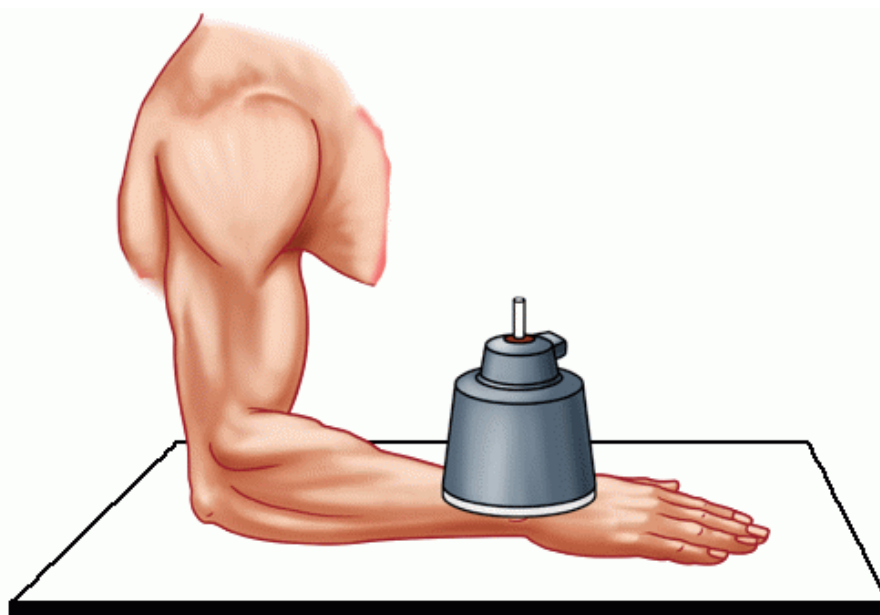


## 6.11 ЛЮМБАГО

<i>Программа</i>	D-1025 Программа: D-1025~ люмбаго
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на нижней части спины (пояснице)
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	7
<i>Описание</i>	Боль в нижней области спины (пояснице). Подобная боль может также отдавать в ягодицах, бедре (-ах), ноге (-ах)
<i>Эффект</i>	расслабляющий
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Используйте только при переносимости для пациента. (1761)

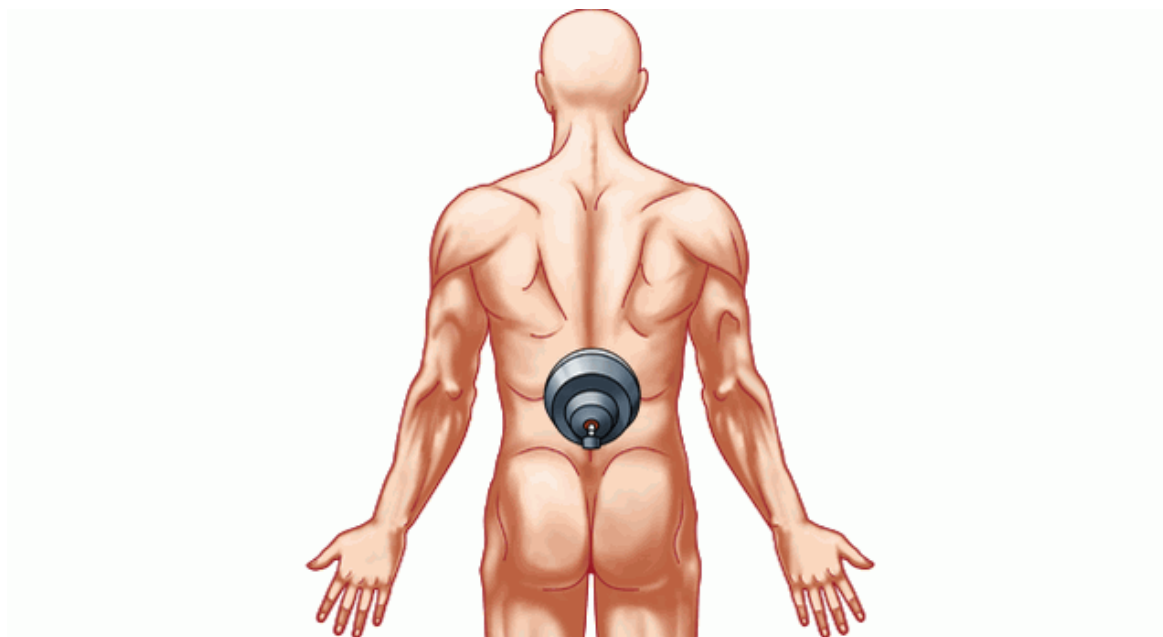


## 6.12 МЕНИСКОПАТИЯ

<i>Программа</i>	D-1023 Программа: D-1023~ менископатия
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 400 частота импульса: 100 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на колено
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Количество сеансов</i>	8
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой болезненной стадии. (1759)

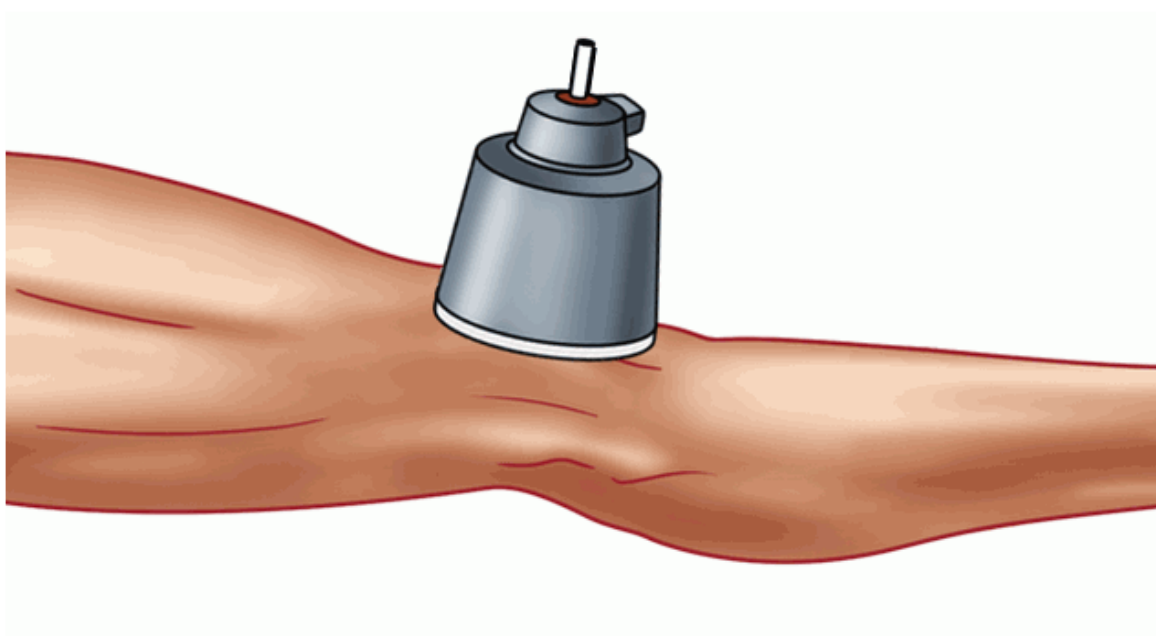


## 6.13 МИАЛГИЯ

<i>Программа</i>	D-1026 Программа: D-1026~ миалгия
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на поражённых мышцах
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Мышечная боль, и симптом множества болезней и расстройств. Самой распространённой причиной миалгии является переутомление мышцы.
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Только при переносимости для пациента. (1762)

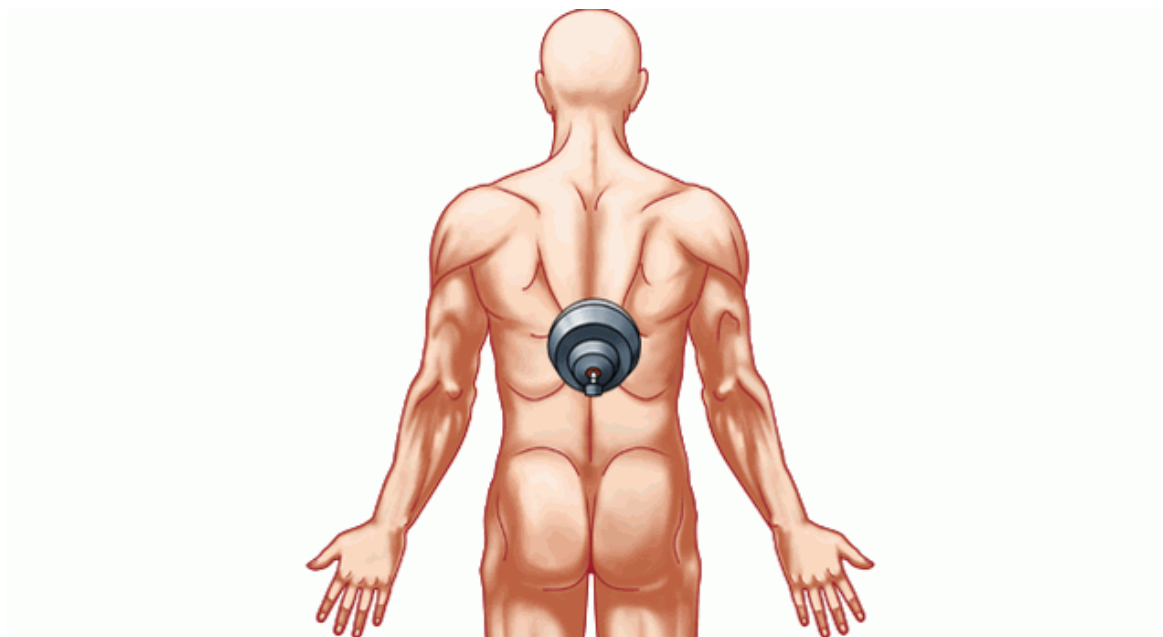

## 6.14 МИГРЕНЬ (ДАВЯЩАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ)


<i>Программа</i>	D-1028 Программа: D-1028~ мигрень (давящая головная боль)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 110 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на 3-ем шейном позвонке
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	напряжение в подзатылочных связках, результатом чего является пульсирующая боль, обычно гомолатеральная
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Используйте только при переносимости для пациента. Не при острых, болезненных стадиях. (1764)

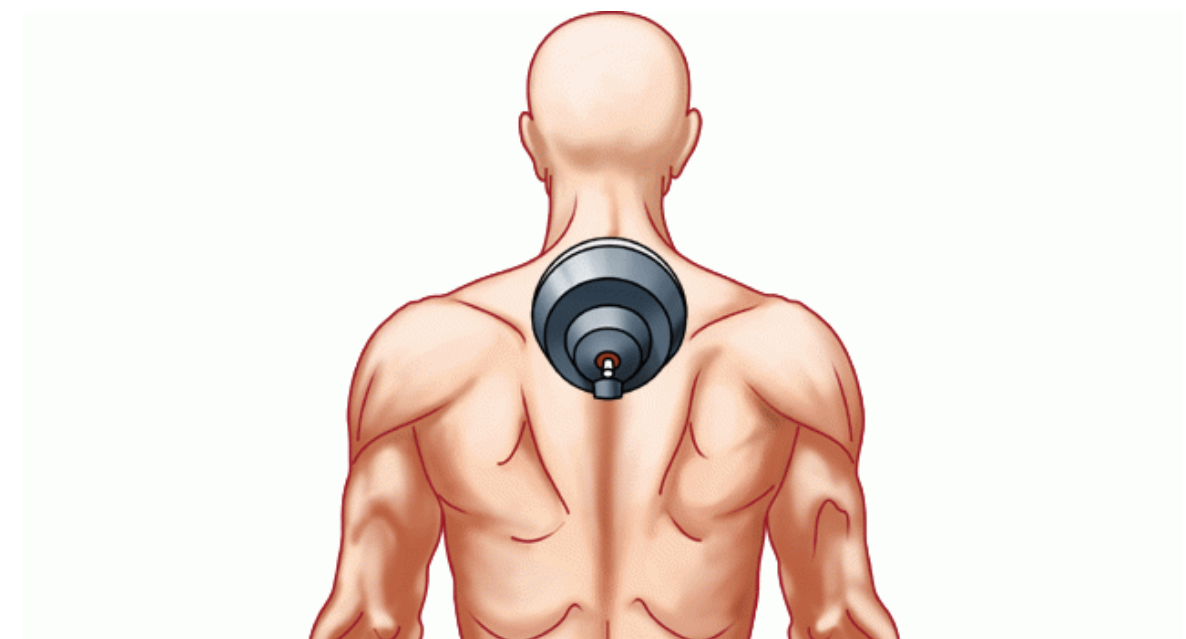




## 6.15 ОСТЕОАРТРИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ

<i>Программа</i>	D-1029 Программа: D-1029~ остеоартрит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам повреждённого сустава (бедро, колено, плечо, локоть, запястье...)
<i>Время применения</i>	10 - 15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 10
<i>Описание</i>	Суставная болезнь, которая в основном поражает хрящ. Результатом следует боль, опухоль и потеря подвижности сустава.
<i>Эффект</i>	Снятие мышечного напряжения
<i>Примечание</i>	Не применяйте на болезненных суставах. Используйте только при переносимости для пациента. (1738)

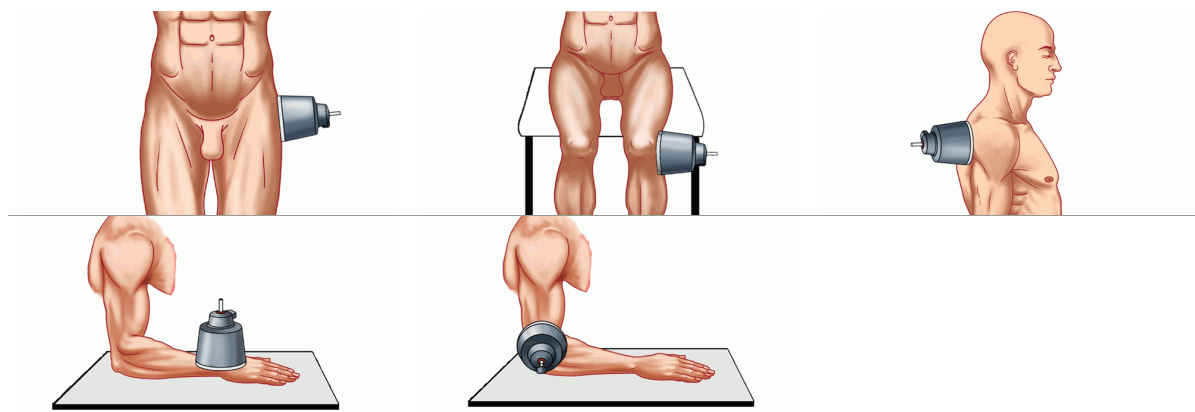


## 6.16 ОСТЕОХОНДРОЗ

<i>Программа</i>	D-1015 Программа: D-1015~ остеохондроз
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольно на позвоночнике
<i>Время применения</i>	15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	15
<i>Описание</i>	Поражения процесса роста костной ткани. Остеохондроз наблюдается только у детей и подростков, чьи кости все ещё растут.
<i>Эффект</i>	расслабление мышц, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. (1751)

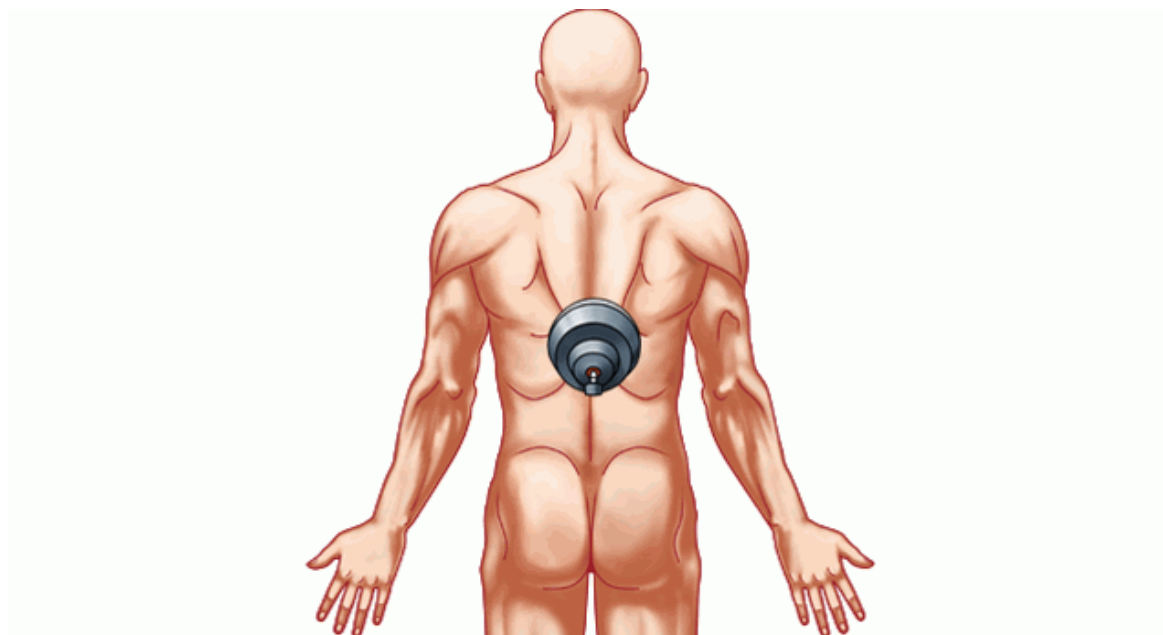


## 6.17 ПЕРЕЛОМ

<i>Программа</i>	D-1009 Программа: D-1009~ перелом
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 82 частота импульса: 100 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	над переломом
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	сломанные кости
<i>Эффект</i>	тканезаживляющий, ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Не используйте в острой стадии, при гематоме или выступающем переломе. (1745)

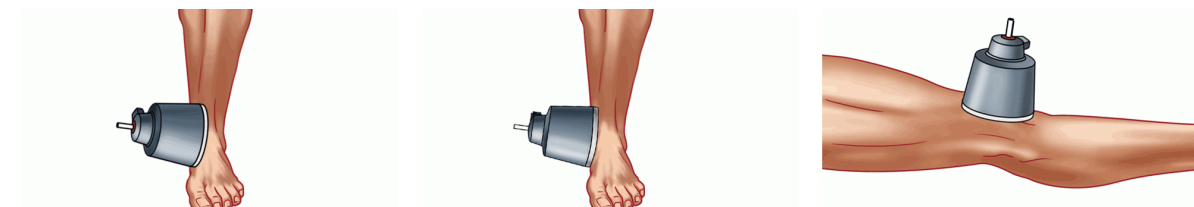


## 6.18 ПЕРИОСТИТ

<i>Программа</i>	D-1012 Программа: D-1012~ периостит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам кости
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление надкостницы (вокруг кости)
<i>Эффект</i>	обезболивающий, противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Не используйте согревающую терапию при острой стадии. (1748)

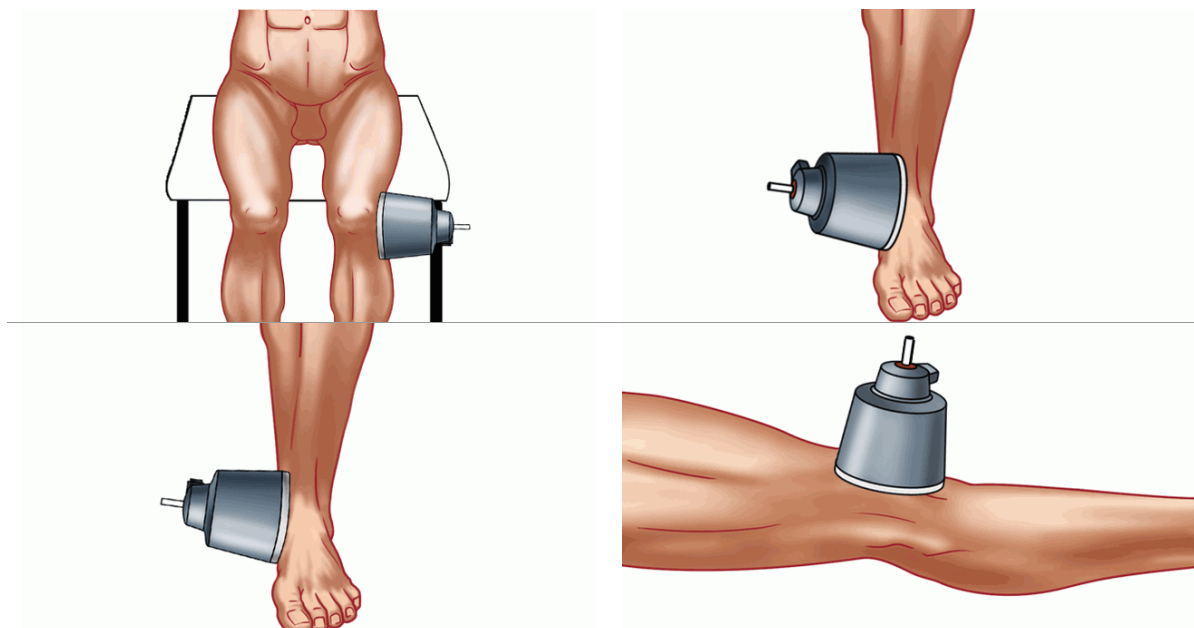

## 6.19 ПОЛИАРТРИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ


<i>Программа</i>	D-1001 Программа: D-1001~ полиартрит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам повреждённого сустава (бедро, плечо)
<i>Время применения</i>	приблиз-но 15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 10
<i>Описание</i>	Хроническая соматическая болезнь, главным образом суставов. Результатом следуют воспалительные изменения в суставных структурах и атрофирование костной массы.
<i>Эффект</i>	Снятие мышечного напряжения
<i>Примечание</i>	Применение на безболезненных суставах. Используйте только при переносимости для пациента. (1739)

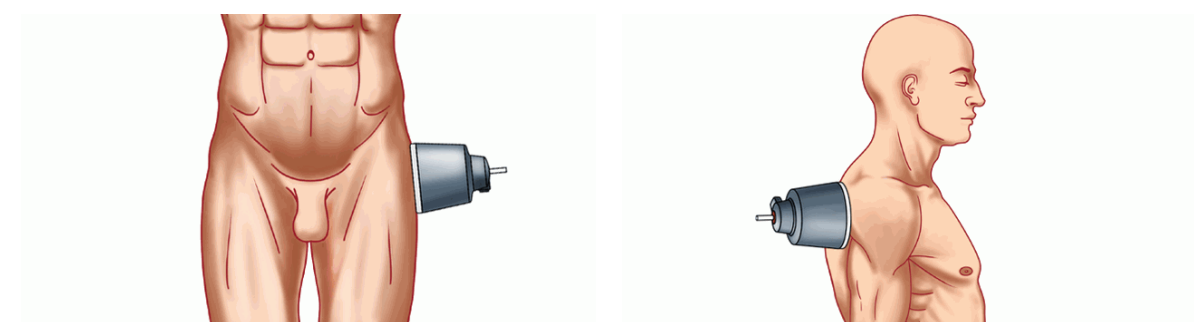

## 6.20 РАСТЯЖЕНИЕ / ВЫВИХ / УШИБ


### ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

<i>Программа</i>	D-1005 Программа: D-1005~ растяжение / вывих / ушиб
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам сустава
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	5 - 10
<i>Описание</i>	Суставные поверхности отходят друг от друга и затем возвращаются в исходное состояние. Результатом следует очень болезненное травмирование соседних мягких тканей.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, тканезаживляющий, противоотечный, локальное улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не используйте согревающую терапию при острой стадии или свежей гематоме. (1743)

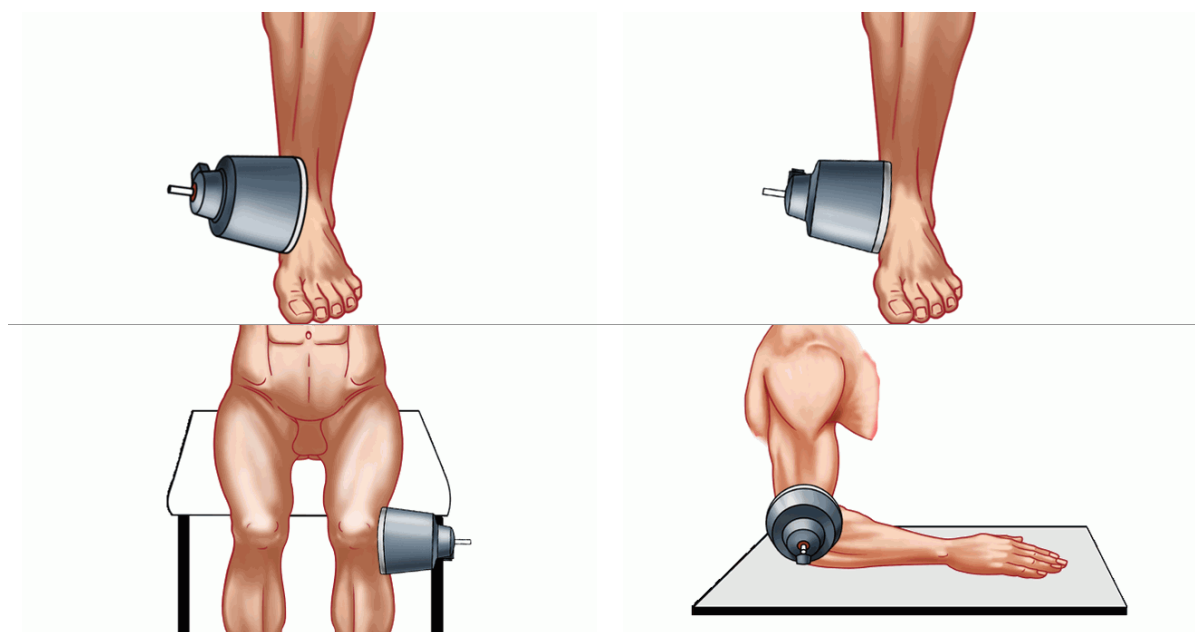

## 6.21 СИНДРОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА


<i>Программа</i>	D-1027 Программа: D-1027~ синдром запястного канала
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 110 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	запястье с пальмарной (ладонной) стороны
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	чепез день
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Срединный нерв зажат в области запястья и результатом является боль, парестезия и мышечная слабость в руке.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, ускорение заживления, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. Применяйте только при хронической стадии. (1763)

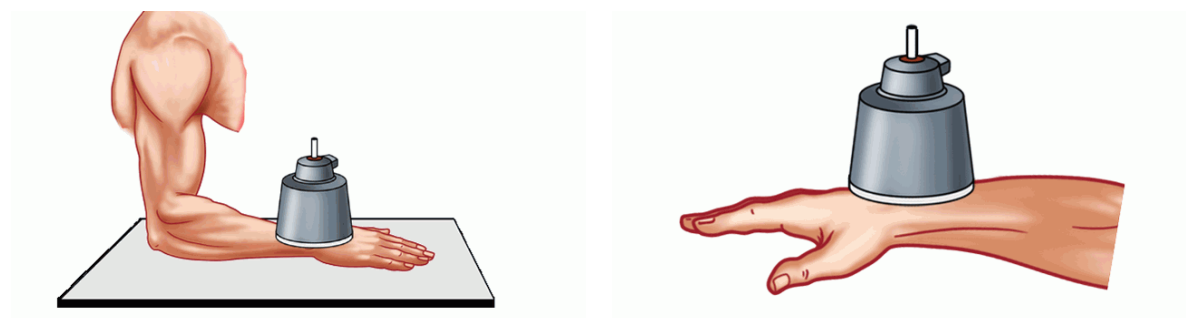

## 6.22 СИНДРОМ ЛЕСТНИЧНОЙ МЫШЦЫ (СВ СИНДРОМ)

### ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ


<i>Программа</i>	D-1019 Программа: D-1019~ синдром лестничной мышцы (СВ синдром)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на шейные позвонки
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	шейные боли сопровождающиеся покалыванием или другими симптомами в вышерасположенной конечности
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Используйте только при переносимости для пациента. Не при острых, болезненных стадиях. (1755)

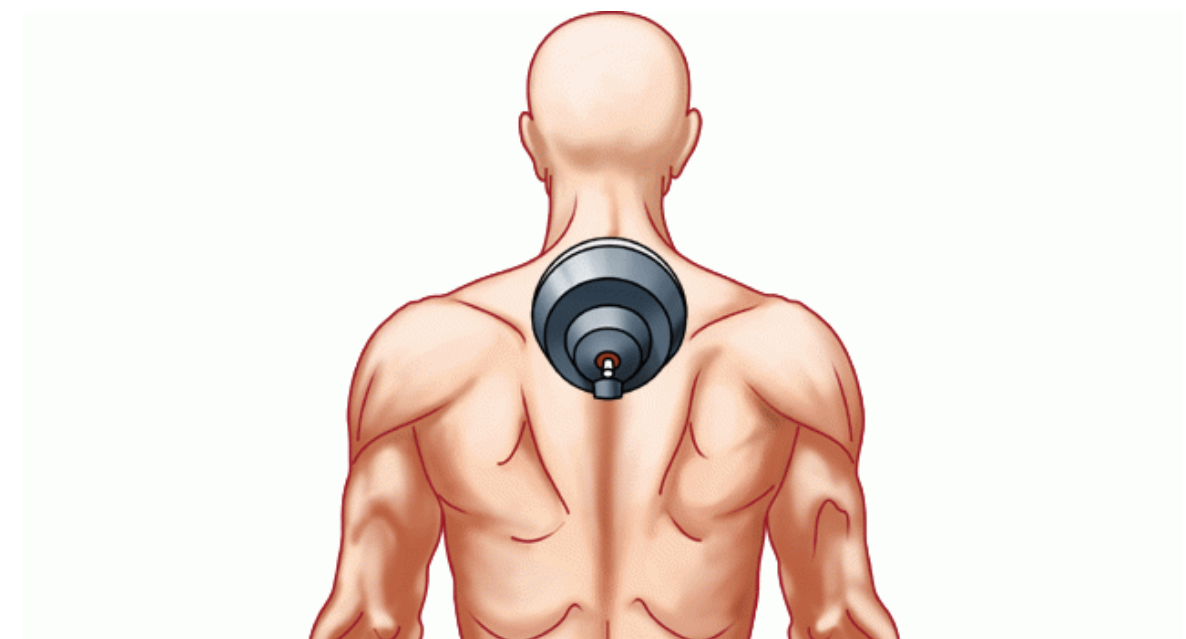




## 6.23 СПОНДИЛЕЗ (ПОЗВОНОЧНЫЙ АРТРИТ)

<i>Программа</i>	D-1014 Программа: D-1014~ спондилез (позвоночный артрит)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 400 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольно на позвоночнике
<i>Время применения</i>	15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	15
<i>Описание</i>	дегенерация и деформация позвоночных сочленений, которое обычно проявляется с возрастом
<i>Эффект</i>	расслабление мышц, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию в острой стадии. (1750)

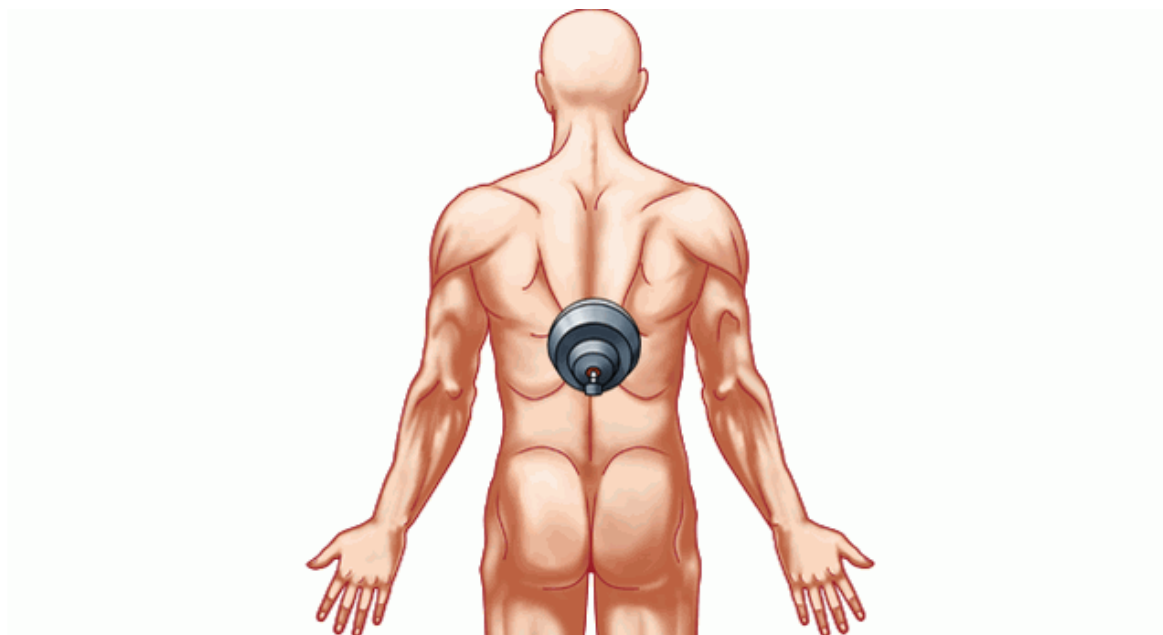


## 6.24 ТЕНДОВАГИНИТ

<i>Программа</i>	D-1017 Программа: D-1017~ тендовагинит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	рука
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	15
<i>Описание</i>	теносиновит сопровождаемый скрипящим звуком во время движения, обычно на тыльной стороне запястья
<i>Эффект</i>	обезболивающий, противовоспалительный, расслабляющий
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. (1753)

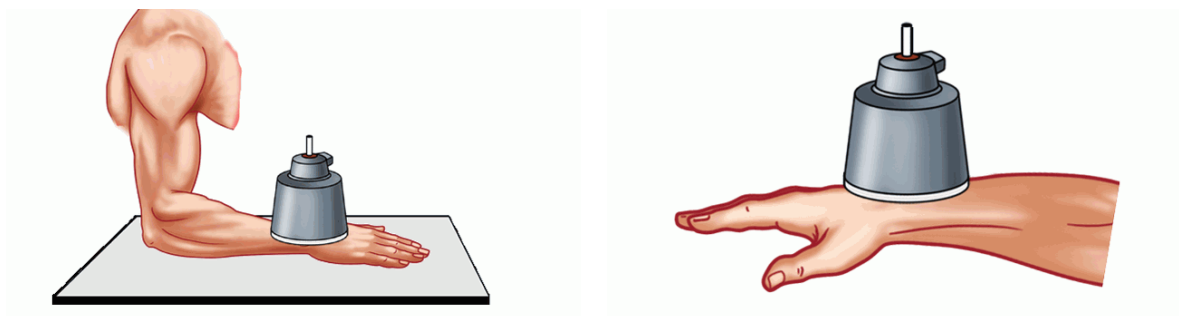


## 6.25 ХОНДРОМАЛЯЦИЯ ("КОЛЕНО БЕГУНА")

<i>Программа</i>	D-1021 Программа: D-1021~ хондромалыция ("колeно бегуна")
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 100 частота импульса: 400 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	колeно
<i>Время применения</i>	12 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление хряща коленной чашечки
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применять при острой болезненной стадии. (1757)

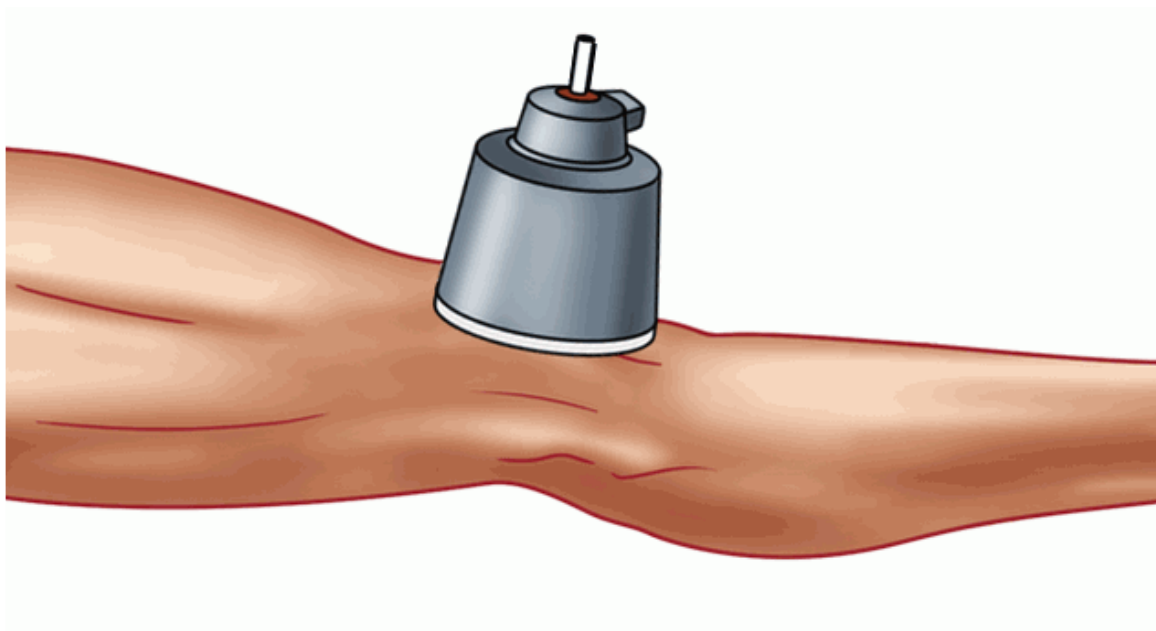

## 6.26 ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

<i>Программа</i>	D-1018 Программа: D-1018~ цервикальный синдром
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	на 3-ем шейном позвонке
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Напряжение в подзатылочной мышце. Результатом является боль, похожая на мигрень.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Используйте только при переносимости для пациента. Не при острых, болезненных стадиях. (1754)

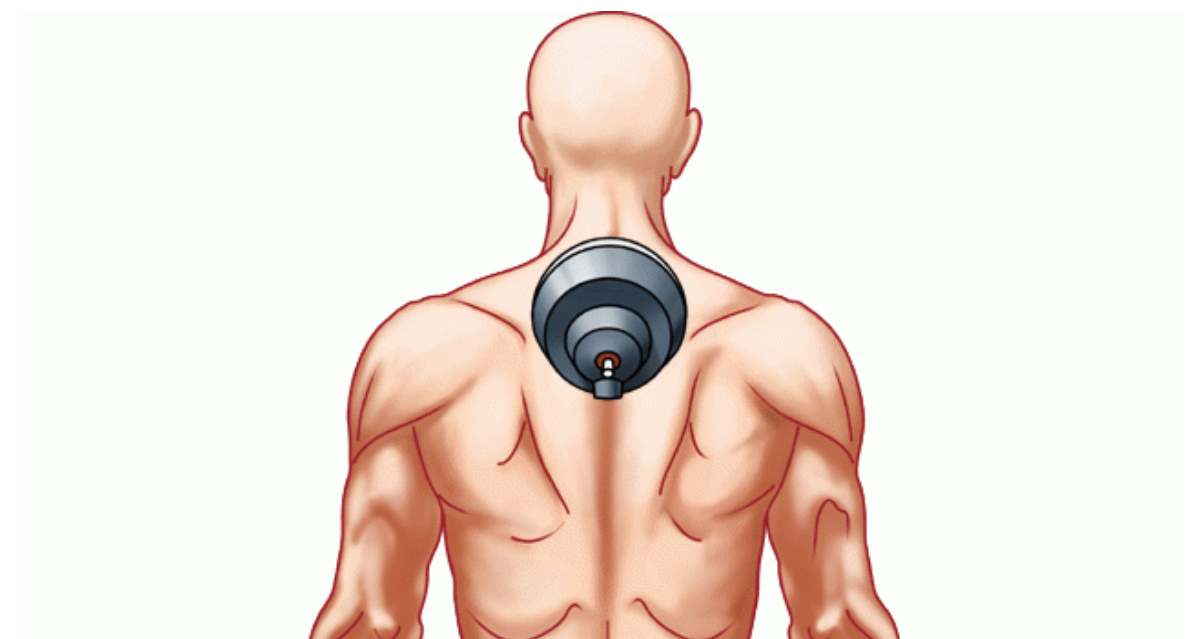

## 6.27 ЭПИКОНДИЛИТ ("ТЕННИСНЫЙ ЛКОТЬ")

<i>Программа</i>	D-1008 Программа: D-1008~ эпикондилит ("теннисный локоть")
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 110 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	по сторонам на локтевой сустав
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Повреждение в результате переутомления касающееся разгибательную/супинаторную мышцы. Результатом является боль в области латерального надмыщелка, отдаленного от центра плечевой кости.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий мышцы
<i>Примечание</i>	Используйте согревающую терапию только в хронической стадии. (1744)

