

The background of the entire page is a photograph of a person's muscular back and arms, seen from behind. The person's hands are clasped together in front of their lower back. The lighting is dramatic, highlighting the contours of the muscles. The overall color palette is a range of blues, from deep navy to a lighter, almost white blue.

BTL-6000

Shortwave 400

BTL ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



1	гинекология и урология	4
1.1	аднексит - хронический	4
1.2	аменорея	5
1.3	везикулит	6
1.4	дисменорея	7
1.5	мастит	8
1.6	миометрит - хронический	9
1.7	параметрит	10
1.8	простатит	11
1.9	яичниковая недостаточность	12
2	дерматология	13
2.1	гидраденит гнойный (HS)	13
2.2	обморожение	14
2.3	панариций	15
2.4	фурункул / карбункул	16
3	ЛОР	17
3.1	ларингит	17
3.2	синусит верхнечелюстной - острый	18
3.3	синусит верхнечелюстной - хронический	19
3.4	средний отит - хронический	20
4	медицина внутренних органов	21
4.1	болезнь Рейно	21
4.2	бронхит - хронический	22
4.3	гепатит (стадия выздоровления)	23
4.4	запор	24
4.5	неявный экссудативный плеврит - хронический	25
4.6	перемежающаяся хромота	26
4.7	холелитиаз (желчнокаменная болезнь)	27
5	неврология	28
5.1	ишиалгия (ишиодиния)	28
5.2	люмбаго	29
5.3	межрёберная невралгия	30
5.4	миалгия	31
5.5	мигрень (давящая головная боль)	32
5.6	невралгия	33
5.7	синдром запястного канала	34
6	ортопедия и реабилитация	35
6.1	"замороженное плечо" (адгезивный капсулит)	35
6.2	ахиллодиния	36
6.3	Бехтерева болезнь (анкилозирующий спондилоартрит)	37
6.4	болезнь Рейно	38
6.5	бурсит	39
6.6	дископатия	40
6.7	дистрофия Зудека (РСД)	41
6.8	ишиалгия (ишиодиния)	42
6.9	капсулит	43
6.10	контрактура	44
6.11	люмбаго	45
6.12	менископатия	46
6.13	миалгия	47
6.14	мигрень (давящая головная боль)	48
6.15	остеоартрит - хронический	49
6.16	остеохондроз	50
6.17	перелом	51



6.18	периостит	52
6.19	полиартрит - хронический.....	53
6.20	растяжение / вывих / ушиб.....	54
6.21	синдром запястного канала	55
6.22	синдром лестничной мышцы (СВ синдром)	56
6.23	спондилез (позвоночный артрит)	57
6.24	тендовагинит.....	58
6.25	хондромаляция ("колени бегуна")	59
6.26	цервикальный синдром.....	60
6.27	эпикондилит ("теннисный локоть")	61




1 ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ

1.1 АДНЕКСИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ


ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-0300 Программа: D-0300~ аднексит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 100 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) и спинной (дорсальной) сторон
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	воспаление придатков матки, яичников
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. Со спинной стороны может быть использован резиновый аппликатор. (1691)

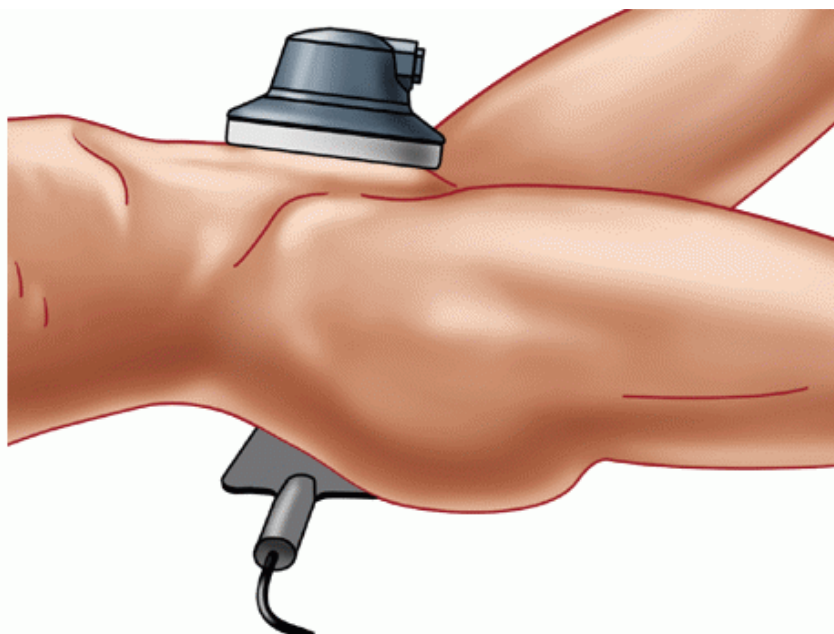


1.2 АМЕНОРЕЯ

<i>Программа</i>	D-0301 Программа: D-0301~ аменорея
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) и спинной (дорсальной) сторон
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	Отсутствие менструаций у женщины репродуктивного возраста
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. Со спинной стороны может быть использован резиновый аппликатор. (1692)

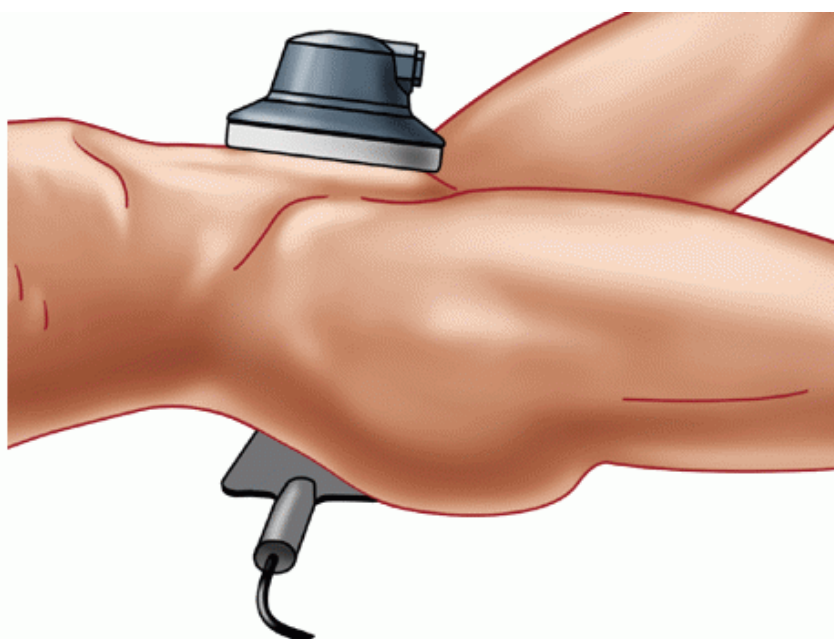


1.3 ВЕЗИКУЛИТ

<i>Программа</i>	D-0308 Программа: D-0308~ везикулит
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) и спинной (дорсальной) сторон
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	12
<i>Описание</i>	воспаление и заражение семенных пузырьков в мужских половых путях
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Держите гениталии за пределами диэлектрического поля. (1699)

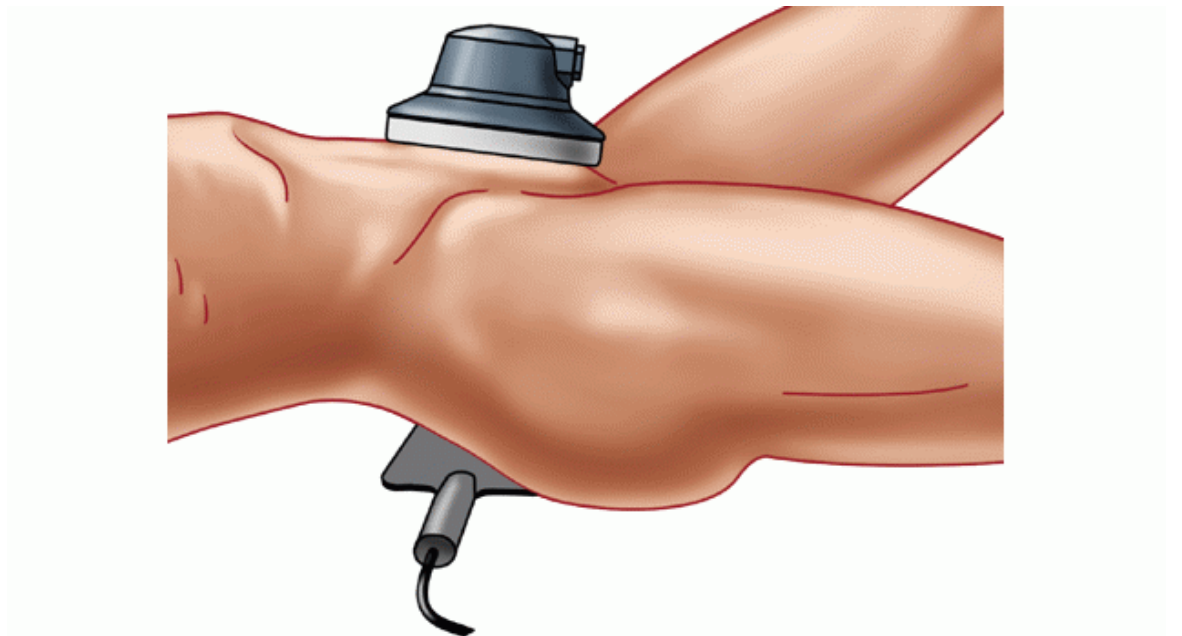


1.4 ДИСМНОРЕЯ

<i>Программа</i>	D-0302 Программа: D-0302~ дисменорея
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) и спинной (дорсальной) сторон
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	болезненная менструация
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. Начинайте через 6 дней после менструации. Со спинной стороны может быть использован резиновый аппликатор. (1693)

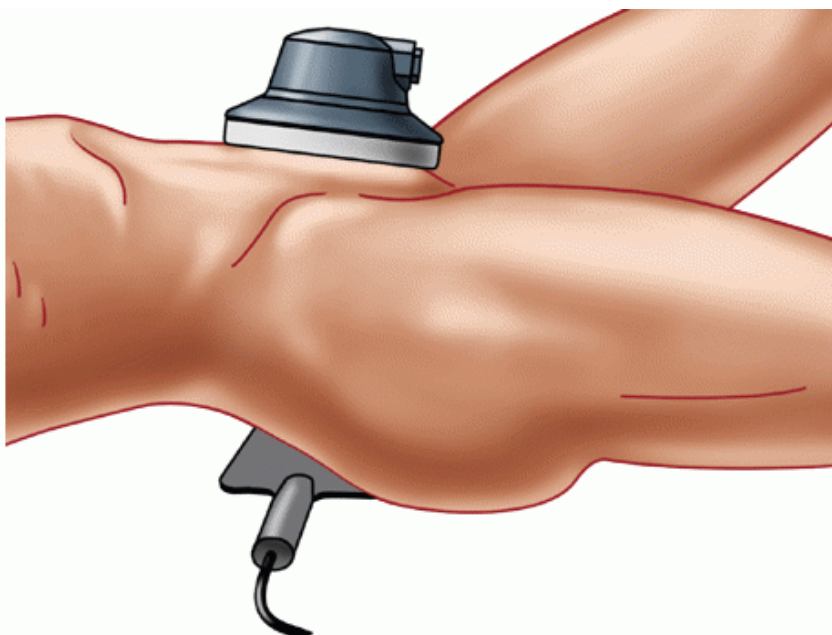


1.5 МАСТИТ

<i>Программа</i>	D-0304 Программа: D-0304~ мастит
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с вентральной и дорсальной сторон
<i>Время применения</i>	2 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 7
<i>Описание</i>	воспаление молочной железы; результатом является воспаление, покраснение, чувствительность и боль
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Применяйте низкий уровень мощности и более короткую продолжительность терапии, если не точно определена хроническая стадия. Со спинной стороны можно использовать резиновый аппликатор. (1695)

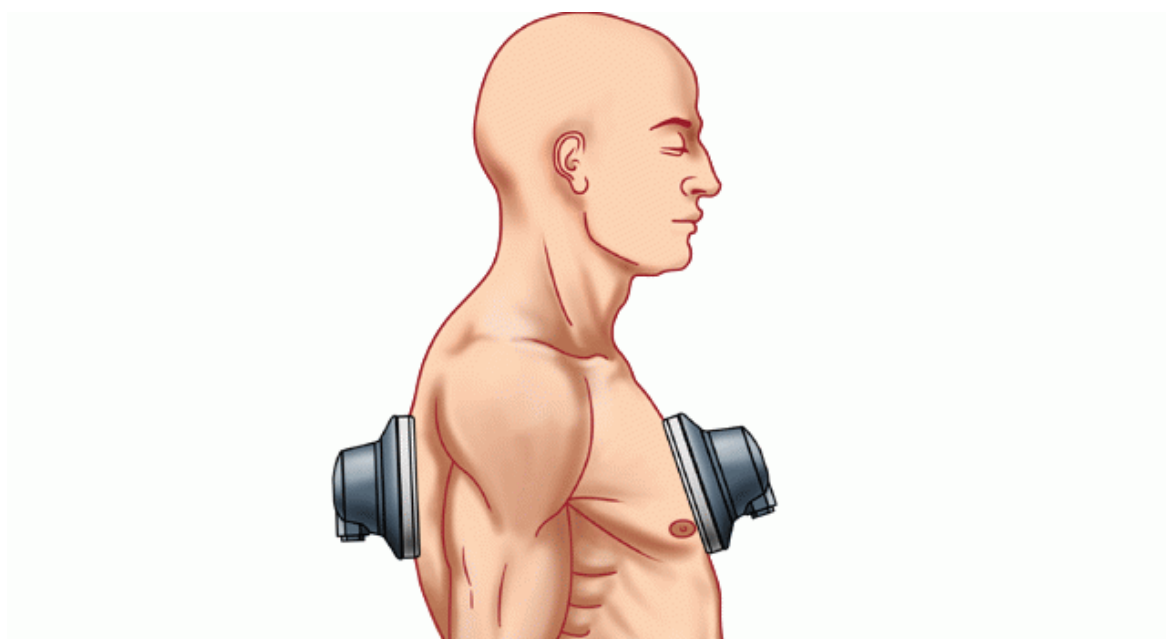


1.6 МИОМЕТРИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ

<i>Программа</i>	D-0305 Программа: D-0305~ миометрит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 200 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) и спинной (дорсальной) сторон
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	воспаление мышечной стенки матки (миометрия)
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. Со спинной стороны может быть использован резиновый аппликатор. (1696)

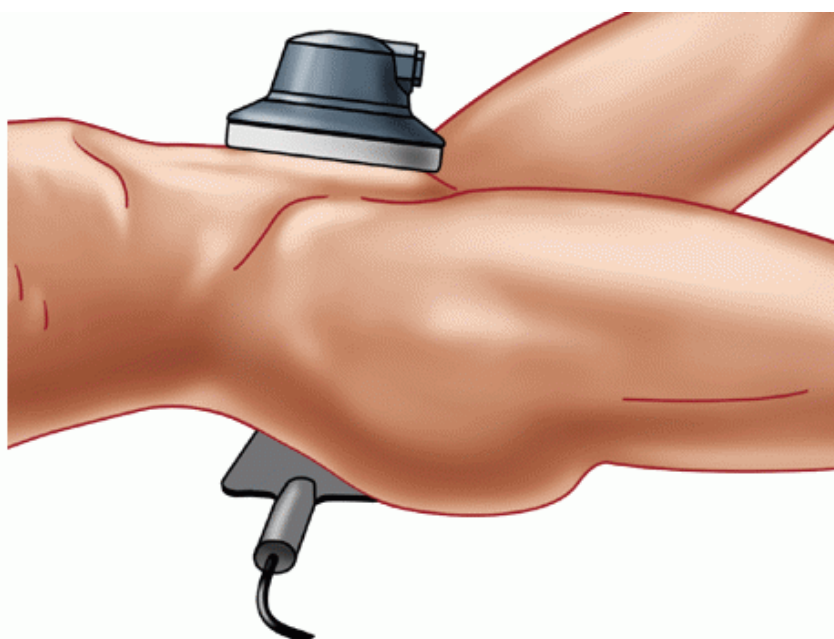


1.7 ПАРАМЕТРИТ

<i>Программа</i>	D-0306 Программа: D-0306~ параметрит
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) и спинной (дорсальной) сторон
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	воспаление рыхлой ткани матки (параметрия)
<i>Эффект</i>	расслабляющий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. Со спинной стороны может быть использован резиновый аппликатор. (1697)

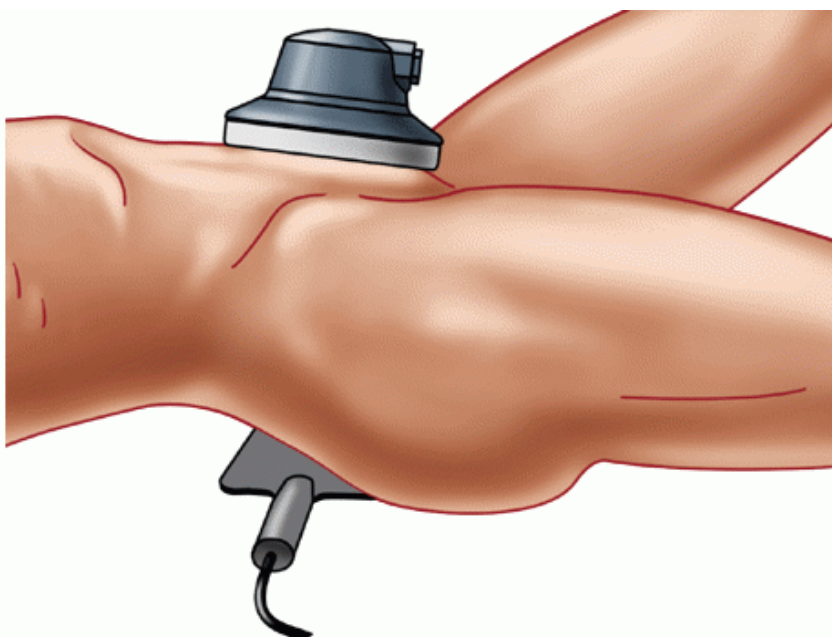


1.8 ПРОСТАТИТ

<i>Программа</i>	D-0307 Программа: D-0307~ простатит
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) и спинной (дорсальной) сторон
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	12
<i>Описание</i>	любая форма воспаления предстательной железы
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Держите гениталии за пределами диэлектрического поля. Со спинной стороны может быть использован резиновый аппликатор. Можно использовать индукционный катушечный аппликатор. (1698)

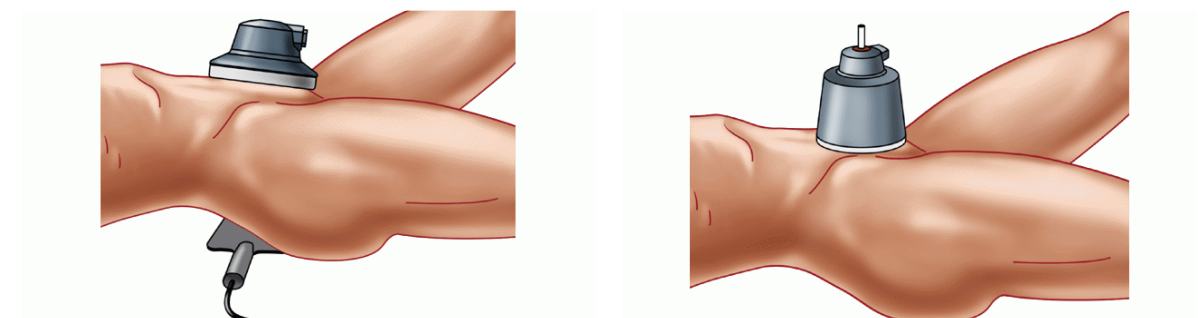

1.9 ЯИЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

<i>Программа</i>	D-0303 Программа: D-0303~ яичниковая недостаточность
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с брюшной (вентральной) и спинной (дорсальной) сторон
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	недостаточная функция яичников, ведущая к аменорее, олигоменорее, или к аномальному дисфункциональному маточному кровотечению; патология беременности
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не проводить лечение во время менструации и беременности. Не применять при острой стадии. Начинайте через 6 дней после менструации. Со спинной стороны может быть использован резиновый аппликатор. (1694)

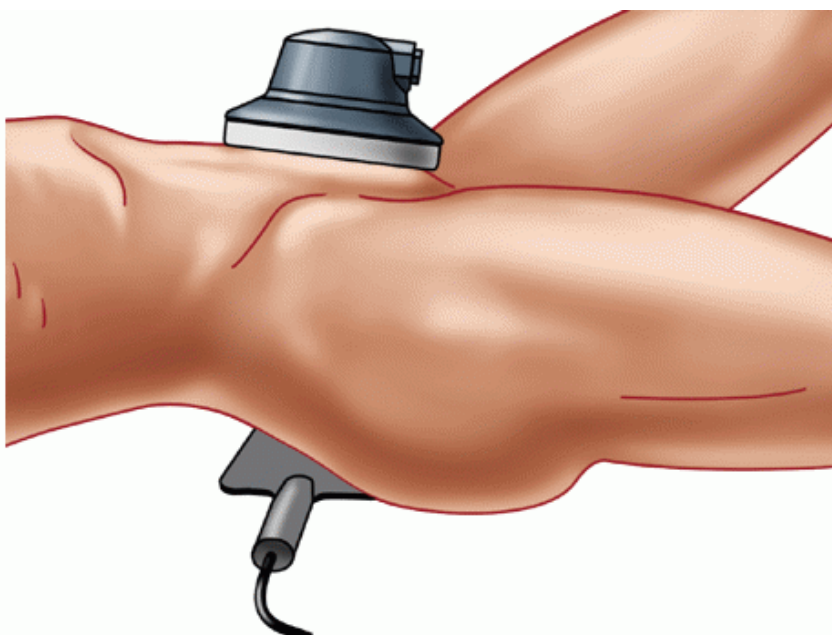


2 ДЕРМАТОЛОГИЯ

2.1 ГИДРАДЕНИТ ГНОЙНЫЙ (HS)




ДЕРМАТОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-0203 Программа: D-0203~ гидраденит гнойный (HS)
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	малый на очаг поражения (подмышка), большой - вблизи
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	кожная болезнь, поражающая области потовых желез и волосяных луковиц; проявляется в виде болезненных абсцессов (гнойников)
<i>Эффект</i>	повышение эффекта заживления
<i>Примечание</i>	Можно использовать индукционный катушечный аппликатор. (1688)

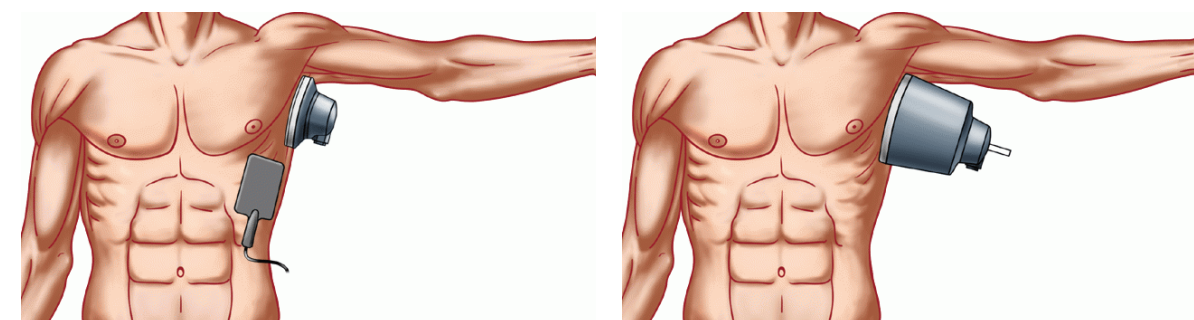


2.2 ОБМОРОЖЕНИЕ

<i>Программа</i>	D-0202 Программа: D-0202~ обморожение
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	на поражённой области (кисть, стопа...)
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	поражение, нанесённое коже и тканям вследствие крайне сильного охлаждения
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Применяйте короткую продолжительность (5 мин.) при ранней стадии, длительную (10 мин.) - при поздней стадии. Для удобства можно использовать резиновые аппликаторы. Можно использовать индукционный катушечный аппликатор. (1687)

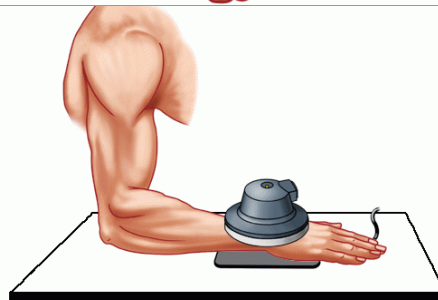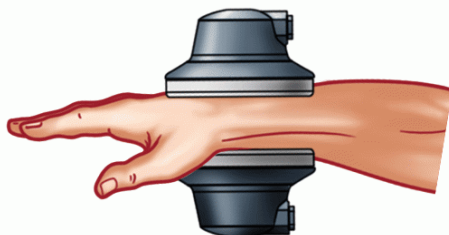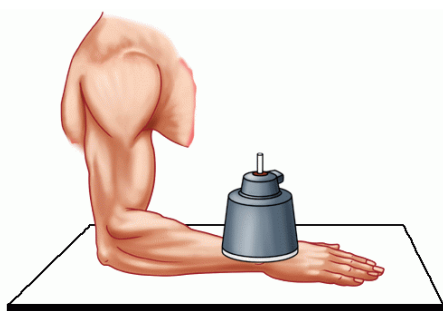

2.3 ПАНАРИЦИЙ


<i>Программа</i>	D-0204 Программа: D-0204~ панариций
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 200 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	малый на очаг поражения, резиновый - под руку
<i>Время применения</i>	приблиз-но 7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 8
<i>Описание</i>	гнойное воспаление на пальцах и кисти
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Можно использовать индукционный катушечный аппликатор (1689)

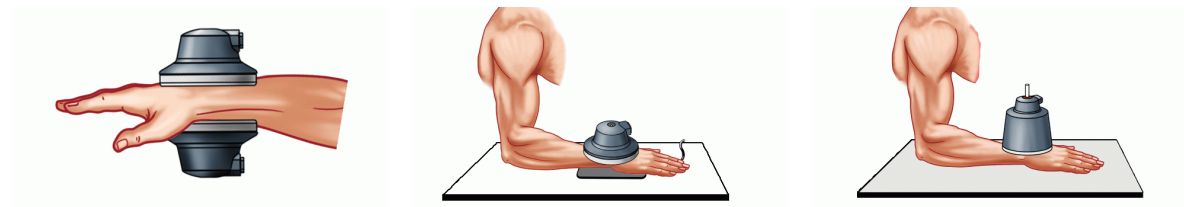

2.4 ФУРУНКУЛ / КАРБУНКУЛ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-0200 Программа: D-0200~ фурункул / карбункул
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	малый на очаг поражения, большой - продольно
<i>Время применения</i>	2 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	2
<i>Описание</i>	заражение волосяной луковицы
<i>Эффект</i>	ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Более длительные процедуры или более высокий уровень мощности может спровоцировать распространение. Открытые очаги поражения должны быть подсушены, чтобы избежать их прижигания. Можно использовать индукционный катушечный аппликатор (1685)

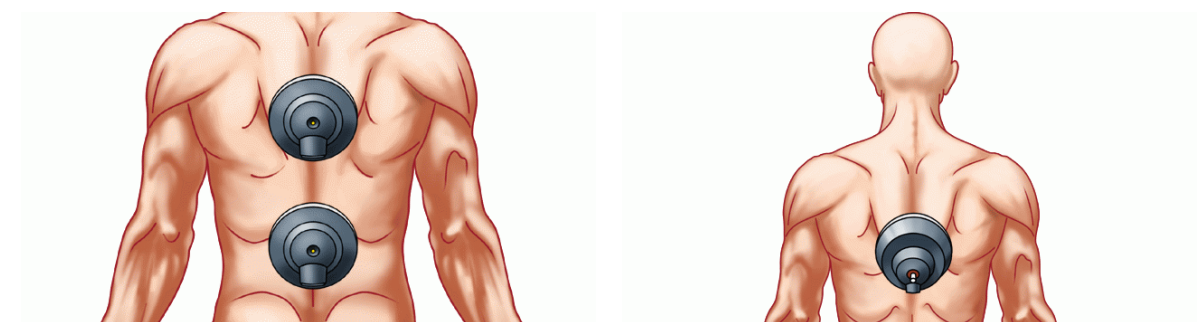

3 ЛОР

3.1 ЛАРИНГИТ

ЛОР

<i>Программа</i>	D-0400 Программа: D-0400~ ларингит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 300 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области гортани: с вентральной (малый аппликатор) и дорсальной сторон
<i>Время применения</i>	2 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	5
<i>Описание</i>	воспаление и опухание гортани
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Можно использовать индукционный катушечный аппликатор (1701)



3.2 СИНУСИТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ - ОСТРЫЙ

ЛОР

<i>Программа</i>	D-0402 Программа: D-0402~ синусит верхнечелюстной - острый
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	по обе стороны на уровне носовых пазух
<i>Время применения</i>	2 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	5
<i>Описание</i>	воспаление придаточных пазух носа
<i>Эффект</i>	ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Разогревающая терапия на эмпиемах (нарывах) не рекомендована. Можно использовать индукционный катушечный аппликатор (1703)



3.3 СИНУСИТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ - ХРОНИЧЕСКИЙ

ЛОР

<i>Программа</i>	D-0403 Программа: D-0403~ синусит верхнечелюстной - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	по обе стороны на уровне носовых пазух
<i>Время применения</i>	7 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление придаточных пазух носа
<i>Эффект</i>	ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Разогревающая терапия на эмпиемах (нарывах) не рекомендована. Можно использовать индукционный катушечный аппликатор (1704)



3.4 СРЕДНИЙ ОТИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ

ЛОР

<i>Программа</i>	D-0401 Программа: D-0401~ средний отит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 150 частота импульса: 300 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	на ушах
<i>Время применения</i>	3 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Колличество сеансов</i>	5
<i>Описание</i>	заражение или воспаление среднего уха
<i>Эффект</i>	обезболивающий, ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Можно использовать индукционный катушечный аппликатор. (1702)




4 МЕДИЦИНА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

4.1 БОЛЕЗНЬ РЕЙНО

МЕДИЦИНА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

<i>Программа</i>	D-0506 Программа: D-0506~ болезнь Рейно
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	на плече; резиновый аппликатор под ладонью
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	состояние, при котором поражается кровоток на конечности, пальцы рук, пальцы ног, нос и уши, если они подвержены влиянию изменений температуры или стресса
<i>Эффект</i>	местное улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. (1712)

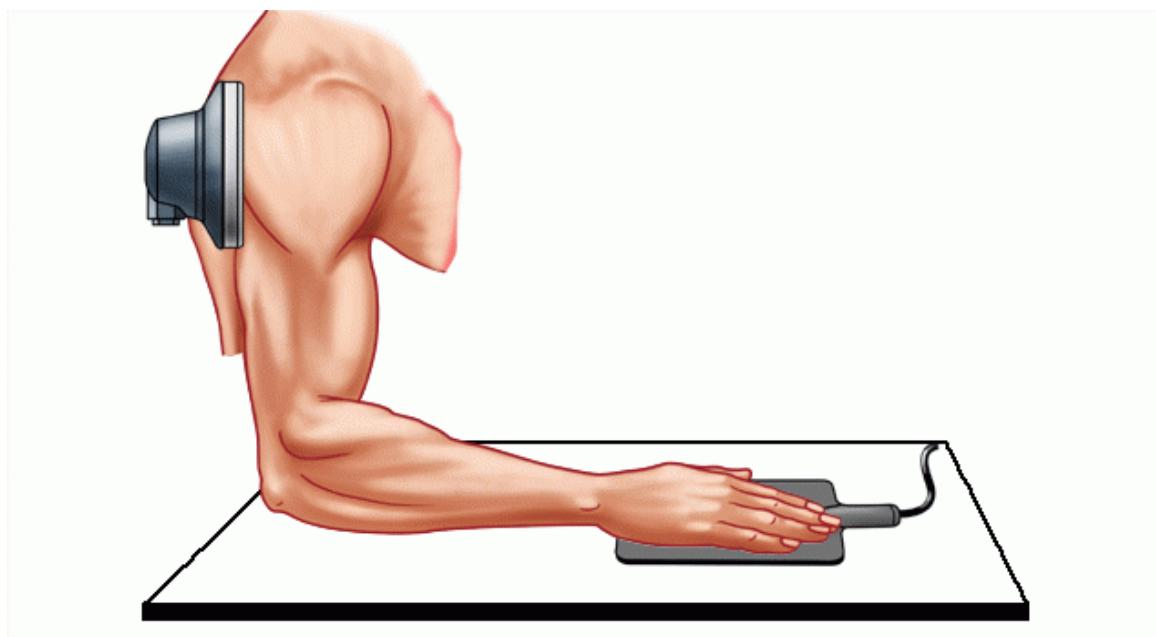


4.2 БРОНХИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ

<i>Программа</i>	D-0500 Программа: D-0500~ бронхит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области грудной клетки: с вентральной и дорсальной сторон
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Колличество сеансов</i>	8
<i>Описание</i>	воспаление воздушных путей в лёгких
<i>Эффект</i>	отделение мокроты, ослабление бронхоспазма
<i>Примечание</i>	В случае гнойной мокроты применяйте только уровень мощности 1, продолжительность терапии максимум 3 мин, при общем достаточном количестве сеансов - 6. При хроническом обструктивном бронхите может быть применён уровень мощности 2 и более долгая продолжительность процедуры. Можно использовать индукционный катушечный аппликатор. (1706)




4.3 ГЕПАТИТ (СТАДИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ)

<i>Программа</i>	D-0502 Программа: D-0502~ гепатит (стадия выздоровления)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с вентральной и дорсальной сторон
<i>Время применения</i>	6 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	инфекционная заболевание печени, вызванное вирусом гепатита (вирус гепатита А)
<i>Эффект</i>	улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Применять только не ранее стадии выздоровления! Лучше применять в горизонтальном положении. Можно использовать индукционный катушечный аппликатор. (1708)

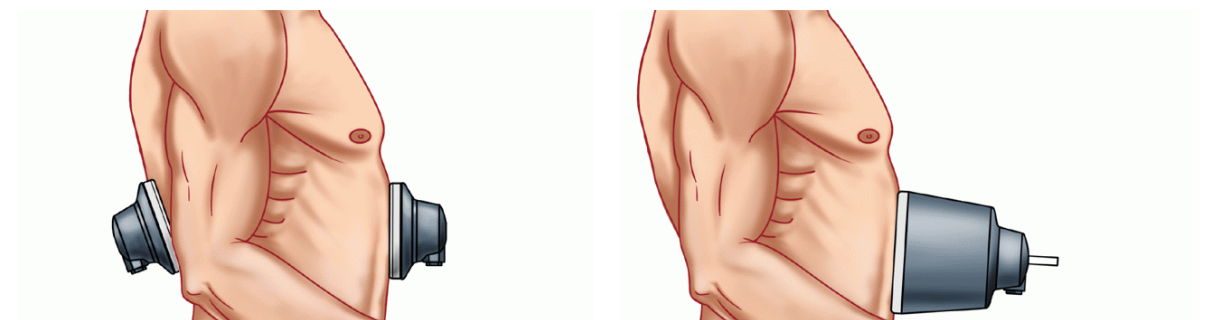

4.4 ЗАПОР


<i>Программа</i>	D-0503 Программа: D-0503~ запор
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в брюшной области: с вентральной и дорсальной сторон
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	5
<i>Описание</i>	состояние пищеварительной системы, при которой у человека случаются затруднения с опорожнением
<i>Эффект</i>	стимуляция мышечного тонуса
<i>Примечание</i>	Будьте уверены в диагнозе перед началом терапии! С дорсальной стороны можно использовать резиновый ёмкостный аппликатор. (1709)

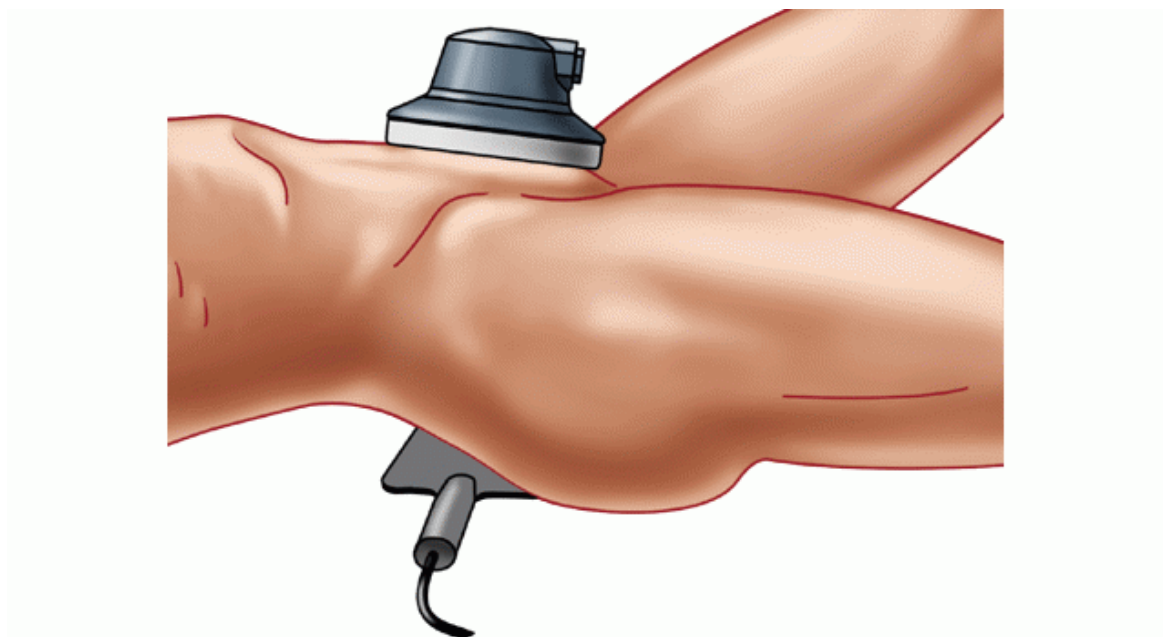

4.5 НЕЯВНЫЙ ЭКСУДАТИВНЫЙ ПЛЕВРИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ


МЕДИЦИНА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

<i>Программа</i>	D-0504 Программа: D-0504~ неявный экссудативный плеврит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Ёмкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области грудной клетки: с вентральной и дорсальной сторон
<i>Время применения</i>	приблиз-но 3 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление плевры
<i>Эффект</i>	противовоспалительный, улучшение циркуляции крови и ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Не применяйте при туберкулёзе. С дорсальной стороны можно использовать резиновый ёмкостный аппликатор. (1710)

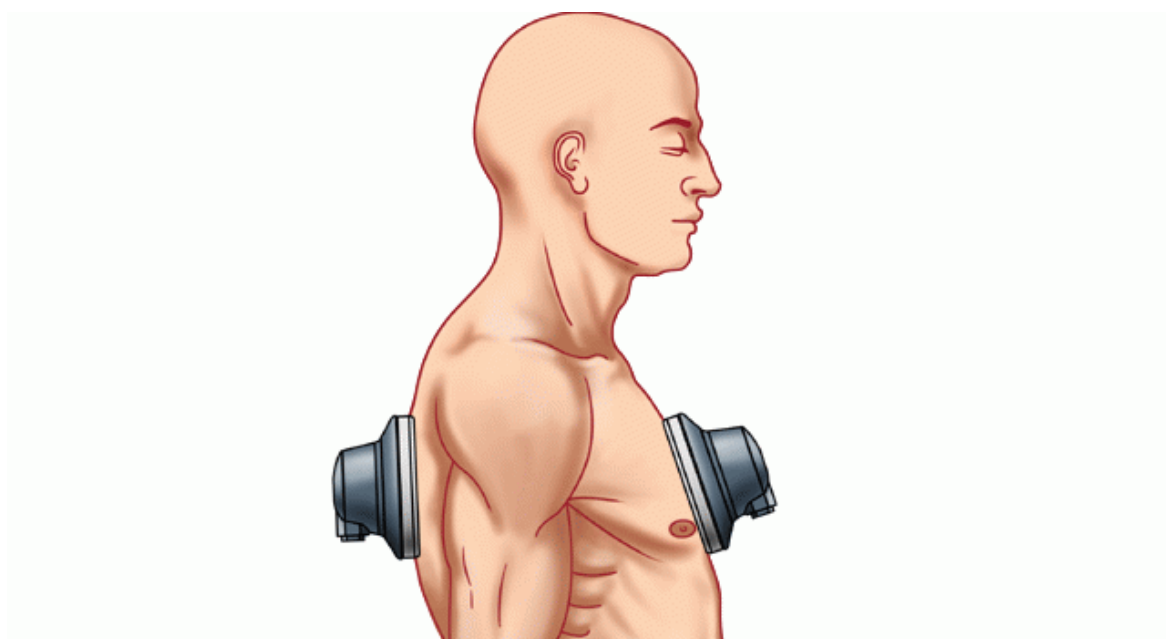

4.6 ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ХРОМОТА


<i>Программа</i>	D-0505 Программа: D-0505~ перемежающаяся хромота
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Ёмкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	ёмкостный аппликатор на колене и резиновый аппликатор под ногой
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	притупление чувствительности в ногах, которое имеет место в течение упражнения или прогулки и проявляется как результат снижения обогащения кислородом
<i>Эффект</i>	противовоспалительный, улучшение циркуляции крови и ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Не применять при острой стадии. (1711)

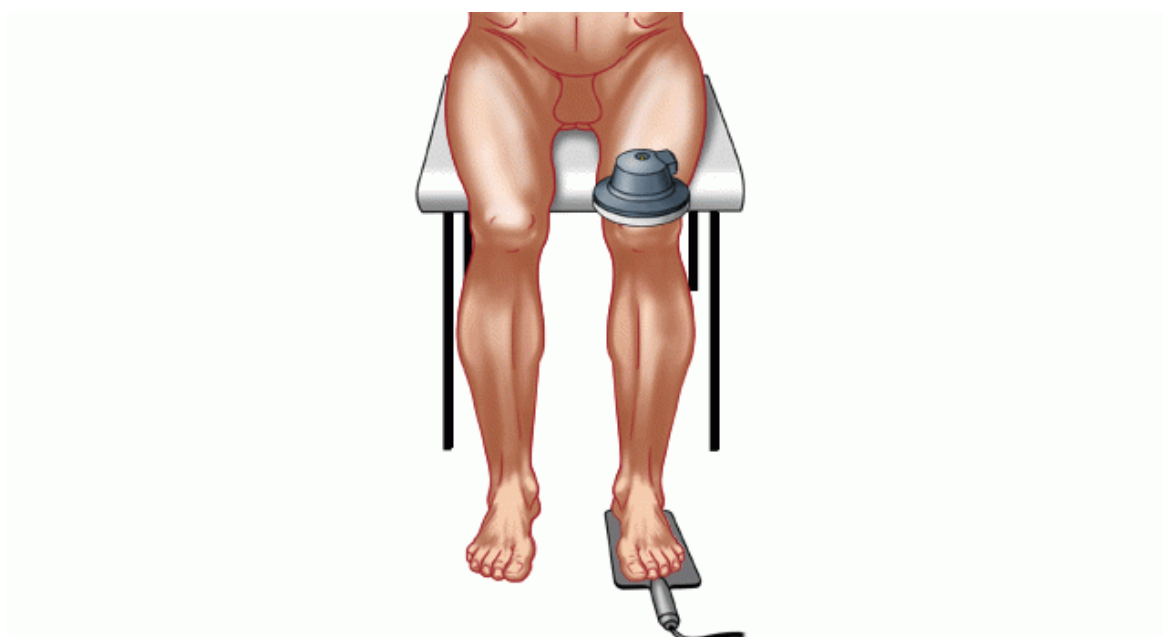

4.7 ХОЛЕЛИТИАЗ (ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ)

МЕДИЦИНА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

<i>Программа</i>	D-0501 Программа: D-0501~ холелитиаз (желчнокаменная болезнь)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	в области органа: с вентральной и дорсальной сторон
<i>Время применения</i>	3 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	присутствие камней в желчном пузыре
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Это рекомендация для послеоперационной стадии. Не предназначено как лечение от камней в желчном пузыре. С дорсальной стороны можно использовать резиновый ёмкостный электрод. (1707)

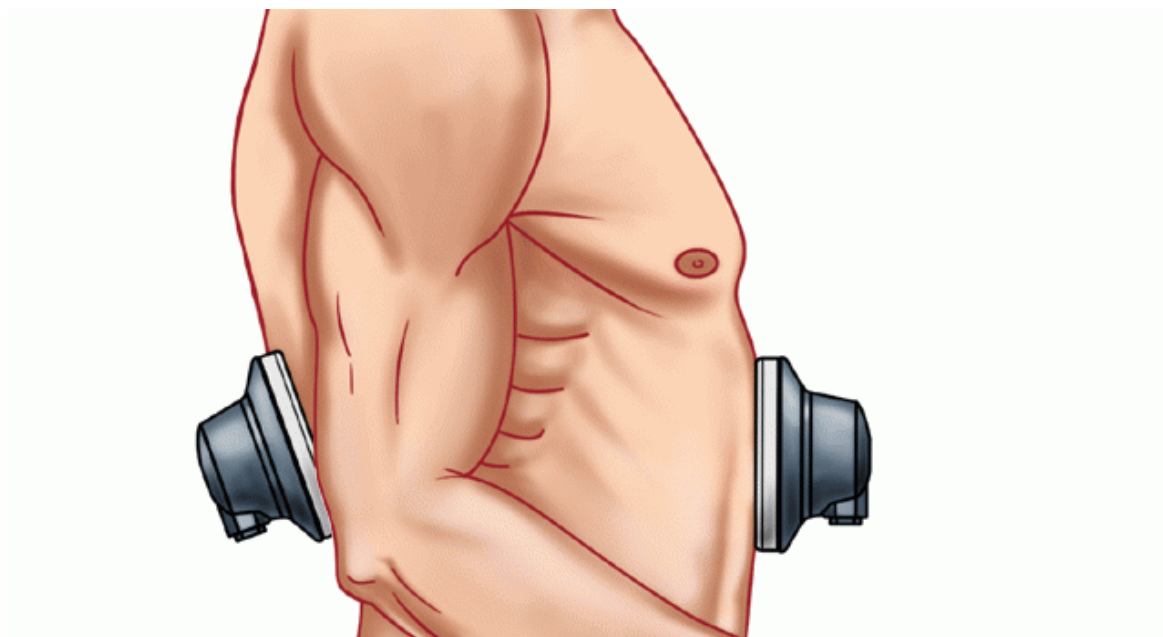


5 НЕВРОЛОГИЯ

5.1 ИШИАЛГИЯ (ИШИОДИНИЯ)


НЕВРОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-0101 Программа: D-0101~ ишиалгия (ишиодиния)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	Продольное расположение, аппликаторы на болезненных областях
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	12
<i>Описание</i>	боль в седалищной кости (бедре), на окончании седалищного нерва
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий
<i>Примечание</i>	Применяйте разогревающую терапию, только если это приемлемо для пациента. Не применяйте при острой стадии. (1678)

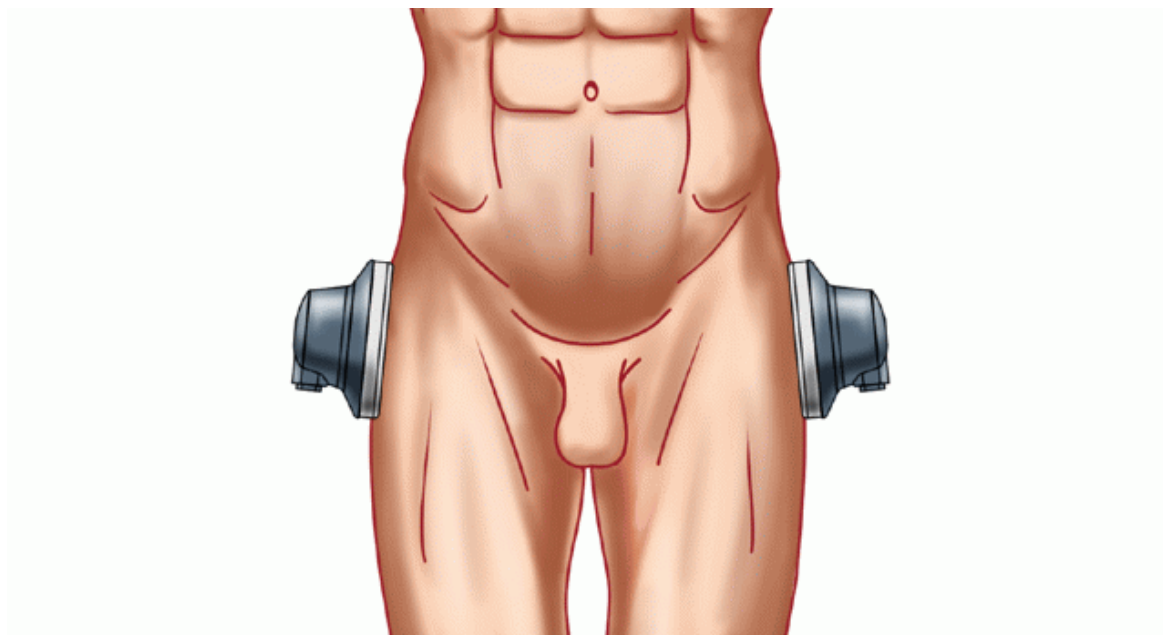


5.2 ЛЮМБАГО

<i>Программа</i>	D-0102 Программа: D-0102~ люмбаго
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольное расположение в нижней части спины
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	7
<i>Описание</i>	Боль в нижней области спины (пояснице). Подобная боль может также отдавать в ягодицах, бедре (-ах), ноге (-ах)
<i>Эффект</i>	расслабляющий
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Используйте только при переносимости для пациента. (1679)

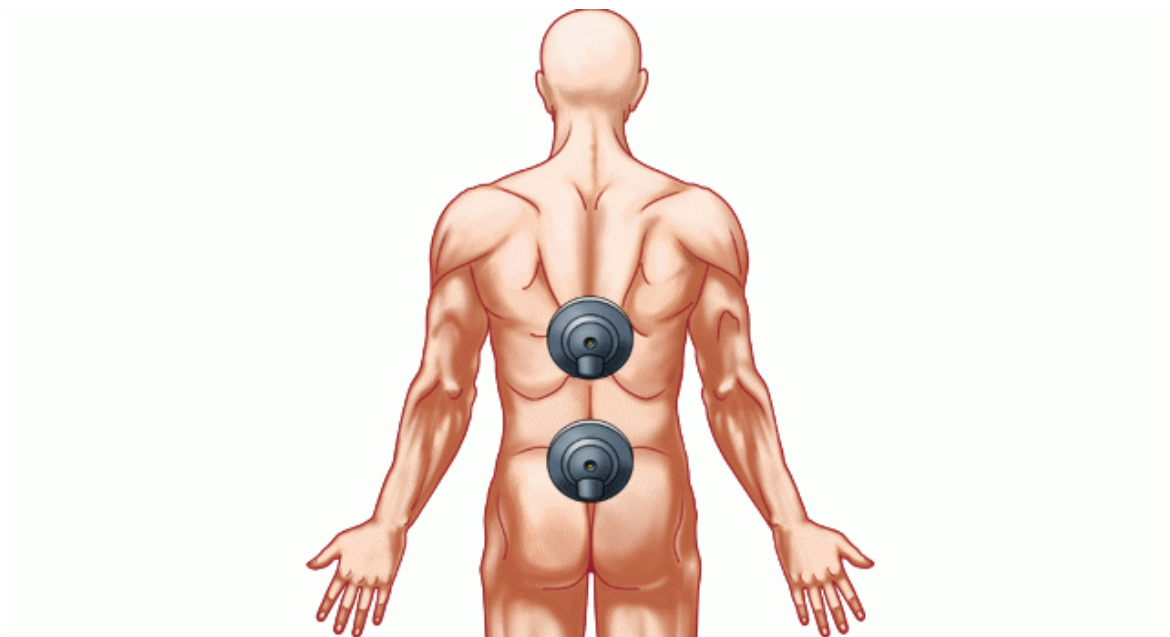


5.3 МЕЖРЁБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ

<i>Программа</i>	D-0100 Программа: D-0100~ межрёберная невралгия
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 150 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольное расположение на позвоночнике
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Нервная боль, которая происходит вокруг рёбер, дыхание может быть затруднённым
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий
<i>Примечание</i>	Применяйте разогревающую терапию только если это приемлемо для пациента. (1677)

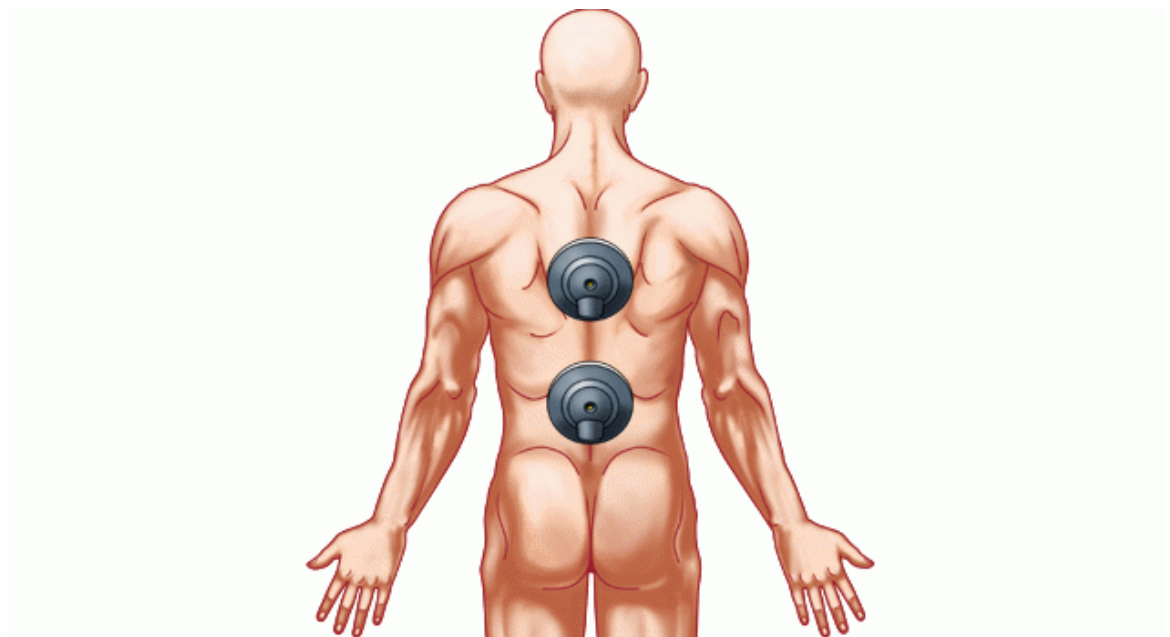

5.4 МИАЛГИЯ


<i>Программа</i>	D-0103 Программа: D-0103~ миалгия
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	на поражённых мышцах
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Мышечная боль, и симптом множества болезней и расстройств. Самой распространённой причиной миалгии является переутомление мышцы.
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Только при переносимости для пациента. (1680)

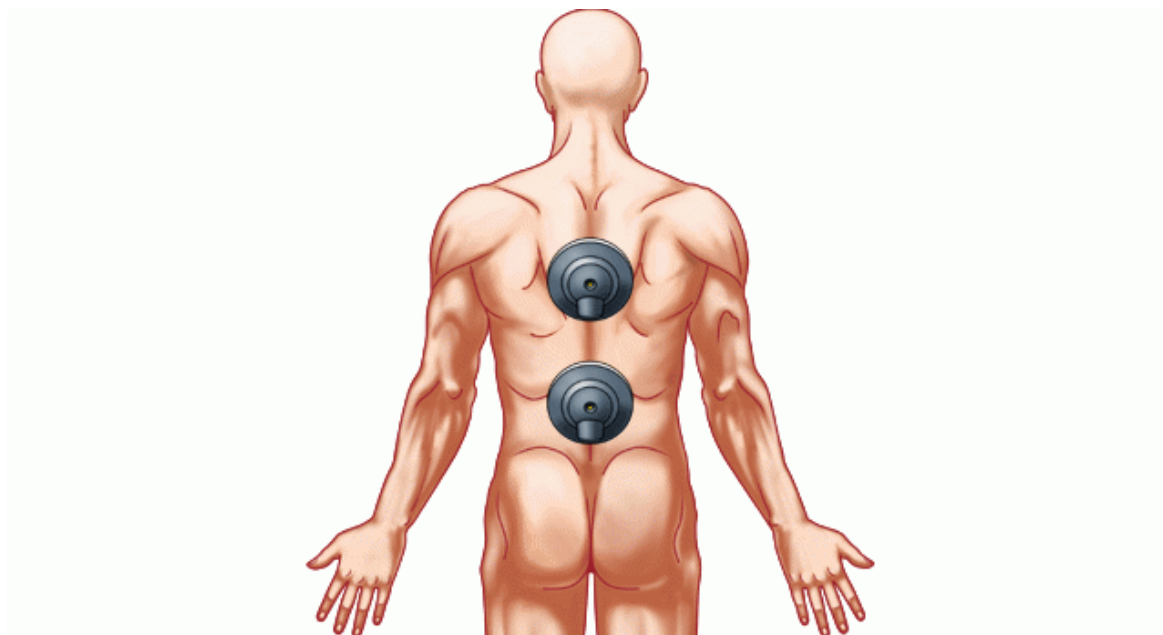

5.5 МИГРЕНЬ (ДАВЯЩАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ)


НЕВРОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-0106 Программа: D-0106~ мигрень (давящая головная боль)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	Малый плоский аппликатор на 3-ем шейном позвонке, малый плоский аппликатор продольно на позвоночнике
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	напряжение в подзатылочных связках, результатом чего является пульсирующая боль, обычно гомолатеральная
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезоливающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Используйте только при переносимости для пациента. Не при острых, болезненных стадиях. (1683)

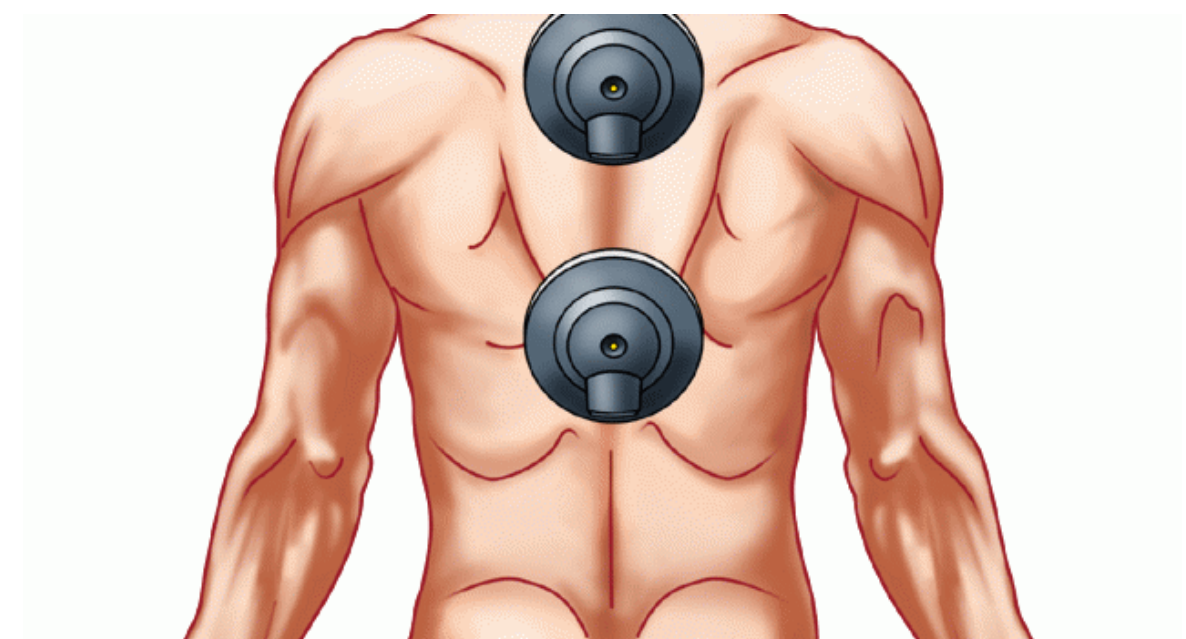

5.6 НЕВРАЛГИЯ


<i>Программа</i>	D-0104 Программа: D-0104~ невралгия
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольное расположение по нервному окончанию
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Болезненное расстройство нервов. Боль можно описать как "резкую", "острую", "как молния", "нестерпимую", и иногда "зудящую"
<i>Эффект</i>	обезболивающий (1681)

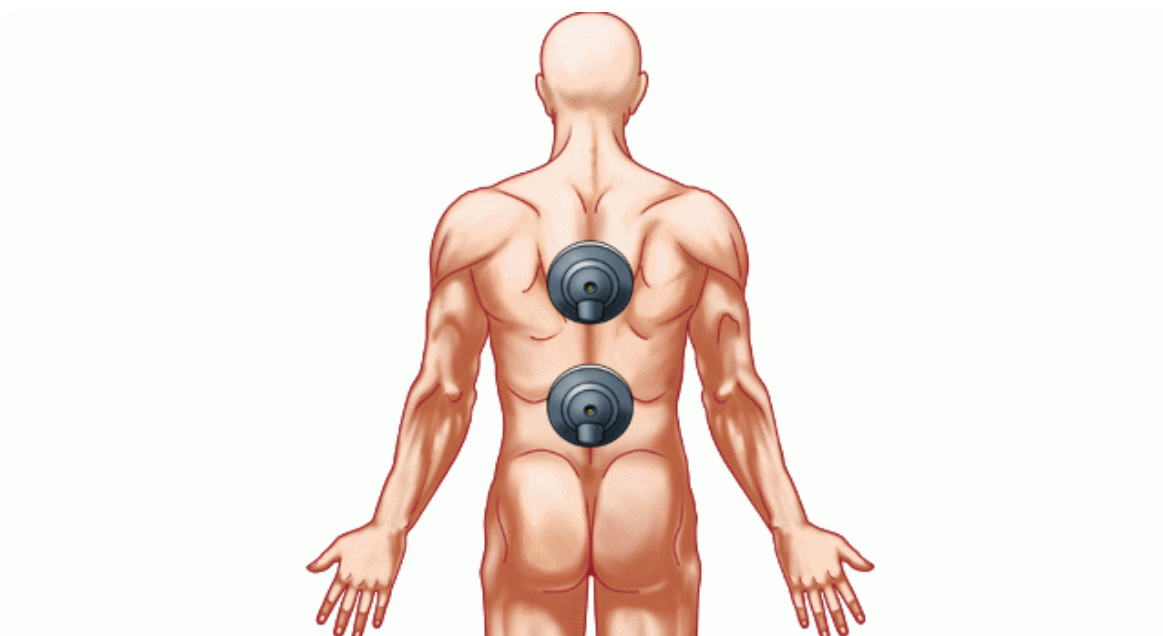

5.7 СИНДРОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА

НЕВРОЛОГИЯ

<i>Программа</i>	D-0105 Программа: D-0105~ синдром запястного канала
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	запястье с обратной и ладонной сторон
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Срединный нерв зажат в области запястья и результатом является боль, парестезия и мышечная слабость в руке.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, ускорение заживления, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. Применяйте только при хронической стадии. Можно использовать резиновые аппликаторы. (1682)

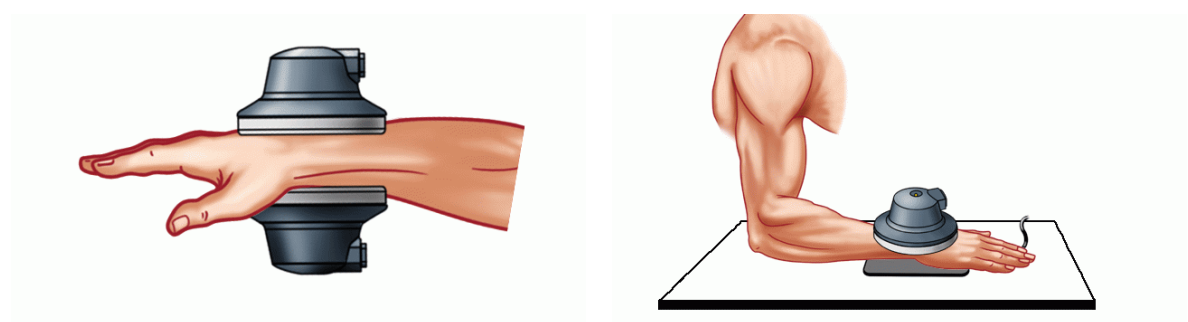


6 ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

6.1 "ЗАМОРОЖЕННОЕ ПЛЕЧО" (АДГЕЗИВНЫЙ КАПСУЛИТ)


ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

<i>Программа</i>	D-0011 Программа: D-0011~ "замороженное плечо" (адгезивный капсулит)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	по сторонам сустава
<i>Время применения</i>	5-10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Количество сеансов</i>	15
<i>Описание</i>	Боль и потеря подвижности или оцепенение в плече.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не используйте при острой стадии. (1658)

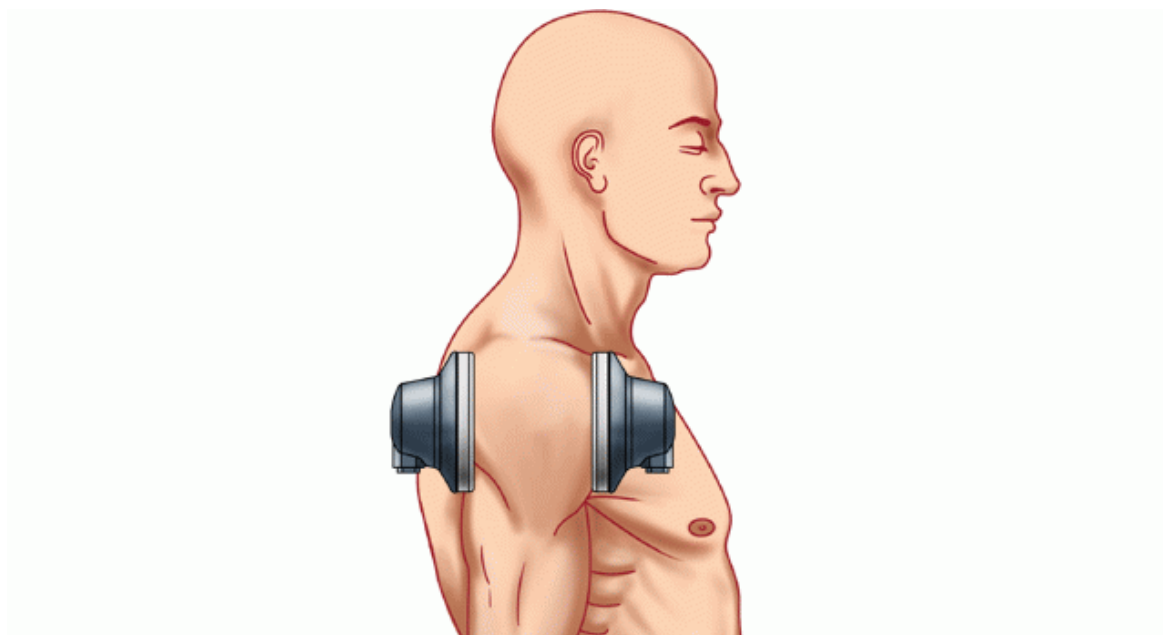

6.2 АХИЛЛОДИНИЯ


<i>Программа</i>	D-0002 Программа: D-0002~ ахиллодиния
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 100 частота импульса: 500 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам Ахиллова сухожилия (колени х стопа)
<i>Время применения</i>	приблиз-но 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 15
<i>Описание</i>	Воспаление Ахиллова сухожилия. Результатом является боль в этой области.
<i>Эффект</i>	Противовоспалительный, обезболивающий, снятие мышечного напряжения
<i>Примечание</i>	Возможно использовать уровень мощности 1 в течение 2-х минут, при воспалённом состоянии. Возможно использовать резиновый ёмкостный аппликатор под ступнёй. (1649)

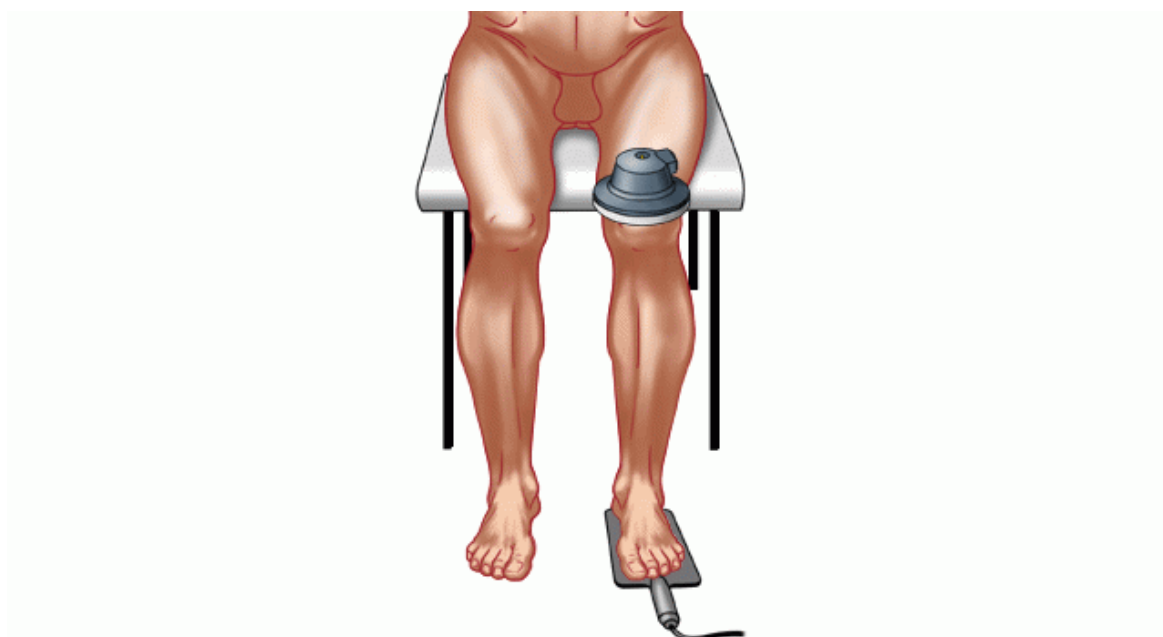

6.3 БЕХТЕРЕВА БОЛЕЗНЬ (АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ))


ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

<i>Программа</i>	D-0003 Программа: D-0003~ Бехтерева болезнь (анкилозирующий спондилоартрит))
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	Продольное прикладывание на позвоночник
<i>Время применения</i>	15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Потеря подвижности позвоночных сочленений. Результатом следует болезненное и затруднительное движение.
<i>Эффект</i>	Противовоспалительный, обезболивающий, локальное улучшение циркуляции крови, снятие мышечного напряжения (1650)

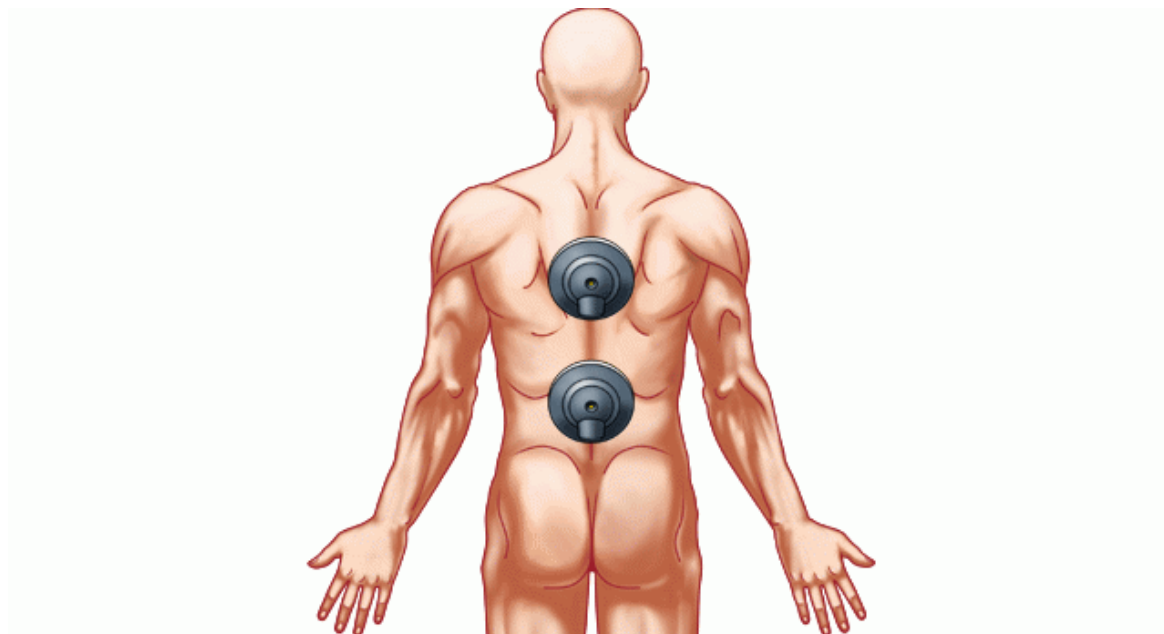


6.4 БОЛЕЗНЬ РЕЙНО

<i>Программа</i>	D-0013 Программа: D-0013~ болезнь Рейно
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Ёмкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	плечо и кисть
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Пораженный кровоток на конечности, пальцы рук, пальцы ног, нос и уши, если они подвержены влиянию изменений температуры или стресса
<i>Эффект</i>	локальное улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию в острой стадии. Используйте резиновый ёмкостный аппликатор под ладонью. (1660)

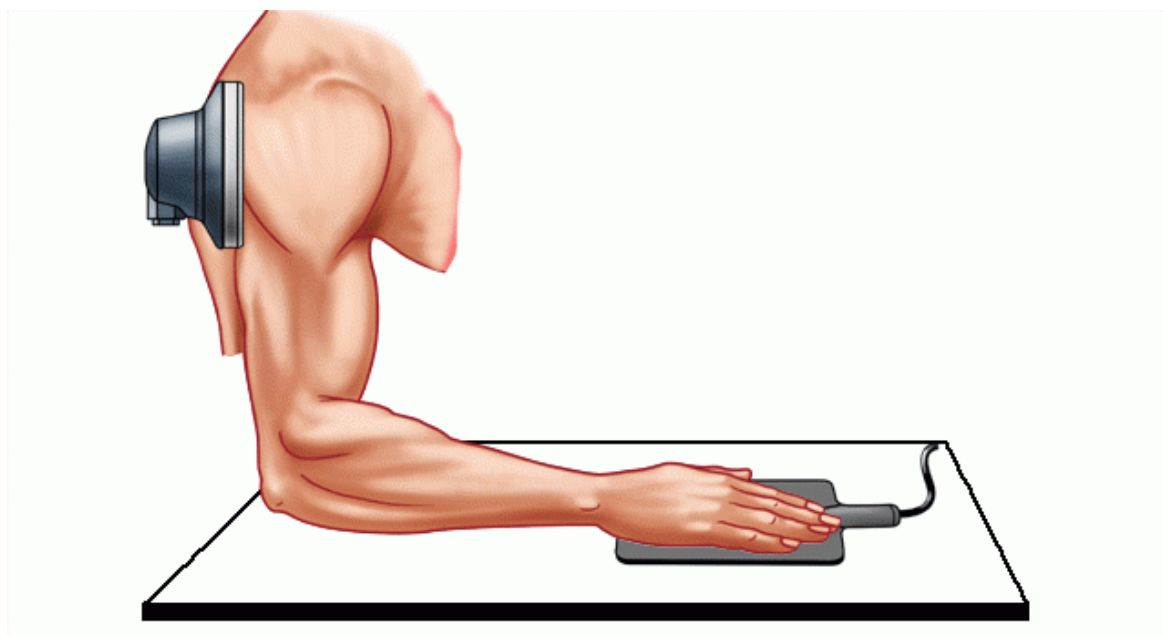


6.5 БУРСИТ

<i>Программа</i>	D-0004 Программа: D-0004~ бурсит
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 100 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	над суставом
<i>Время применения</i>	12 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление слизистой сумки, или кисты синовиальной жидкости
<i>Эффект</i>	противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Используйте при подострой стадии, не при острой. (1651)

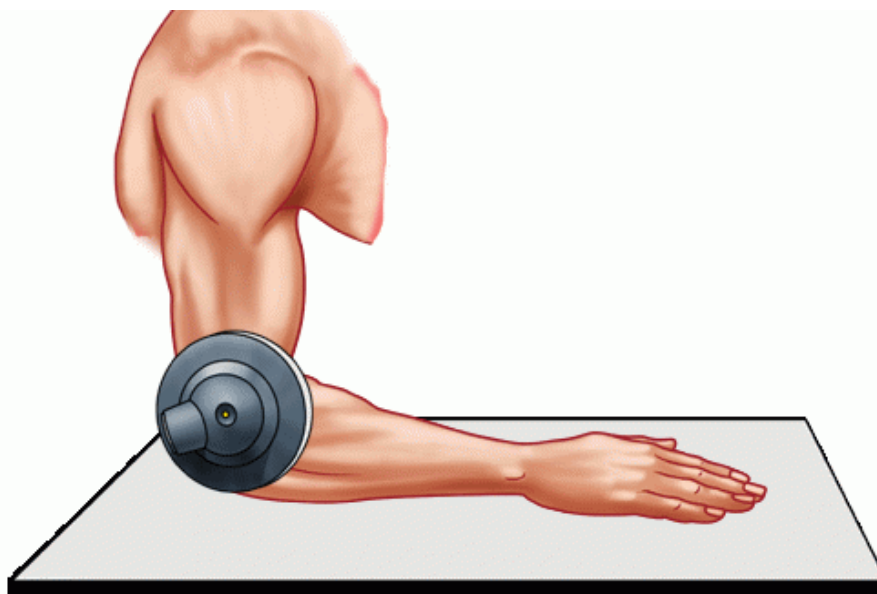


6.6 ДИСКОПАТИЯ

<i>Программа</i>	D-0022 Программа: D-0022~ дископатия
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольно на позвоночник
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применять при острой болезненной стадии. Можно использовать резиновые аппликаторы. (1669)

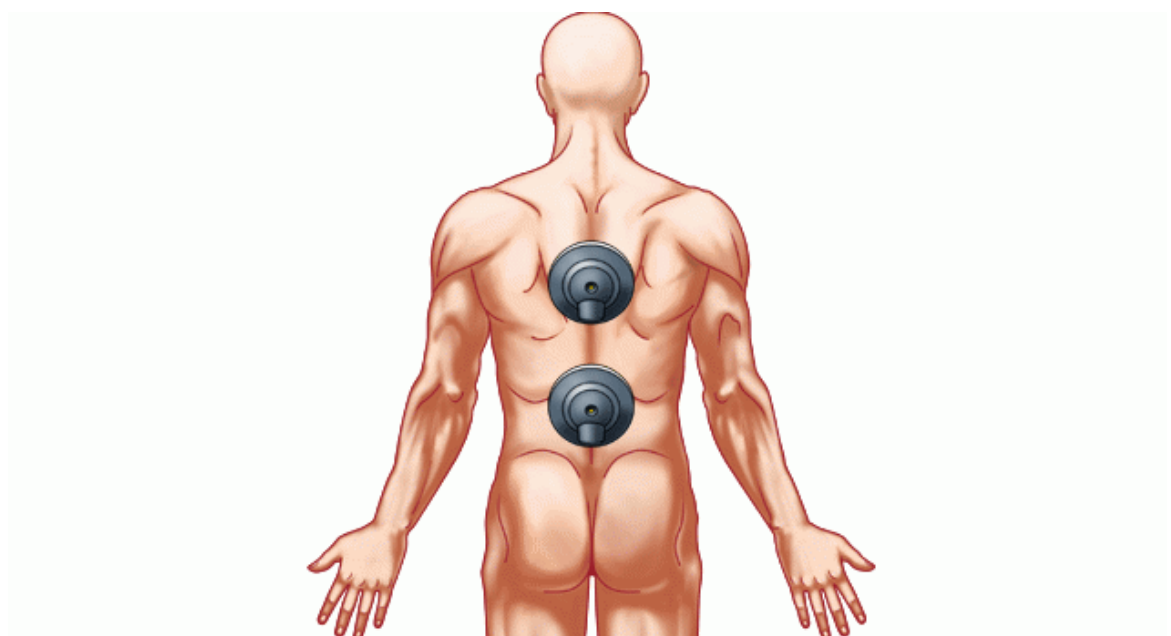


6.7 ДИСТРОФИЯ ЗУДЕКА (РСД)

<i>Программа</i>	D-0016 Программа: D-0016~ дистрофия Зудека (РСД)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	На поражённой площади по ощущениям пациента. Обычно на руке.
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Местный болевой синдром. Это редкое расстройство симпатической нервной системы.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, ускорение заживления, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. Применяйте только при хронической стадии. Для удобства можно использовать резиновые ёмкостные аппликаторы. (1663)

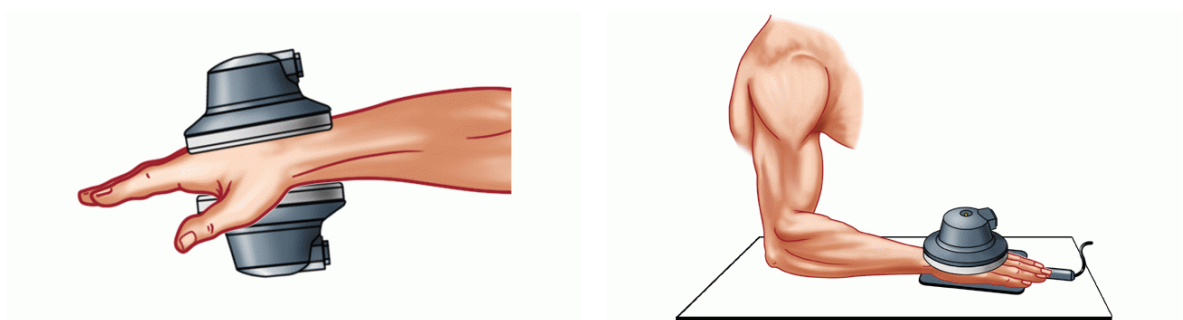

6.8 ИШИАЛГИЯ (ИШИОДИНИЯ)

<i>Программа</i>	D-0024 Программа: D-0024~ ишиалгия (ишиодиния)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	Продольное расположение, аппликаторы на болезненных областях.
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	12
<i>Описание</i>	боль в седалищной кости (бедре), на окончании седалищного нерва
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий
<i>Примечание</i>	Применяйте разогревающую терапию, только если это приемлемо для пациента. Не применяйте при острой стадии. (1671)

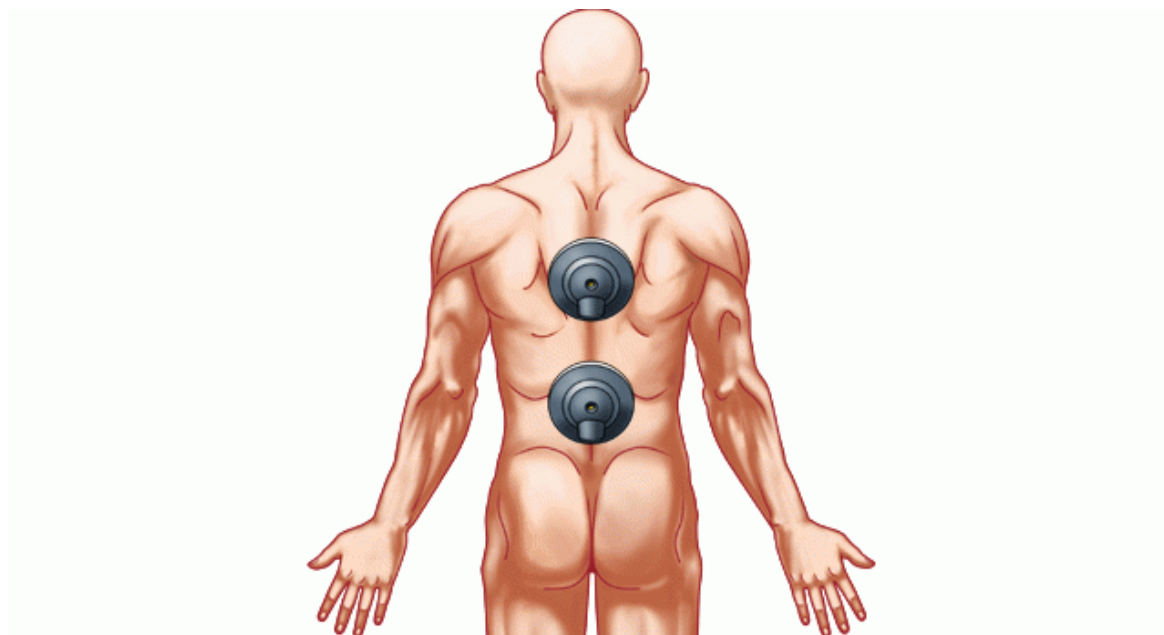


6.9 КАПСУЛИТ

<i>Программа</i>	D-0020 Программа: D-0020~ капсулит
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	Суставы стопы на верхней и нижней (подошвенной) сторонах
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Боль и потеря подвижности или оцепенение сустава. Обычно поражает стопу, но может проявиться в любом суставе тела.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте в острой болезненной стадии. Используйте резиновый аппликатор под ступней. (1667)




6.10 КОНТРАКТУРА

<i>Программа</i>	D-0010 Программа: D-0010~ контрактура
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 110 частота импульса: 300 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	На суставе. Ладонь и пальцы в случае контрактуры Дюпюйтрена
<i>Время применения</i>	15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Аномальное уплотнение вязкой ткани, которое проявляется потерей подвижности суставов. Самая известная контрактура Дюпюйтрена, при которой поражаются ладонь и пальцы
<i>Эффект</i>	тканезаживляющий, расслабляющий мышцы, локальное улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не используйте согревающую терапию в случае болезненной стадии. Для удобства можно использовать резиновые ёмкостные аппликаторы. (1657)

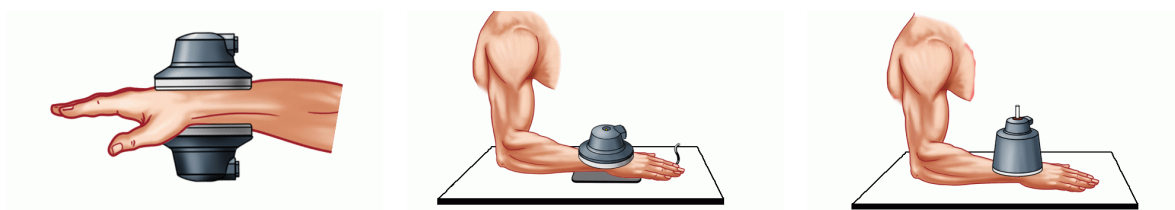


6.11 ЛЮМБАГО

<i>Программа</i>	D-0025 Программа: D-0025~ люмбаго
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольное расположение в нижней части спины
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	7
<i>Описание</i>	Боль в нижней области спины (пояснице). Подобная боль может также отдавать в ягодицах, бедре (-ах), ноге (-ах)
<i>Эффект</i>	расслабляющий
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Используйте только при переносимости для пациента. (1672)

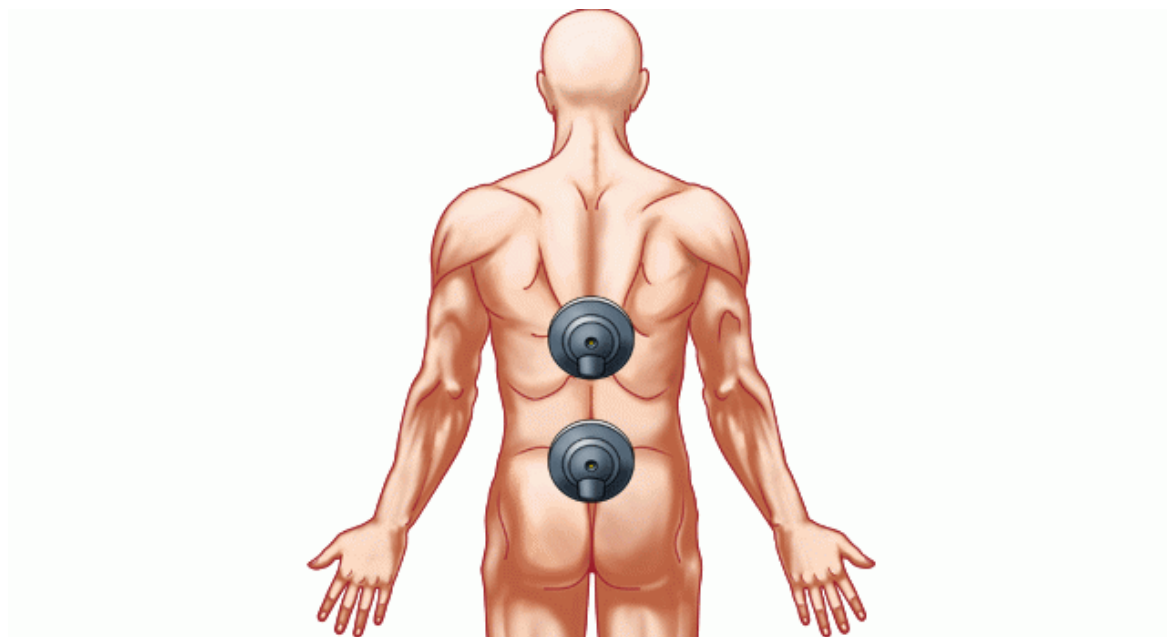


6.12 МЕНИСКОПАТИЯ

<i>Программа</i>	D-0023 Программа: D-0023~ менископатия
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 400 частота импульса: 100 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	на колене по верхней и внутренней сторонам
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Количество сеансов</i>	8
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой болезненной стадии. Можно использовать резиновые емкостные аппликаторы. (1670)

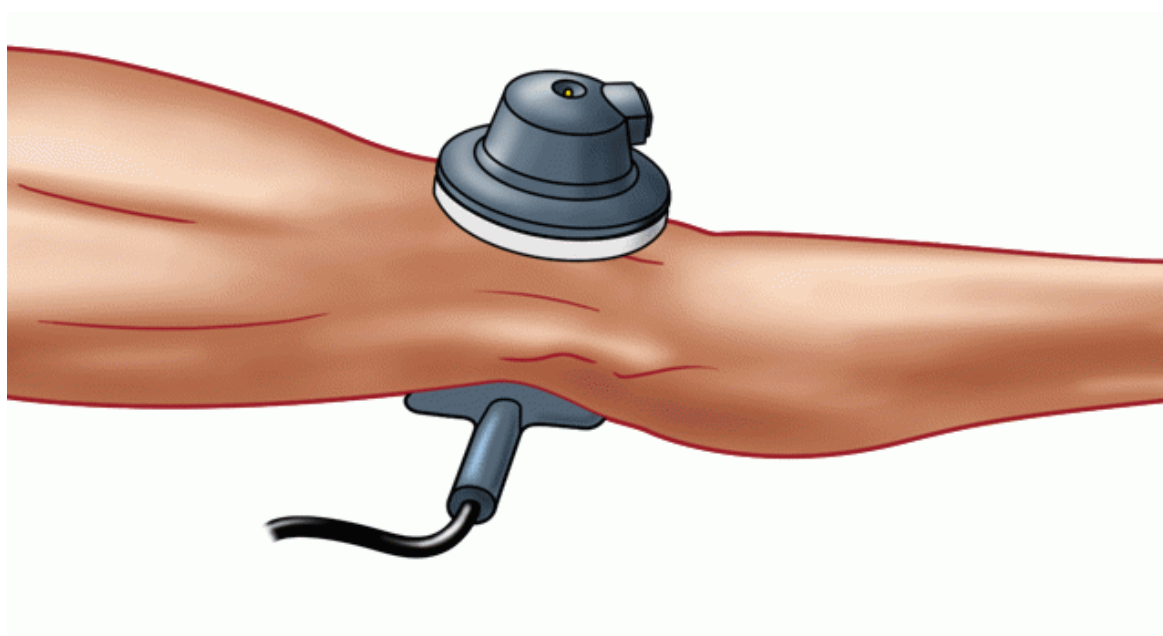


6.13 МИАЛГИЯ

<i>Программа</i>	D-0026 Программа: D-0026~ миалгия
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	на поражённых мышцах
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Мышечная боль, и симптом множества болезней и расстройств. Самой распространённой причиной миалгии является переутомление мышцы.
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий
<i>Примечание</i>	Не применяйте при острой стадии. Только при переносимости для пациента. (1673)

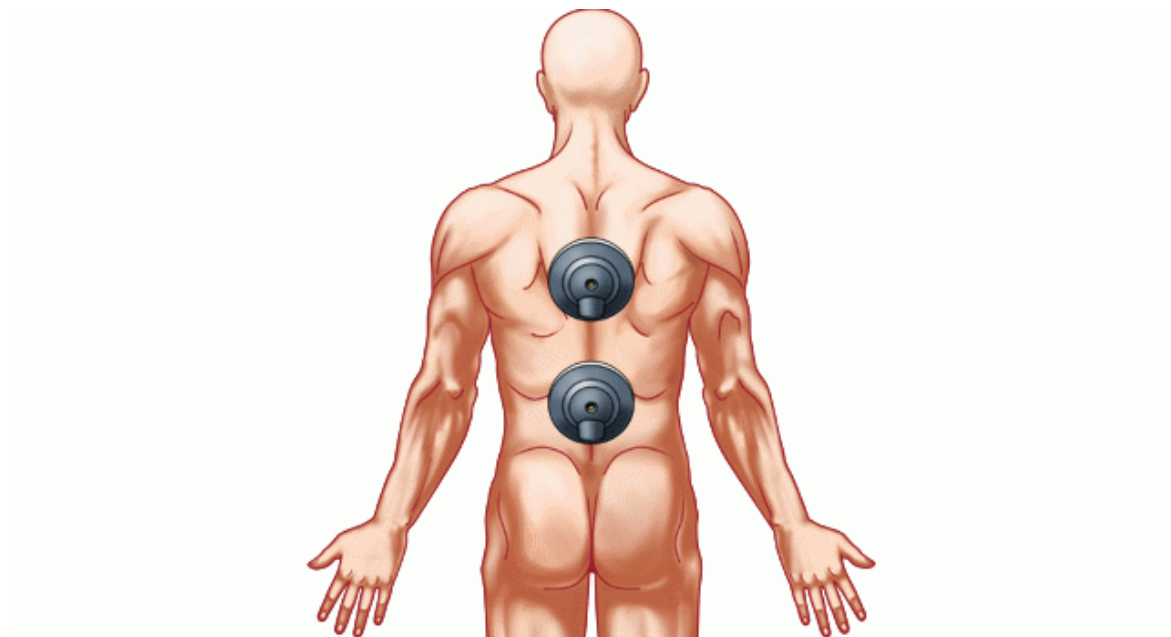


6.14 МИГРЕНЬ (ДАВЯЩАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ)

<i>Программа</i>	D-0028 Программа: D-0028~ мигрень (давящая головная боль)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	Малый плоский аппликатор на 3-ем шейном позвонке, малый плоский аппликатор продольно на позвоночнике
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	напряжение в подзатылочных связках, результатом чего является пульсирующая боль, обычно гомолатеральная
<i>Эффект</i>	расслабляющий, обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Используйте только при переносимости для пациента. Не при острых, болезненных стадиях. (1675)

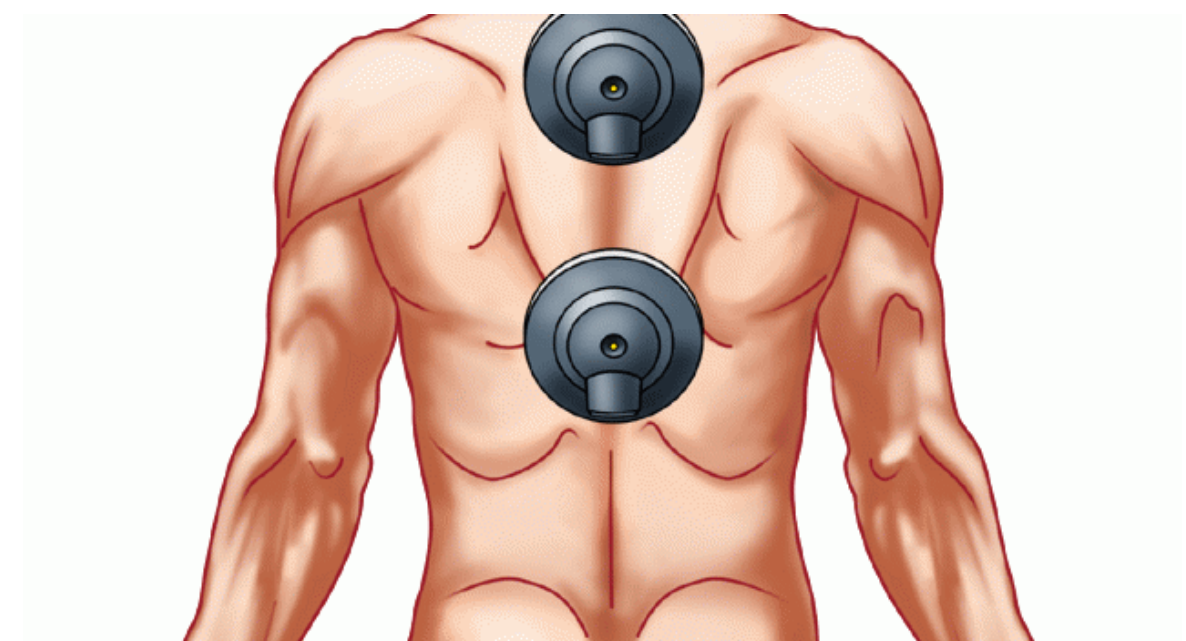


6.15 ОСТЕОАРТРИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ

<i>Программа</i>	D-0029 Программа: D-0029~ остеоартрит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам повреждённого сустава (бедро, колено, плечо, локоть, запястье...)
<i>Время применения</i>	10 - 15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 10
<i>Описание</i>	Суставная болезнь, которая в основном поражает хрящ. Результатом следует боль, опухоль и потеря подвижности сустава.
<i>Эффект</i>	Снятие мышечного напряжения
<i>Примечание</i>	Не применяйте на болезненных суставах. Используйте только при переносимости для пациента. При применении на колене используйте полотенце между коленями. (1647)

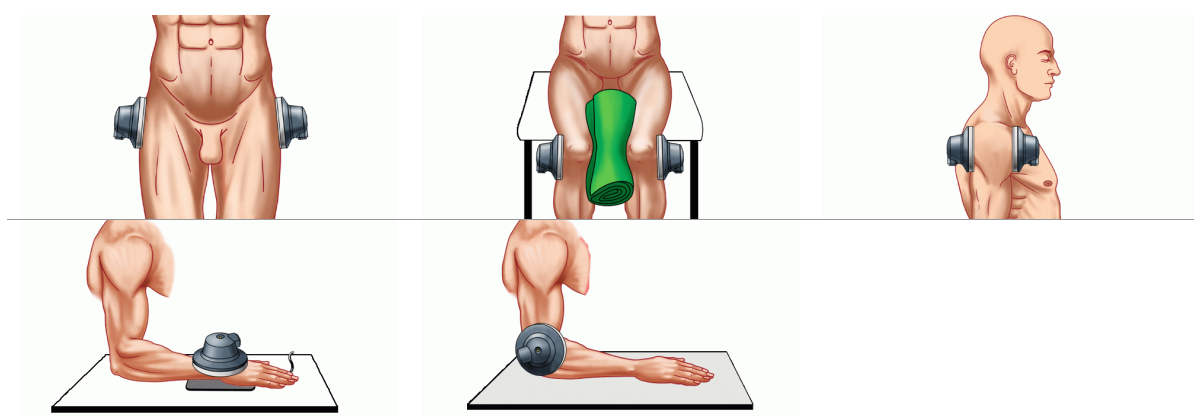


6.16 ОСТЕОХОНДРОЗ

<i>Программа</i>	D-0015 Программа: D-0015~ остеохондроз
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольно на позвоночнике
<i>Время применения</i>	15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	15
<i>Описание</i>	Поражения процесса роста костной ткани. Остеохондроз наблюдается только у детей и подростков, чьи кости все ещё растут.
<i>Эффект</i>	расслабление мышц, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. Можно использовать резиновые аппликаторы. (1662)

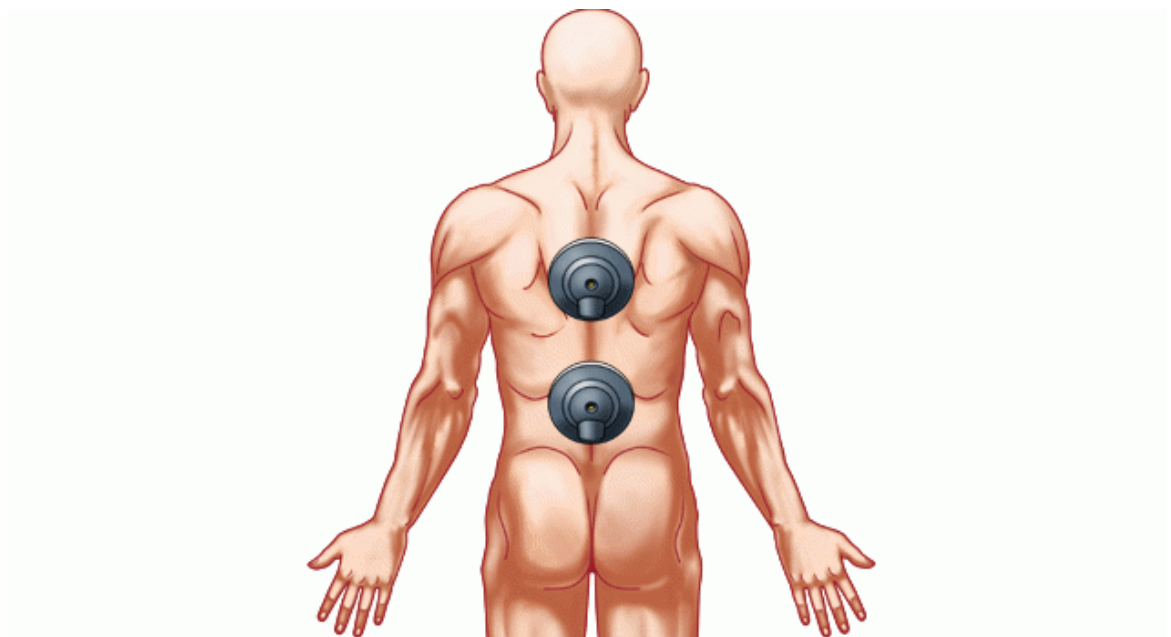


6.17 ПЕРЕЛОМ

<i>Программа</i>	D-0009 Программа: D-0009~ перелом
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	над переломом
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	сломанные кости
<i>Эффект</i>	тканезаживляющий, ускорение заживления
<i>Примечание</i>	Не используйте в острой стадии, при гематоме или выступающем переломе. Могут быть использованы резиновые ёмкостные аппликаторы и катушечные индуктивные аппликаторы. (1656)

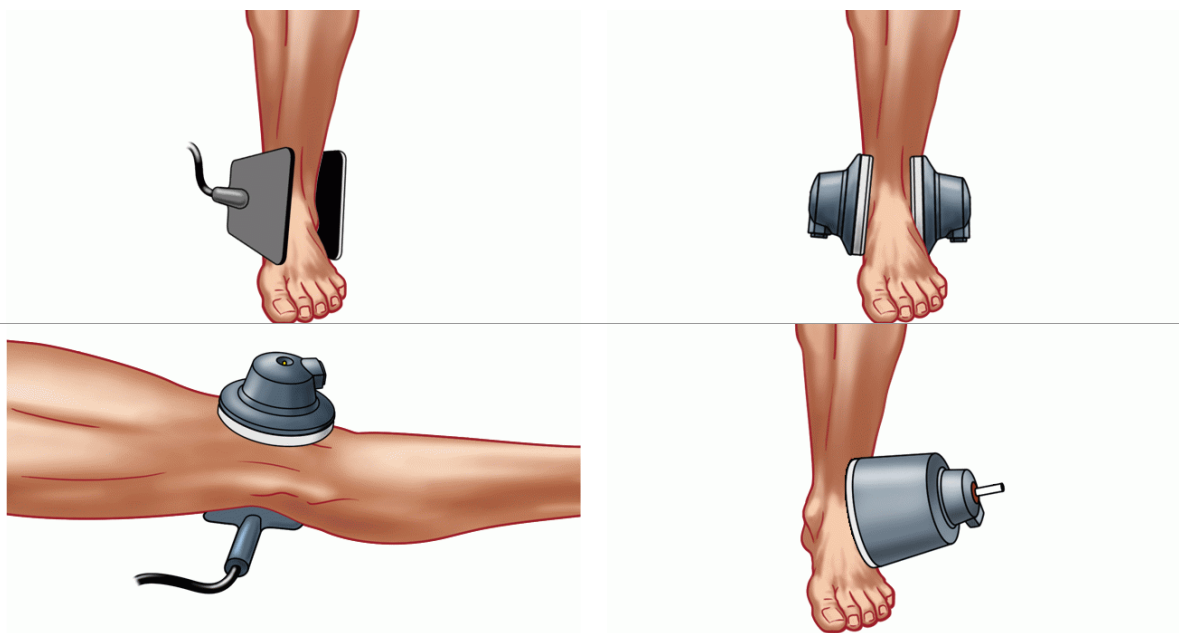

6.18 ПЕРИОСТИТ

<i>Программа</i>	D-0012 Программа: D-0012~ периостит
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам кости
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление надкостницы (вокруг кости)
<i>Эффект</i>	обезболивающий, противовоспалительный
<i>Примечание</i>	Не используйте согревающую терапию при острой стадии. Для удобства можно использовать резиновые ёмкостные аппликаторы. (1659)

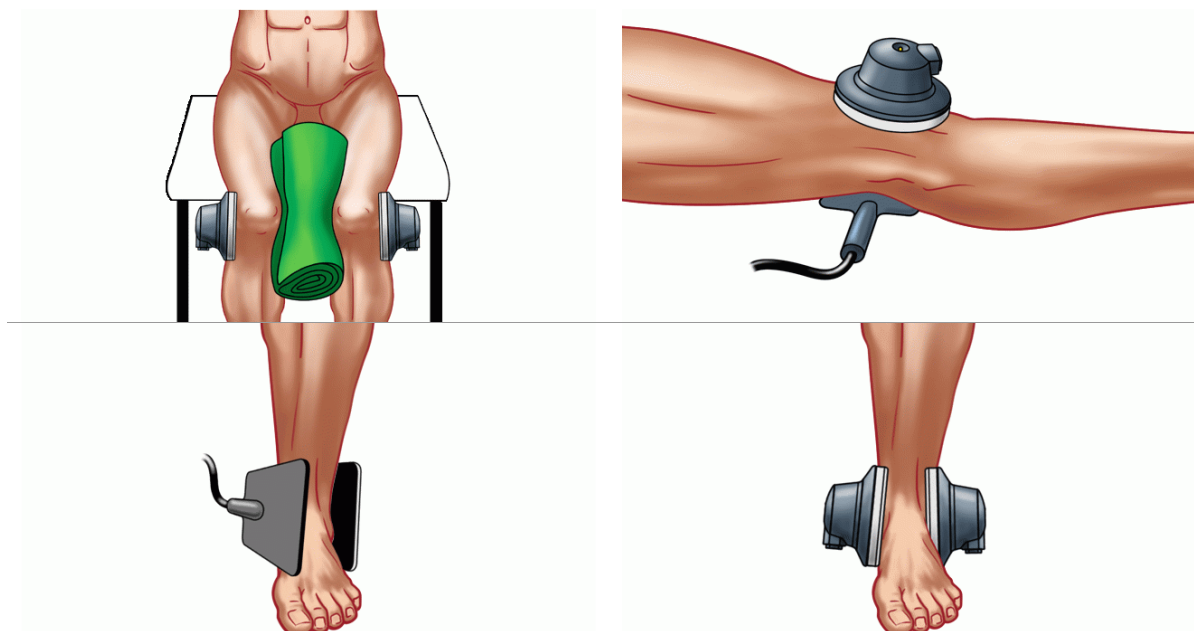

6.19 ПОЛИАРТРИТ - ХРОНИЧЕСКИЙ

<i>Программа</i>	D-0001 Программа: D-0001~ полиартрит - хронический
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 200 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам повреждённого сустава (бедро, плечо)
<i>Время применения</i>	приблиз-но 15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	приблиз-но 10
<i>Описание</i>	Хроническая соматическая болезнь, главным образом суставов. Результатом следуют воспалительные изменения в суставных структурах и атрофирование костной массы.
<i>Эффект</i>	Снятие мышечного напряжения
<i>Примечание</i>	Применение на безболезненных суставах. Используйте только при переносимости для пациента. (1648)



6.20 РАСТЯЖЕНИЕ / ВЫВИХ / УШИБ


ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

<i>Программа</i>	D-0005 Программа: D-0005~ растяжение / вывих / ушиб
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 300 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: катушечные аппликаторы
<i>Расположение аппликаторов</i>	по бокам сустава
<i>Время применения</i>	5-10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	5-10
<i>Описание</i>	Суставные поверхности отходят друг от друга и затем возвращаются в исходное состояние. Результатом следует очень болезненное травмирование соседних мягких тканей.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, тканезаживляющий, противоотечный, локальное улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не используйте согревающую терапию при острой стадии или свежей гематоме. Может быть использован ёмкостный аппликатор. (1652)




6.21 СИНДРОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА

<i>Программа</i>	D-0027 Программа: D-0027~ синдром запястного канала
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	запястье с обратной и ладонной сторон
<i>Время применения</i>	5 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Срединный нерв зажат в области запястья и результатом является боль, парестезия и мышечная слабость в руке.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, ускорение заживления, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. Применяйте только при хронической стадии. Можно использовать резиновые аппликаторы. (1674)

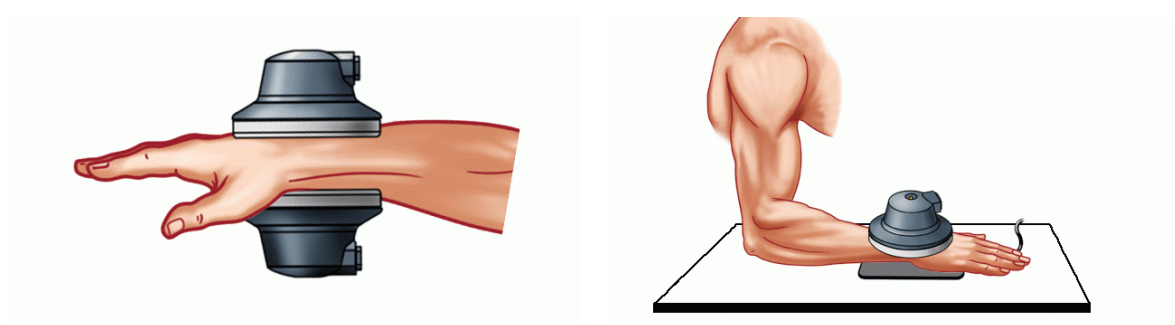


6.22 СИНДРОМ ЛЕСТНИЧНОЙ МЫШЦЫ (СВ СИНДРОМ)

<i>Программа</i>	D-0019 Программа: D-0019~ синдром лестничной мышцы (СВ синдром)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	плоский аппликатор на шейные позвонки, резиновый аппликатор под ладонью
<i>Время применения</i>	5 -10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	шейные боли сопровождающиеся покалыванием или другими симптомами в вышерасположенной конечности
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Используйте только при переносимости для пациента. Не при острых, болезненных стадиях. (1666)

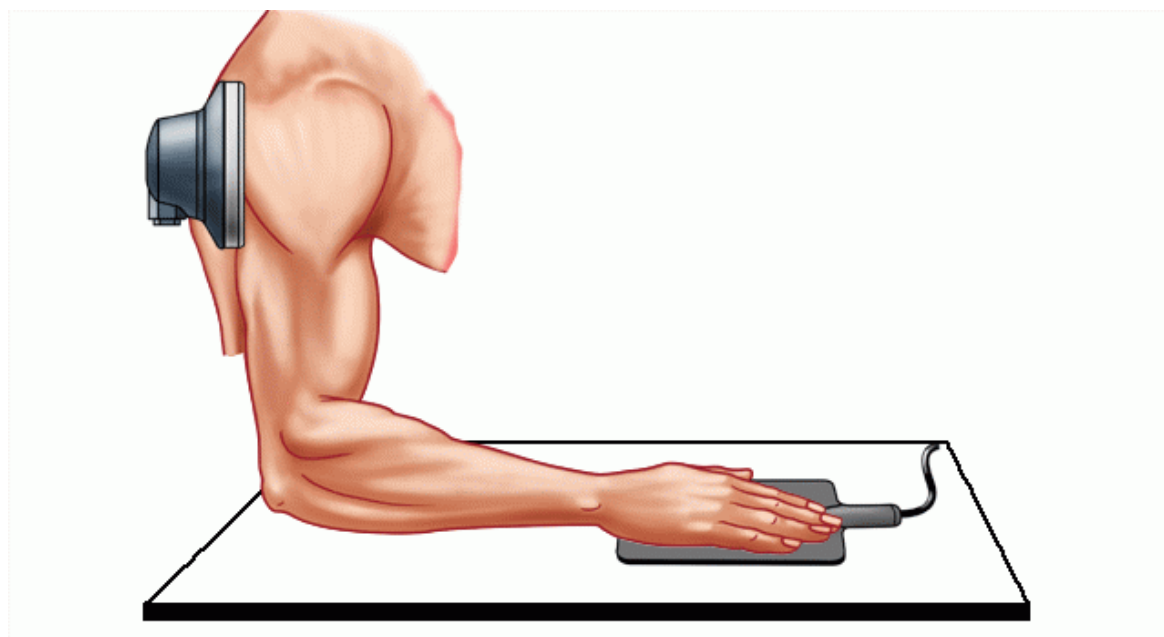


6.23 СПОНДИЛЕЗ (ПОЗВОНОЧНЫЙ АРТРИТ)

<i>Программа</i>	D-0014 Программа: D-0014~ спондилез (позвоночный артрит)
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	продольно на позвоночнике
<i>Время применения</i>	15 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	15
<i>Описание</i>	дегенерация и деформация позвоночных сочленений, которое обычно проявляется с возрастом
<i>Эффект</i>	расслабление мышц, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию в острой стадии. Можно использовать резиновые ёмкостные аппликаторы. (1661)

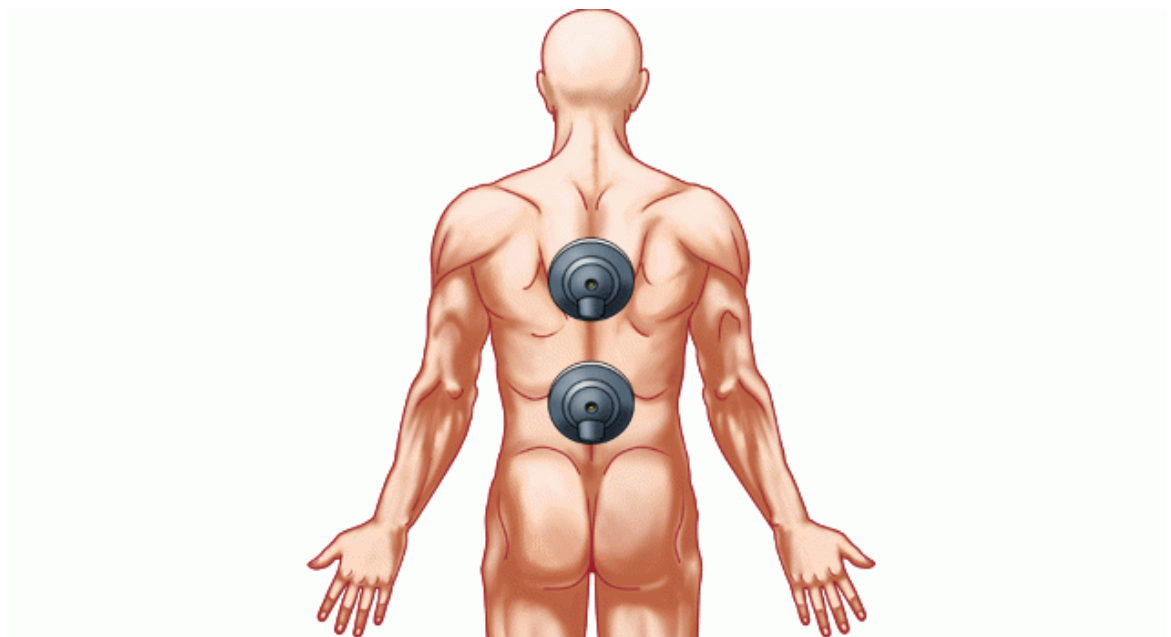


6.24 ТЕНДОВАГИНИТ

<i>Програма</i>	D-0017 Программа: D-0017~ тендовагинит
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	резиновый аппликатор под ладонной стороной кисти, ёмкостный аппликатор на обратной стороне кисти
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	15
<i>Описание</i>	теносиновит сопровождаемый скрипящим звуком во время движения, обычно на тыльной стороне запястья
<i>Эффект</i>	обезболивающий, противовоспалительный, расслабляющий
<i>Примечание</i>	Не применяйте разогревающую терапию при острой стадии. Используйте резиновый аппликатор под ладонью. (1664)

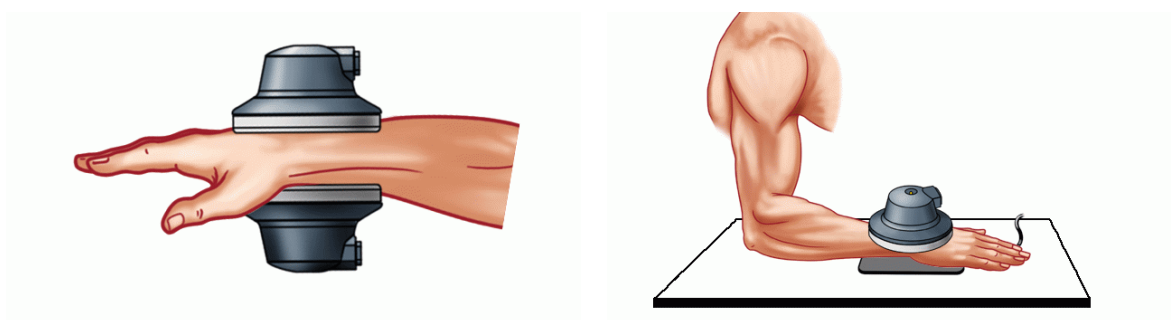


6.25 ХОНДРОМАЛЯЦИЯ ("КОЛЕНО БЕГУНА")

<i>Программа</i>	D-0021 Программа: D-0021~ хондромалация ("колени бегуна")
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 100 частота импульса: 400 термальное восприятие: нет ощущения рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	колени с верхней и подколенной стороны.
<i>Время применения</i>	12 мин.
<i>Частота сеансов</i>	два раза в неделю
<i>Колличество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	воспаление хряща коленной чашечки
<i>Эффект</i>	обезболивающий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Не применять при острой болезненной стадии. Можно использовать резиновые аппликаторы. (1668)

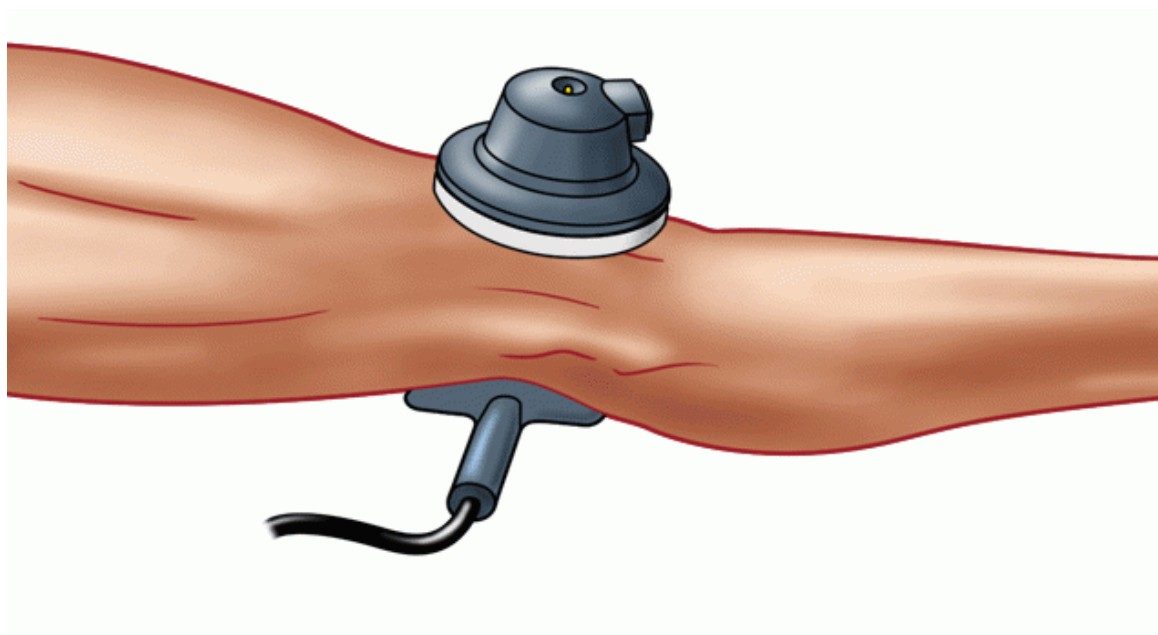

6.26 ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

<i>Программа</i>	D-0018 Программа: D-0018~ цервикальный синдром
<i>Параметры терапии</i>	режим: непрерывный длительность импульса: 0 частота импульса: 0 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	малый плоский аппликатор на 3-ем шейном позвонке, плоский аппликатор продольно на позвоночнике
<i>Время применения</i>	5 - 10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	через день
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Напряжение в подзатылочной мышце. Результатом является боль, похожая на мигрень.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий, улучшение циркуляции крови
<i>Примечание</i>	Используйте только при переносимости для пациента. Не при острых, болезненных стадиях. Можно использовать индукционный катушечный аппликатор. (1665)

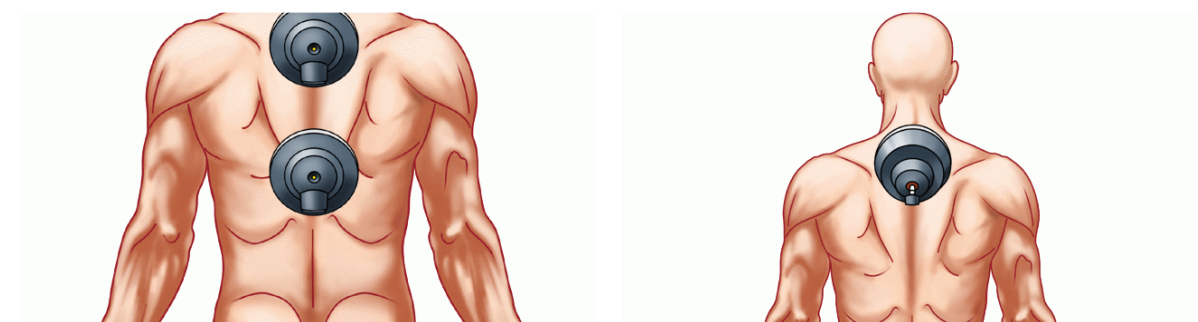

6.27 ЭПИКОНДИЛИТ ("ТЕННИСНЫЙ ЛОКОТЬ")

ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

<i>Программа</i>	D-0008 Программа: D-0008~ эпикондилит ("теннисный локоть")
<i>Параметры терапии</i>	режим: импульсный длительность импульса: 110 частота импульса: 200 термальное восприятие: легкое согревание рекомендованные аппликаторы: Емкостный аппликатор
<i>Расположение аппликаторов</i>	по сторонам на локтевой сустав
<i>Время применения</i>	10 мин.
<i>Частота сеансов</i>	ежедневно
<i>Количество сеансов</i>	10
<i>Описание</i>	Повреждение в результате переутомления касающееся разгибательную/супинаторную мышцы. Результатом является боль в области латерального надмыщелка, отдаленного от центра плечевой кости.
<i>Эффект</i>	обезболивающий, расслабляющий мышцы
<i>Примечание</i>	Используйте согревающую терапию только в хронической стадии. (1655)

